

Dormi, Thomas en Jasmijn Hoog-laag kinderbedden



Dormi



Thomas



Jasmijn

atlas

REVALIDATIE TECHNIEK

Postadres
Postbus 106
5370 AC Ravenstein
Bezoekadres
Korte Stukken 7
5371 MN Ravenstein

Tel: 0486-45 33 44
Fax: 0486-45 35 15
www.atlas-rehab.nl
info@atlas-rehab.nl

CE
April 2007

Voorwoord

Het kinderbed model Dormi, Thomas en Jasmijn is met name bedoeld voor kinderen die vaak verzorging op bed nodig hebben.

De hoog-laag kinderbedden zijn voorzien van CE-markering, wat aangeeft dat aan de Europese eisen voor veiligheid wordt voldaan.

Het kinderbed wordt afgesteld en geleverd door de dealer. Met deze handleiding kunnen daarna moeiteloos de belangrijkste handelingen worden gedaan om het kind optimaal en veilig gebruik te kunnen laten maken van het hoog-laag bed.

In deze handleiding wordt veel gebruik gemaakt van foto's, zodat een instelmogelijkheid op het hoog-laag kinderbed gemakkelijk kan worden teruggevonden.

Uw ervaringen met het hoog-laag kinderbed zijn belangrijk voor het steeds verbeteren van de "Dormi, Thomas en Jasmijn". Wij willen u vragen om na enkele weken het enquêteformulier, dat achter in deze gebruiksaanwijzing te vinden is, in te vullen en aan ons te retourneren:

Atlas Revalidatie Techniek
Antwoordnummer 3509
5370 ZX Ravenstein

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

Inhoudsopgave

1. De hoog-laag kinderbedden	3
2. De veiligheid.....	4
2.1 De veiligheidsvoorschriften.....	4
2.2 Acuut gevaar	4
3. Ingebruikname	5
3.1 In het hoog-laag bed helpen van het kind	5
3.2 Uit het hoog-laag bed helpen van het kind	5
4. De bediening	6
4.1 De remmen.....	6
4.2 De kindersloten.....	6
4.3 De hoogteverstelling.....	7
4.4 De anti-Trendelenburg verstelling	7
5. Onderhoud	8
6. Verhelpen van problemen.....	8
7. Garantie	9
8. Technische gegevens	9
8.1 Gegevens	9
8.2 Bekleding.....	9
8.3 Opties	9

1. De hoog-laag kinderbedden

De verrijdbare kinderbedden zijn zeer kindvriendelijke, speelse modellen. De Jasmijn heeft door de gebogen lijnen een kindvriendelijke uitstraling. De Thomas heeft door de strakke lijnen een stoere uitstraling.

Standaard

De bedden zijn voorzien van een vlakke, houten lattenbodemp. Hierop ligt een matras met een urine-bestendige celflex hoed. De kleur van de kinderbedden is blank gelakt beuken. De bedden zijn in twee standaard maten te verkrijgen: 90 x 200 cm en 80 x 180 cm (matrasmaten).

Hoogteverstelling

De toepassing van hoog-laag kolommen aan het hoofd- en voeteneind geven ruime mogelijkheden. Hierdoor is het bed goed onderrijdbaar voor een tillift en is bovendien een anti-Trendelenburg verstelling mogelijk.

De hoogteverstelling is 40 cm (bij Jasmijn 50 cm) en gaat van ongeveer 50 cm (bij Jasmijn 40 cm) tot 90 cm hoog, gemeten vanaf de bovenzijde van het matras. Door deze verstelling zijn transfers en verzorging op iedere hoogte te realiseren. Tegen meerprijs is een hoogteverstelling van 50 of 60 cm mogelijk.

Veiligheid

In de standaard uitvoering heeft het bed een omranding van 30 cm hoog (bij Jasmijn 30-40 cm). Beide lange zijden zijn neerklapbaar en voorzien van kindersloten. Daarnaast kunnen de bedden als extra optie voorzien worden van doorzichtig lexaan of bisonyl beschermingsmatten. De bediening van het hoog-laag systeem is extra beveiligd door middel van een contact-onderbreker.



Afbeelding 1:

De standaard uitvoering van het model Thomas.
(De Dormi en Jasmijn hebben dezelfde kenmerken.)

- a) Matras
- b) Neerklapbare lange zijde
- c) Kinderslot
- d) Hoog-laag kolommen

2. De veiligheid

Atlas heeft de grootste zorg besteed aan de veiligheid van het kind; er is veel aandacht besteed aan de juiste vormgeving van het hoog-laag bed en de instellingen bij ingebruikname zijn door Atlas op deskundige wijze gedaan. Er zijn evenwel nog de volgende veiligheidsvoorschriften die door de begeleiders en ouders van het kind beslist moeten worden nageleefd om een veilig gebruik van het hoog-laag bed te waarborgen.

2.1 De veiligheidsvoorschriften

- a) Lees eerst deze gebruiksaanwijzing door en probeer het bed eerst uit zonder dat het kind plaats neemt in het bed;
- b) Laat uw kind nooit alleen achter wanneer de omranding van het bed geopend is;
- c) Zet het bed altijd op de laagste stand als het kind zonder toezicht in bed ligt;
- d) Zorg ervoor dat de sluitingen van de lange zijden altijd goed vastgemaakt zijn;
- e) Verzeker uzelf ervan dat het kind niet zelfstandig de lange zijden neer kan klappen;
- f) Zorg ervoor dat het kind het bed niet zelf kan bedienen. Doe dit door de elektrische bediening buiten bereik van het kind te plaatsen of door de elektriciteit uit te schakelen;
- g) Haal de stekker uit de muur voordat het bed verplaatst wordt. Let op dat de draad niet over de grond sleept en niet in de buurt van de wielen komt.
- h) Laat kinderen niet in, rond of met het hoog-laag bed spelen;
- i) Verstellingen mogen alleen door ouders of verzorgers worden gedaan;
- j) Gebruik nooit het hoog-laag bed als het elektrisch materiaal, de snoeren of de handbediening defect zijn;
- k) Kom nooit met vloeibare bestanddelen in de buurt van de elektrische delen;
- l) Plaats het bed op een vlakke ondergrond;
- m) Houd u aan het maximaal toelaatbare gewicht van 150 kilogram;
- n) Elke service uitgevoerd door iemand anders dan een door Atlas Revalidatie Techniek gevolmachtigd persoon zal de garantie ongeldig maken en Atlas Revalidatie Techniek is dan niet meer aansprakelijk voor verwondingen en/of beschadigingen.

Op het hoog-laag bed wordt veiligheidsvoorschrift "b" en "f" herhaald in de vorm van een waarschuwingssticker (zie onderstaande figuur). Zorg ervoor dat deze tekst ten alle tijde leesbaar blijft. Vraag zondig om een nieuw exemplaar van deze sticker.

Laat uw kind nooit alleen achter wanneer de omranding
van het bed geopend is.
Zorg ervoor dat het kind het bed niet zelf kan bedienen.

2.2 Acut gevaar

Oefen de volgende handelingen om uw kind bij brand of andere acute gevaren snel uit het hoog-laag bed te kunnen halen, totdat u dit snel kunt uitvoeren.

Snel handelen bij brand of ander acut gevaar:

- a) Ontsluit het kinderslot aan de linker- en rechterzijde van één van de lange zijde, door het kinderslot los te draaien en naar binnen te bewegen;
- b) Klap de lange zijde neer;
- c) Til het kind uit het bed;

3. Ingebruikname

Controleer voor het gebruik het hoog-laag bed op zichtbare gebreken. Raadpleeg bij twijfel de leverancier. Laat u door de leverancier instrueren wanneer u nog niet bekend bent met het gebruik van dit hoog-laag bed.

Lees voor het gebruik deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en ga na of het gebruik en de bedoeling van alle onderdelen duidelijk is (probeer alles eerst uit, voordat het kind in het hoog-laag bed plaats neemt). Wees u bewust van de veiligheidsinstructies in hoofdstuk 2.

Er is een mogelijkheid voor persoonlijke instructie via uw leverancier. Neem bij problemen contact op met de behandelend therapeut of met de leverancier van het hoog-laag bed.

Wanneer gebruik gemaakt wordt van een lig-orthese, raadpleeg dan voor het dagelijks gebruik uw leverancier.

Let op dat u de magneetsleutel (voor het (de-)blokkeren van de handbediening) goed bewaard; de handbediening wordt namelijk automatisch geblokkeerd als de spanning er (tijdelijk) af is geweest.

3.1 In het hoog-laag bed helpen van het kind

Om op een veilige en verantwoorde manier het kind in het hoog-laag bed te helpen is het nodig om de hierna beschreven volgorde van handelen nauwgezet aan te houden. Voor aanwijzingen voor de bediening van het bed zie hoofdstuk 4 "De bediening".

- a) Zet het bed op de gewenste hoogte;
- b) Houd de lange zijde tegen en draai het kinderslot aan de linker- en rechterzijde van de lange zijden los, trek deze naar binnen en draai deze licht vast;
- c) Laat de lange zijde, met twee handen, rustig naar beneden zakken;
- d) Til het kind in het hoog-laag bed, eventueel met tillift;
- e) Duw met twee handen de lange zijde geheel omhoog. Draai de sloten los zodat de pinnen van het slot in het gaatje van het bed vallen. Draai de sluitkoppen stevig vast;
- f) Zet het bed op de laagste stand;
- g) Laat uw kind nooit alleen achter wanneer de omranding van het bed geopend is.

3.2 Uit het hoog-laag bed helpen van het kind

Om op een veilige en verantwoorde manier het kind uit het hoog-laag bed te helpen is het nodig om de hierna beschreven volgorde van handelen nauwgezet aan te houden. Voor aanwijzingen voor de bediening van het bed zie hoofdstuk 4 "De bediening".

- a) Zet het bed op de gewenste hoogte;
- b) Houd de lange zijde met één hand tegen en draai met de andere hand het kinderslot aan de linker- en rechterzijde van de lange zijden los, trek deze naar binnen en draai deze licht vast;
- c) Laat de lange zijde, met twee handen, rustig naar beneden zakken;
- d) Til het kind uit het hoog-laag bed, eventueel met tillift;
- e) Sluit eventueel de lange zijde.

Attentie:

Kies een gemakkelijke werkhouding bij het openen en sluiten van de zijhekkens en bij het in en uit het bed tillen van het kind.

Controleer na het sluiten van de zijhekkens of de sluitingen stevig vast zitten.

4. De bediening

Voor de verstellingen van het model Dormi, Thomas of Jasmijn is geen gereedschap nodig.

4.1 De remmen

- Door middel van de uitstekende lip op de bovenzijde van de zwenkwielen is het bed op en van de rem te zetten.
- Op de rem:
Zet minstens twee wielen op de rem door de uitstekende lip met de voorzijde van de schoen naar beneden te duwen (zie afbeelding 2A), totdat deze vast blijft zitten. Controleer of het bed stevig vast staat.
- Van de rem:
Duw met de voorzijde van de schoen het kleinere lipje naar voren (zie afbeelding 2B), zodat de grote lip weer naar boven komt.
- Let er op dat altijd minstens twee wielen op de rem staan, zeker tijdens het uitvoeren van een transfer.



Afbeelding 2A:
Op de rem zetten.



Afbeelding 2B:
Van de rem zetten.

Attentie:
Gebruik altijd minstens twee van de vier remmen.

4.2 De kindersloten


- De kindersloten zijn de knoppen aan de linker- en rechterzijde van de lange zijden (zie afbeelding 3).
- Openen:
Draai de knop eerst los en trek deze daarna naar binnen en draai deze licht vast.
- Sluiten:
Draai de knoppen los, zodat de pinnen in de gaten in het bed vallen. Draai de knoppen stevig vast.



Afbeelding 3:
Het kinderslot.

4.3 De hoogteverstelling

- Het bed is elektrisch in hoogte verstelbaar. Deze hoogteverstelling is traploos en gaat via kolommen aan hoofd- en voeteinde.
- De bediening van de hoogte wordt gedaan door middel van een handbediening (zie afbeelding 4). Wanneer u op de linkerknop drukt, zal het bed omhoog gaan totdat u de knop weer loslaat. Wanneer u op de rechterknop drukt zal het bed omlaag gaan totdat u de knop weer loslaat of wanneer de eindstand is bereikt.
- Zorg ervoor dat het bed op de juiste hoogte ingesteld staat tijdens de verzorging. Zet het bed altijd op de laagste stand als het kind in bed ligt zonder toezicht.

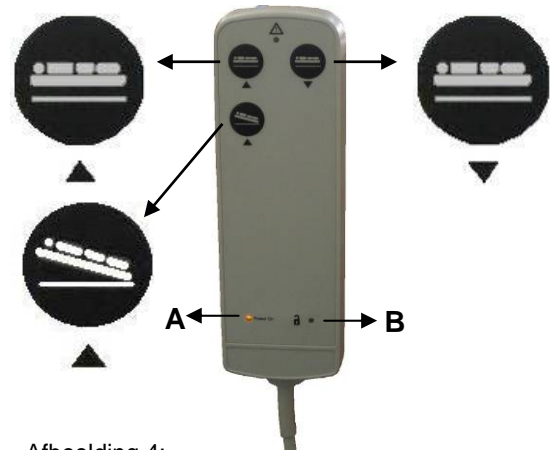

Afbeelding 4:
De handbediening voor de hoogteverstelling.
Links: Bed omhoog bewegen.
Rechts: Bed omlaag bewegen.
Onder: Anti-Trendelenburg verstelling.
A: Lampje "power".
B: Lampje "blokkering".

Attentie:

Laat het bed na de transfer of verzorging tot op de laagste stand zakken.

4.4 De anti-Trendelenburg verstelling

- Het bed is elektrisch in hoogte verstelbaar. Deze hoogteverstelling is traploos en gaat via kolommen aan hoofd- en voeteinde. De kolommen zijn onafhankelijk van elkaar in hoogte te verstellen, waardoor de anti-Trendelenburg verstelling mogelijk is.
- De bediening van de anti-Trendelenburg verstelling wordt gedaan door middel van een handbediening (zie afbeelding 4). Wanneer u op de onderste zwarte knop drukt, zal de hoog-laag kolom aan het hoofdeinde omhoog gaan totdat u de knop weer loslaat. Wanneer u op de rechterknop drukt zal het bed omlaag gaan totdat u de knop weer loslaat of wanneer de eindstand is bereikt.
- Zorg ervoor dat het bed op de juiste hoogte ingesteld staat tijdens de verzorging. Zet het bed altijd op de laagste stand als het kind in bed ligt zonder toezicht.

5. Onderhoud

De hoog-laag kinderbedden hebben weinig onderhoud nodig:

- Controleer elke keer wanneer het kind in het bed ligt, of de neerklapbare zijden goed dicht zitten en of de sluitingsknoppen stevig aangedraaid zijn;
- Let op de dagelijkse hygiëne. Het reinigen van het hoog-laag bed en de matrashoes kan met de gangbare, niet-chloorhoudende, niet-schurende schoonmaakmiddelen voor het huishouden;
- Als er als optie slagvast, doorzichtig lexaan is aangebracht, mag deze alleen met een vochtige doek afgenomen worden;
- Houd de hoog-laag kolommen vuilvrij;
- Één maal per jaar op de bewegende delen een beetje siliconenspray spuiten (let op: siliconenspray kan vlekken achterlaten op de ondergrond).

6. Verhelpen van problemen

- **Als het bed gedeeltelijk of helemaal niet werkt:**
 1. Zorg ervoor dat de stekker goed in de contactdoos zit.
Werkt dit niet, dan:
 2. Controleer of er spanning op de contactdoos staat. Dit is te controleren door bijvoorbeeld een schemerlamp op dit contactpunt aan te sluiten.
Is er wel netspanning, dan:
 3. Haal de stekker uit de contactdoos voor 30 minuten en plug daarna de stekker er weer in. Let op: de handbediening is nu geblokkeerd: strijk eerst met de magneetsleutel over het onderste gedeelte van de handbediening.
Werkt dit niet dan:
 4. Bel naar Atlas Revalidatie Techniek om een afspraak te maken voor een servicemonteur (telefoonnummer: 0486-45 33 44).
- **Als de handbediening niet werkt:**
 1. Door middel van het linker lampje (zie afbeelding 4;A) is te controleren of de handbediening spanning heeft; dan brandt het lampje. Brandt het lampje niet; controleer dan of de stekker goed in de contactdoos zit.
 2. Door middel van het rechter lampje (zie afbeelding 4;B) is te controleren of de handbediening geblokkeerd is. Als het lampje brandt dan is de handbediening geblokkeerd; strijk met de magneetsleutel over het onderste gedeelte van de handbediening om hem te deblokken. Let op: de handbediening wordt altijd geblokkeerd als de stekker uit het stopcontact is geweest.
- Bij eventuele mankementen die een gevaar zouden kunnen opleveren voor het kind moet onmiddellijk contact worden opgenomen met de leverancier voor reparatie.
- In alle gevallen waarin wordt getwijfeld aan de juistheid van de instellingen of de juiste vorm en toepassing van accessoires dient contact te worden opgenomen met de therapeut of de leverancier voor eventuele aanpassingen.
- Wanneer het kind ongewenst uit het bed klimt moet er in overleg met de behandelende therapeut, de revalidatiearts en de verzekering gekozen worden voor een bed met een nog hogere omranding.
- Als het kind de lange zijden zelfstandig kan neerklappen, kan er in overleg met de behandelende therapeut, de revalidatiearts en de verzekering gekozen worden voor andere kindersloten.

7. Garantie

Bij normaal gebruik wordt als volgt garantie verleend:

- Garantie op fabricagefouten, tot 12 maanden na de leverdatum van het bed;
- Het matras valt buiten de garantie.

De garantie zal vervallen bij:

- Beschadiging als gevolg van misbruik, verwaarlozing, ongeluk, onjuiste reparatie, blootstelling aan bijtende of schurende middelen, gebruik of stallen in vochtige omstandigheden, nalaten van het opvolgen van onderhoud- en veiligheidsinstructies of bij vervangingen of aanpassingen uitgevoerd door iemand anders dan een door Atlas Revalidatie Techniek gevolmachtigd persoon.

Bij correspondentie graag: naam en adres, type hoog-laag kinderbed, serienummer en de datum van ingebruikname vermelden.

8. Technische gegevens

8.1 Gegevens

Afmetingen matras:	90 x 200 cm	80 x 180 cm
Afmetingen buitenwerk:	96 x 215 cm	86 x 195 cm
Standaard hoogtevertelling:	50 – 90 cm (Dormi en Thomas)	40 – 90 cm (Jasmijn)
Maximaal toelaatbaar gewicht:	150 kg	

Materiaal: Blank gelakt beuken

Motor: 24V/DC, 80 Watt, 3000N
Trafo: 230V~, 50Hz, 0,80A

Het bed is zeer goed onderrijdbaar voor een tillift
Standaard voorzien van vier dubbelgeremde zwenkwielen

8.2 Bekleding

De hoes die bij het matras geleverd wordt, is gemaakt van urinebestendig materiaal en goed reinigbaar met gangbare schoonmaakmiddelen.

8.3 Opties

- Lattenbodem met handmatig verstelbaar hoofd- en voeteneind;
- Elektrisch, in vier delen te verstellen lattenbodem;
- Diverse soorten matrassen, waaronder anti-decubitus matrassen;
- Lange zijden voorzien van slagvast, doorzichtig lexaan;
- Zijden voorzien van bisonyl beschermingsmatten;
- Speel-/ therapieboog;
- Afwijkende maten;
- Afwijkende kleuraccenten.