

Ersatzteil - Katalog

Tilty Vario



Sehr geehrter Kunde,

auf den folgenden Seiten finden Sie eine komplette Liste aller Einzelteile aus denen dieser Rollstuhl gebaut wird. Um eine korrekte Ersatzteillieferung zu gewährleisten ist es notwendig, dass Sie uns bei der Bestellung zusätzlich zur Artikelnummer folgende Informationen vom Typenschild zukommen lassen.

Für eine Beschreibung zum Typenschild und wo es an Ihrem Rollstuhl zu finden ist, folgen Sie einfach diesem Link:

http://www.sorgrollstuhltechnik.de/fileadmin/user_upload/pdf/Download/Finding_identification_label.pdf

1. Seriennummer des Rollstuhls

Die Seriennummer ermöglicht uns, auf die Rollstuhlkonfiguration der ursprünglichen Rollstuhllieferung zuzugreifen.

2. Sitzbreite, Sitztiefe und Rückenhöhe

Die Maße auf dem Typenschild beziehen sich auf die Konfiguration der Ursprungslieferung. Sofern Maße nach der Lieferung verändert wurden, beispielsweise durch Stuhlverbreiterung, benötigen wir die aktuellen Maße.

3. Unterschenkellänge

Wir benötigen die Unterschenkellänge um die korrekte Version einiger Anbauteile auswählen zu können, die an das Maß der Unterschenkellänge gebunden sind.

4. Rahmenfarbe

Bitte spezifizieren Sie die Rahmenfarbe des Rollstuhls wenn Sie ein pulverbeschichtetes Ersatzteil bestellen. Bitte geben Sie auch an, ob die Beschichtung matt oder glänzend ist.

5. Andere Änderungen nach der Auslieferung (Anbauartikel etc.)

Wir können von Änderungen die nach der Lieferung durchgeführt wurden nichts wissen. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Änderungen Einfluss auf benötigte Ersatzteile haben, informieren Sie uns bitte detailliert.

Abkürzungen:

| | |
|----------|--|
| Pos. | Positionsnummer |
| Art.-Nr. | Artikelnummer |
| M/1 | erforderliche Menge pro Rollstuhl bzw. Baugruppe |
| SB | Sitzbreite |
| ST | Sitztiefe |
| RH | Rückenhöhe |
| alt. | alternativ |

Erläuterungen:

Es können nur Artikel bestellt werden, die in der Spalte **Art.Nr.** einen Nummerneintrag haben.

Bitte beachten Sie in der Spalte **Variante** die erforderlichen Bestellangaben, ohne die Ihre Bestellung nur mit Verzögerung bearbeitet werden kann.

Die Angaben **Links/Rechts** sind immer auf die Fahrtrichtung bezogen.

Bei Unklarheiten oder Fragen rufen Sie uns einfach an, wir beraten Sie gerne.

SORG Rollstuhltechnik GmbH Co.KG

Benzstraße 3-5

68794 Oberhausen-Rheinhausen

Fon 07254 - 9279 0

Fax 07254 - 9279 10

info@sorgrollstuhltechnik.de

<http://www.sorgrollstuhltechnik.de>

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag 8.00 - 16.30 Uhr

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Preise auf Nachfrage


Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| <u>Rahmen</u> | |
| Rahmen | 1 |
| Sicherheitsrad | 3 |
| Ankipphilfe | 4 |
| Stockhalter | 5 |
| <hr/> | |
| <u>Beinstütze</u> | |
| Beinstütze Modell 1, durchgehend, ein zentraler Gegenhalter (SB28-34) 4015 | 7 |
| Beinstütze Modell 2, durchgehend, zwei Kniewinkel 4008.. | 9 |
| Beinstütze Modell 3, durchgehend, hochschwenkbar, zwei Gegenhalter 4013.. | 11 |
| Beinstütze Modell 4, geteilt, hochschwenkbar 4014.. | 13 |
| Wadenauflage für Beinstütze hochschwenkbar | 14 |
| Beinstütze dynamisch 4053 | 15 |
| Fersenhalter | 16 |
| <hr/> | |
| <u>Sitz</u> | |
| Sitz komplett | 17 |
| Gelenktraverse- / Lasche | 18 |
| Gasdruckfeder inkl. Halter | 20 |
| Sitzkissen | 21 |
| Therapietisch Variante 1 (seitlich wegklappbar) | 22 |
| Therapietisch Variante 2 (an Armpolster gesteckt) | 23 |
| Therapietisch Variante 6 (mittig unter Sitzfix montiert) | 24 |
| Abduktionskeil | 25 |
| <hr/> | |
| <u>Rücken</u> | |
| Rücken winkelverstellbar | 26 |
| Rücken mit Gasdruckfederverstellung | 28 |
| Muldenrücken | 29 |
| Rückenverlängerung | 31 |
| Kissen für Muldenrücken | 32 |
| Rückenbespannung Standard | 33 |
| Rückenbespannung anpassbar | 34 |
| Stabilisierungsstange | 35 |
| Schiebegriffe ausziehbar | 36 |
| Schiebestange für ausziehbare Schiebegriffe | 37 |
| Schiebebügel ausziehbar | 39 |
| Seitenpelotten ab RH35 | 40 |
| Kopfstütze | 42 |
| <hr/> | |
| <u>Seitenteil</u> | |
| Aktivseitenteil (nur für 7° Radsturz) | 43 |
| Seitenteil Standard | 44 |
| Seitenteil XXL (nur für 3° Radsturz) | 45 |
| Armlehne 24cm lang, winkelverstellbar | 46 |
| Radschutz Kunststoff (nur für 3° Radsturz) | 47 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| <u>Lenkrad</u> | |
| Lenkradadapter Aluminium | 48 |
| Lenkradgabel | 50 |
| Lenkradgabel mit Steckachse | 51 |
| Lenkräder | 52 |
| Steckachsenfitting | 54 |
| <hr/> | |
| <u>Antriebsrad</u> | |
| Lochplatte für Antriebsrad | 53 |
| Antriebsräder | 55 |
| Doppelgreifreifen Standard | 56 |
| Doppelgreifreifen Trommelbremse | 57 |
| Teleskopstange | 59 |
| Bereifungen | 60 |
| Greifringe | 61 |
| Greifringüberzüge | 62 |
| Speichenschutz | 63 |
| <hr/> | |
| <u>Bremse</u> | |
| Kniehebelbremse Standard | 64 |
| Kniehebelbremse verriegelbar | 65 |
| Kniehebelbremse, zusätzlich vom Begleiter feststellbar | 66 |
| Einhandbremse Bedienseite (rechts) | 68 |
| Einhandbremse Nicht-Bedienseite (links) | 70 |
| Seilzugbremse Andrückteil | 72 |
| Seilzugbremse Bedienteile | 74 |
| Bremsgriff für Trommelbremse | 75 |
| Bremshebelverlängerung | 76 |
| <hr/> | |
| <u>Zubehör</u> | |
| Beckengurt mit Klettverschluss und Kunststoffschloss | 77 |
| Beckengurt mit Metallschloss | 78 |
| Schmetterlingsweste | 79 |
| <hr/> | |


Rahmen

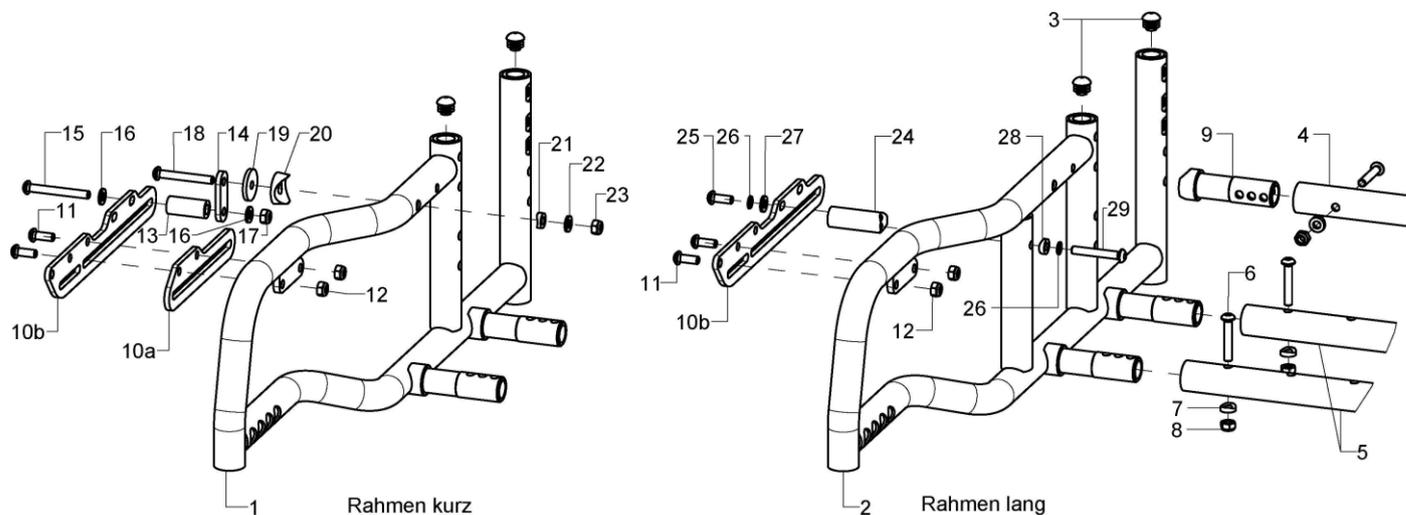

| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|--------|--------|------------|--|---------------------------|
| 1+3 | 1 | 59711002 | Rahmenteil kurz 535 mm, rechts, Tilty Vario für ST30-34 inkl. Lamellenstopfen | Farbe |
| o.B. | 1 | 59711001 | Rahmenteil kurz 535 mm, links, Tilty Vario für ST30-34, inkl. Lamellenstopfen | Farbe |
| 2-3 | 1 | 59711004 | Rahmenteil lang 590 mm, rechts, Tilty Vario für ST36-44, inkl. Lamellenstopfen | Farbe |
| o.B. | 1 | 59711003 | Rahmenteil lang 590 mm, links, Tilty Vario für ST36-44, inkl. Lamellenstopfen | Farbe |
| 3 | 4 | 59711010 | Lamellenstopfen für Rohr $\varnothing 14 \times 1-2$, schwarz, Set 4 Stück | |
| 4 | 1 | 583401SB | Traverse d=24 x 2 x SB | SB, Farbe |
| 5 | 2 | 587101SB | Rahmentraverse verstärkt für Aufnahme Gasdruckfeder | SB, Farbe |
| 6-8 | 1 | 59711099 | Montageset/Verschraubung - Traverse an Rahmen Tilty Vario | |
| 6 | 6 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x35 | |
| 7 | 6 | | Sattelscheibe $\varnothing 12/6 \times 2,5$ | |
| 8 | 6 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 9 | 2 | 583501 | Traversenadapter | |
| 10a-12 | 1 | 59752502 | Bremsschiene lang, inkl. Montagematerial | |
| 10b-12 | 1 | 59710209 | Bremsschiene RSVL, inkl. Montageschrauben | Bei Radstandsverlängerung |
| 11 | 2 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x16 | |
| 12 | 2 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 13-23 | 1 | 59710210 | Montagezubehör bei Rahmen kurz mit Radstandsverlängerung | Rahmen kurz |
| 24-29 | 1 | 59710211 | Montagezubehör bei Rahmen lang mit Radstandsverlängerung | Rahmen lang |
| 13 | 1 | | Distanzhülse f. Bremsschiene | |
| 14 | 1 | | Lasche Brems. Std. Seitenteil | |
| 15 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x50 | |
| 16 | 2 | | Scheibe DIN 125 - A 6,4 | |
| 17 | 1 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 18 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x45 | |
| 19 | 1 | | Stützscheibe D25/d=6,2x3 | |
| 20 | 1 | | Sattelscheibe schwarz Nenn- $\varnothing 24/6$ | |
| 21 | 1 | | Sattelscheibe $\varnothing 12/6 \times 2,5$ | |
| 22 | 1 | | Scheibe DIN 125 - A 6,4 | |


| | | |
|----|---|--|
| 23 | 1 | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 |
| 24 | 1 | Distanzbuchse M6 versetzt |
| 25 | 1 | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x16 |
| 26 | 2 | Sicherungsscheibe S6 - FST |
| 27 | 1 | Scheibe DIN 125 - A 6,4 |
| 28 | 1 | Sattelscheibe $\varnothing 12/6 \times 2,5$ |
| 29 | 1 | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x40 |

Sicherheitsrad

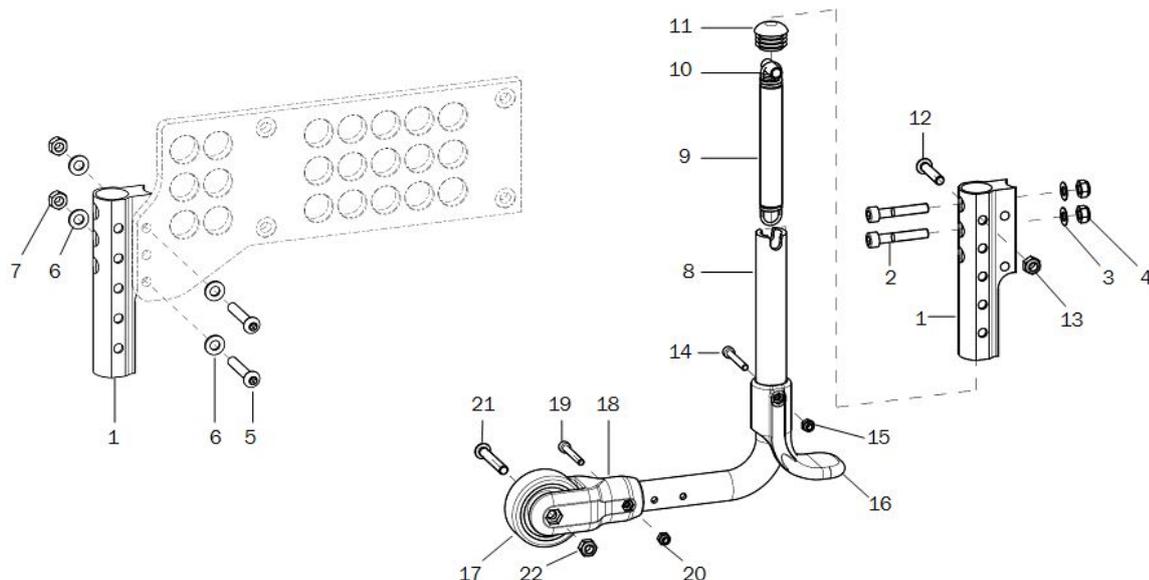


| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|----------|--------|------------|--|---|
| 1-4+8-22 | 1 | 721501/02 | Sicherheitsrad, kpl. | XX = 01 bei 22", XX = 02 bei 24", Größe Antriebsrad, rechts, links |
| 1+5-22 | 1 | 721505/06 | Sicherheitsrad bei Radstandverlängerung, kpl. | XX = 05 bei 22", XX = 06 bei 24", Größe Antriebsrad, rechts, links |
| 1 | 1 | 72150106 | Kippschutzhalter | |
| 2-4 | 1 | 7215010699 | Montagezubehör Kippschutzhalter | |
| 2 | 2 | | Zylinderschraube DIN 912 M6x35 | |
| 3 | 2 | | Passscheibe DIN 988 - 6x12x0,5 - A2 | |
| 4 | 2 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 5-7 | 1 | 7215020699 | Montagezubehör Kippschutzhalter Radstandverlängerung | |
| 5 | 2 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x35 | |
| 6 | 4 | | Scheibe DIN 125 - A 6,4 | |
| 7 | 2 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 8-22 | 1 | 721500XX | Kippschutzbügel vormontiert | XX= 01 bei 20/22", XX = 02 bei 24", Größe Antriebsrad, rechts, links |
| 8 | 1 | | Kippschutzbügel | Größe Antriebsrad |
| 9 | 1 | | Zugfeder, Öse 180°, 1/1 mittig, 13,5x2x113 | |
| 10 | 1 | | Distanzhülse 18,4mm | |
| 11 | 1 | | Stopfen mit Lamellen für Rohr ø22x1-2, schwarz | |
| 12 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x30 | |
| 13 | 1 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 14 | 1 | | Zylinderschraube DIN 912 M4x30 | |
| 15 | 1 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M4 | |
| 16 | 1 | 72150104 | Auftritt Kippschutz, schwarz | |
| 17 | 1 | 720004 | Rad ø50, Breite 18, Nabenbreite 20, Achs-ø 6, PU- grau | |
| 18-22 | 1 | 72150101 | Halter Sicherheitsrad für Rad ø50 mm, inkl. Montagezubehör | |
| 19 | 1 | | Zylinderschraube DIN 912 M4x30 | |
| 20 | 1 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M4 | |
| 21 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x40 | |
| 22 | 1 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |

Ankipphilfe

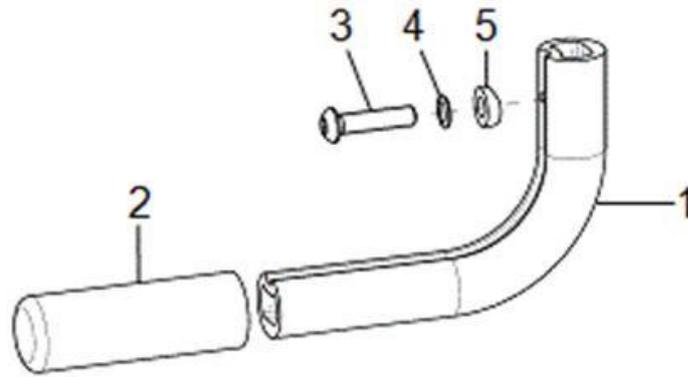


| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|--|-----------|
| 1-5 | 1 | 7401 | Ankipphilfe kpl. | |
| 1 | 1 | | Ankipphilfe | |
| 2 | 1 | 740102 | Tauchkappe | (5er Set) |
| 3-5 | 1 | 74000099 | Montagezubehör Ankipphilfe | |
| 3 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x25 | |
| 4 | 1 | | Sicherungsscheibe S6 - FST | |
| 5 | 1 | | Sattelscheibe $\varnothing 12/6 \times 2,5$ | |

Stockhalter

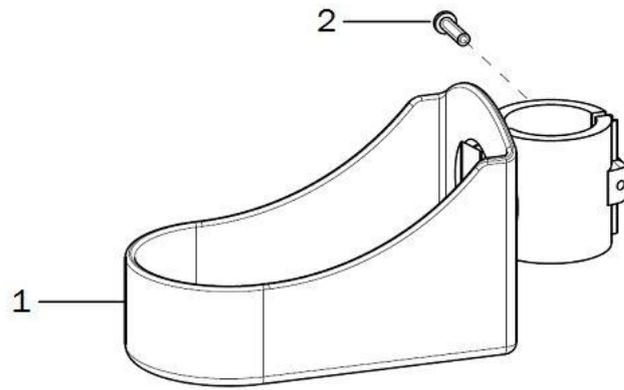


| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|---|-----------|
| 1-2 | 1 | 7101 | Stockhalter mit Klemmschelle inkl. Montagezubehör | |
| 2 | 1 | | Flachkopfschraube Kreuzschlitz WN 1412 - 3,5x14 | |

Beinstütze Modell 1, durchgehend, ein zentraler Gegenhalter (SB28-34) 4015

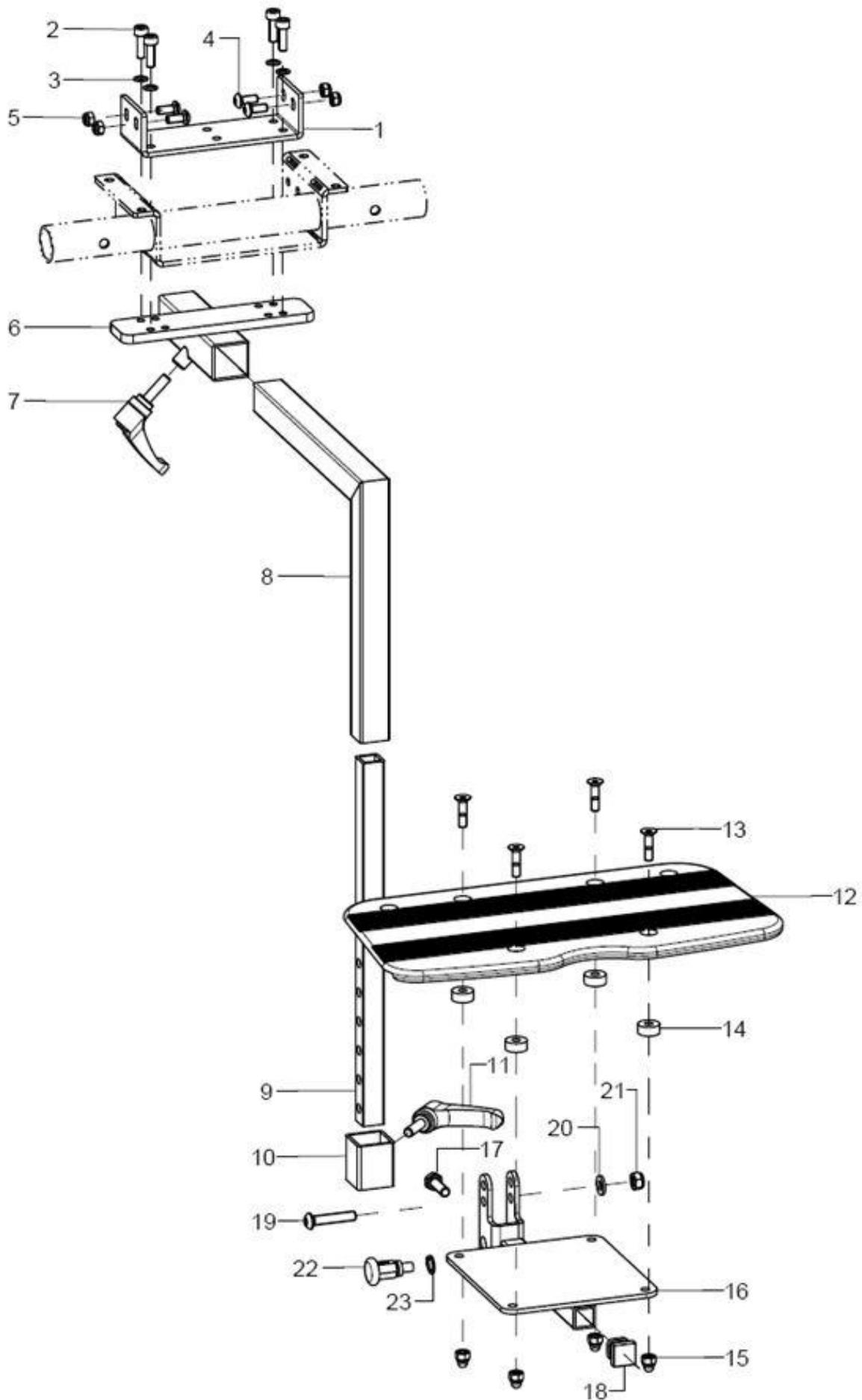


| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|--------------|---------------|-------------------|---|-------------------------------------|
| 1-21 | 1 | 4015 | Beinstütze durchgehend nach hinten hochklappbar, mit zentralen Kniewinkel, kpl. (SB28–SB34) | SB, Farbe |
| 1-5 | 1 | 19060206 | Versteifung Halter Sitztraverse, schwarz, inkl. Montagezubehör | |
| 2 | 4 | | Zylinderkopfschraube DIN 912 M5x16 | |
| 3 | 4 | | Sicherungsscheibe S5 - FST | |
| 4 | 4 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M5x12 | |
| 5 | 4 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M5 | |
| 6-7 | 1 | 401101 | Aufnahmeflansch für zentrale Aufnahme 20x20, schwarz, inkl. Klemmhebel | |
| 7 | 1 | 401102 | Klemmhebel verstellbar M6x20, schwarz | |
| 8 | 1 | 401103 | Rohrwinkel schwarz, zentrale Beinstütze | |
| 9 | 1 | 401304 | Einschubrohr schwarz, Beinstütze 15x15x250 | Kurz, bis USL 45 |
| altern. | 1 | 401307 | Einschubrohr schwarz, Beinstütze 15x15x400 | Lang, ab USL 46 |
| 10-11 | 1 | 401104 | Rohrklemmstück 25x25x105x30 für Längenausgleich inkl. Klemmhebel | Entfällt bei Anbau der Wadenauflage |
| 11 | 1 | 401102 | Klemmhebel verstellbar M6x20, schwarz | |
| 12 | 1 | 40551100 | Fußauflage 150mm durchgehend inkl. Montagezubehör | SB, Farbe |
| 13 - 15 | 1 | 401599 | Montagezubehör Fußplatte an Fußplattenträger | |
| 13 | 4 | | Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 M5x20 | |
| 14 | 4 | | Buchse Ø14/5,2x6 | |
| 15 | 4 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M5 | |
| 16-21 | 1 | 401502 | Fußplattenträger inkl. Montagezubehör | |
| 17 | 1 | | Sechskantschraube DIN 933 - M6x20 | |
| 18 | 1 | 401107 | Lamellenstopfen für Vierkant 15x15, schwarz, Set 4 Stück | |
| 19 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x30 | |
| 20 | 1 | | Scheibe DIN 125 - A 6,4 | |
| 21 | 1 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 22-23 | 1 | 690101 | Zugschnapper ø6/M10x1x31 mit Arretierung | |
| 23 | 1 | | Sicherungsring 10, DIN 471 | |

Beinstütze Modell 2, durchgehend, zwei Kniewinkel 4008..

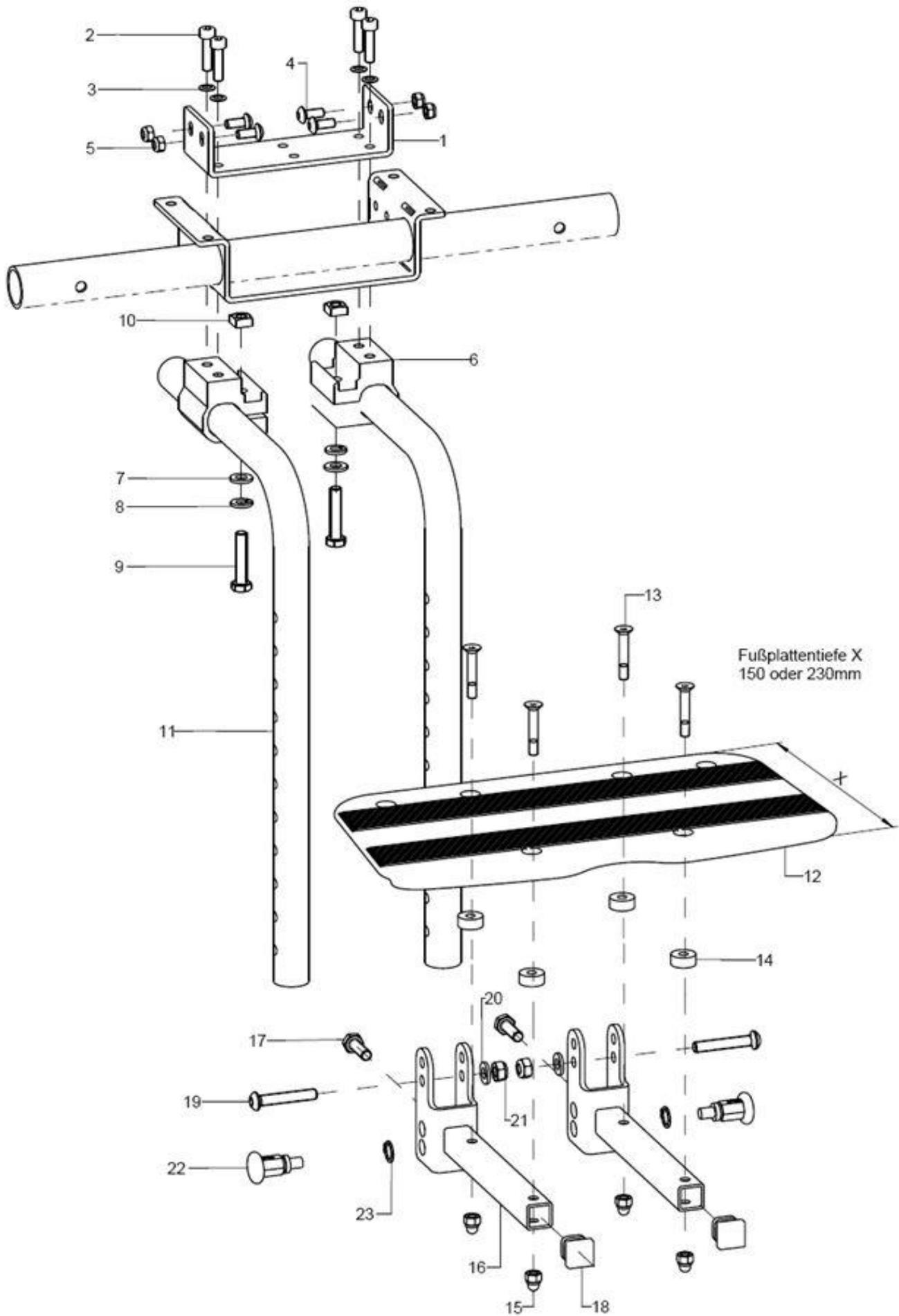


| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|--------------|---------------|-------------------|--|------------------|
| 1-21 | 1 | 4008 | Beinstütze durchgehend, zwei Kniewinkel starr 90°– kpl. | SB, Maß X, Farbe |
| 1-5 | 1 | 19060206 | Versteifung Halter Sitztraverse, schwarz, inkl. Montagezubehör | |
| 2 | 4 | | Zylinderkopfschraube DIN 912 M5x16 | |
| 3 | 4 | | Sicherungsscheibe S5 - FST | |
| 4 | 4 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M5x12 | |
| 5 | 4 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M5 | |
| 6-10 | 2 | 400101 | Beinstützenaufnahme für Kniewinkel, inkl. Montagezubehör | |
| 7 | 2 | | Scheibe DIN 125 - A 6,4 | |
| 8 | 2 | | Federring DIN 127 - A 6 | |
| 9 | 2 | | Sechskantschraube DIN 933 - M6X30 | |
| 10 | 2 | | Vierkantmutter DIN 557 – M6 | |
| 11 | 2 | 400102 | Kniewinkel-Beinstützenhalter 90°, 310 mm | bis USL 35 |
| altern. | 2 | 400111 | Kniewinkel-Beinstützenhalter 90°, 410 mm | ab USL 36 |
| 12-15 | 1 | 40551100 | Fußauflage 150mm durchgehend inkl. Montagezubehör | SB, Farbe |
| o.B. | 1 | 40551200 | Fußauflage 230mm durchgehend inkl. Montagezubehör | SB, Farbe |
| 13-15 | 1 | 40551199 | Montagezubehör Fußauflage | |
| 13 | 4 | | Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 M5x30 | |
| 14 | 4 | | Buchse Ø14/5,2x6 | |
| 15 | 4 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M5 | |
| 16-21 | 2 | 400103 | Fußplatten-Gelenkhalter 100/20 für durchgehende Fußplatte inkl. Montagezubehör | |
| 17 | 2 | | Sechskantschraube DIN 933 - M6x20 | |
| 18 | 4 | | Stopfen mit Lamellen für Vierkantrohre, schwarz, 15x15 | |
| 19 | 2 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x35 | |
| 20 | 2 | | Scheibe DIN 125 - A 6,4 | |
| 21 | 2 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 22-23 | 2 | 690101 | Zugschnapper Ø6/M10x1x31 mit Arretierung | |
| 23 | 2 | | Sicherungsring 10, DIN 471 | |

Beinstütze Modell 3, durchgehend, hochschwenkbar, zwei Gegenhalter 4013..

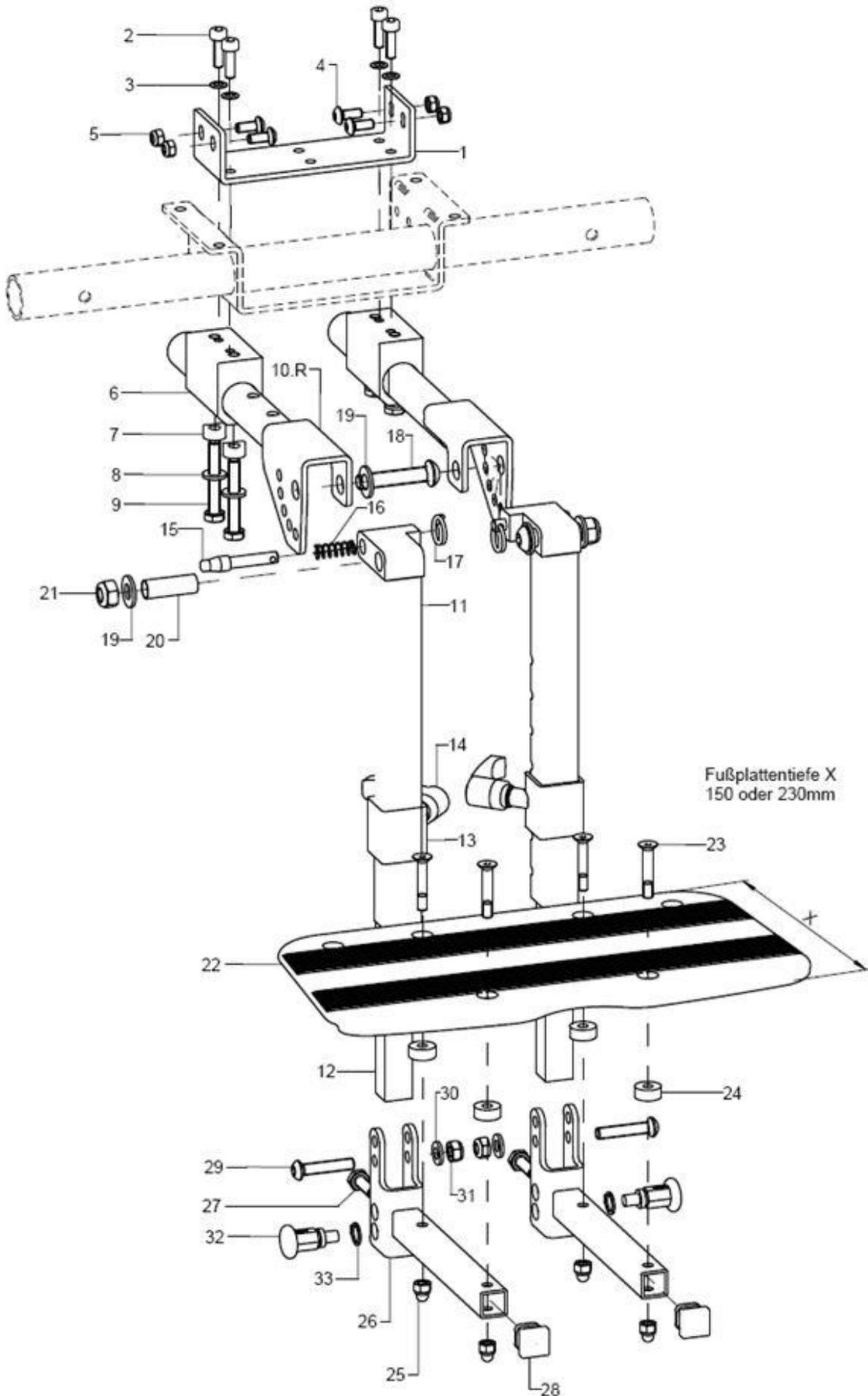


| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|--------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|
| 1-31 | 1 | 4013 | Beinstütze durchgehend, hochschwenkbar im Raster, zwei Gelenkhalter, kpl. | SB, Maß X, Farbe |
| 1-5 | 1 | 19060206 | Versteifung Halter Sitztraverse, schwarz, inkl. Montagezubehör | |
| 2 | 4 | | Zylinderkopfschraube DIN 912 M5x16 | |
| 3 | 4 | | Sicherungsscheibe S5 - FST | |
| 4 | 4 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M5x12 | |
| 5 | 4 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M5 | |
| 6-9 | 2 | 401301 | Beinstützenaufnahme für Kniewinkel im Raster verstellbar, inkl. Montagezubehör | |
| 7 | 4 | | Sattelscheibe Ø12x3x7 | |
| 8 | 4 | | Scheibe DIN 125 - A 6,4 | |
| 9 | 4 | | Sechskantschraube DIN 933 - M6X35 | |
| 10 | 1 | 400203 | Rasteraufnahme für im Raster verstellbare Beinstütze | Links/rechts |
| 11+15-21 | 1 | 403112 | Verstellarm, Rastbolzen und Drahtform für im Raster verstellbare Beinstütze inkl. Montagezubehör | Links/rechts |
| 12 | 1 | 401304 | Einschubrohr schwarz, Beinstütze 15x15x250 | Kurz, bis USL 45 |
| altern. | 1 | 401307 | Einschubrohr schwarz, Beinstütze 15x15x400 | Lang, ab USL 46 |
| 13-14 | 2 | 401104 | Rohrklemmstück 25x25x105x30 für Längenausgleich inkl. Klemmhebel | Entfällt bei Anbau der Wadenauflage |
| 14 | 2 | | Klemmhebel verstellbar M6x20, schwarz | |
| 15-17 | 2 | 610109 | Rastbolzen inkl. Montagezubehör (Feder + Ring) | |
| 16 | 2 | | Druckfeder DIN 2098 0,7x7,65/9,05x21 | |
| 17 | 2 | | Drahtformring, 2x16, 2 Wdg. | |
| 18 | 2 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO7380 - M8X40 | |
| 19 | 4 | | Scheibe DIN 125 - A 8,4 | |
| 20 | 2 | | Buchse Ø10/8x28 | |
| 21 | 2 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M8 | |
| 22-25 | 1 | 40551100 | Fußauflage 150mm durchgehend inkl. Montagezubehör | SB, Farbe |
| o.B. | 1 | 40551200 | Fußauflage 230mm durchgehend inkl. Montagezubehör | SB, Farbe |
| 23-25 | 1 | 40551199 | Montagezubehör Fußauflage | |
| 23 | 4 | | Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 M5x30 | |
| 24 | 4 | | Buchse Ø14/5,2x6 | |
| 25 | 4 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M5 | |
| 26-29 | 2 | 401305 | Fußplatten-Gelenkhalter 100/15 für durchgehende Fußplatte inkl. Montagezubehör | |
| 27 | 2 | | Sechskantschraube DIN 933 - M6x20 | |
| 28 | 4 | | Stopfen mit Lamellen für Vierkantrohre, schwarz, 15x15 | |
| 29 | 2 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x30 | |
| 30 | 2 | | Scheibe DIN 125 - A 6,4 | |
| 31 | 2 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 32-33 | 2 | 690101 | Zugschnapper ø6/M10x1x31 mit Arretierung | |
| 33 | 2 | | Sicherungsring 10, DIN 471 | |

Beinstütze Modell 4, geteilt, hochschwenkbar 4014..

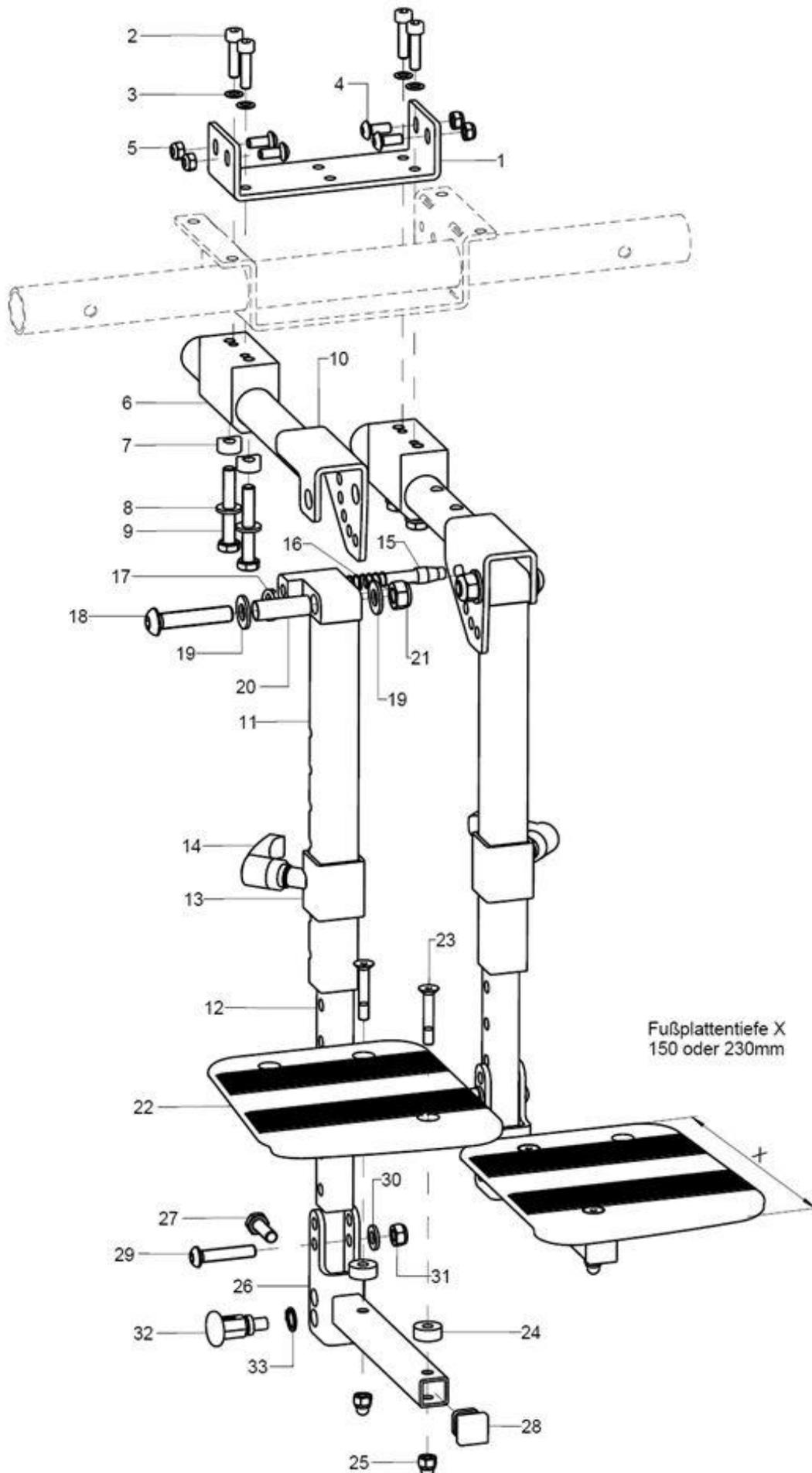


| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|--------------|---------------|-------------------|--|-------------------------------------|
| 1-31 | 1 | 4014 | Beinstütze geteilt, hochschwenkbar im Raster, kpl. | SB, Maß X, Farbe |
| 1-5 | 1 | 19060206 | Versteifung Halter Sitztraverse, schwarz, inkl. Montagezubehör | |
| 2 | 4 | | Zylinderkopfschraube DIN 912 M5x16 | |
| 3 | 4 | | Sicherungsscheibe S5 - FST | |
| 4 | 4 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M5x12 | |
| 5 | 4 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M5 | |
| 6-9 | 1 | 401301 | Beinstützenaufnahme für Kniewinkel im Raster verstellbar, inkl. Montagezubehör | |
| 7 | 2 | | Sattelscheibe Ø12x3x7 | |
| 8 | 2 | | Scheibe DIN 125 - A 6,4 | |
| 9 | 2 | | Sechskantschraube DIN 933 - M6X35 | |
| 10 | 1 | 400203 | Rasteraufnahme für im Raster verstellbare Beinstütze | Links/rechts |
| 11+15-21 | 1 | 403112 | Verstellarm, Rastbolzen und Drahtform für im Raster verstellbare Beinstütze inkl. Montagezubehör | Links/rechts |
| 12 | 1 | 401304 | Einschubrohr schwarz, Beinstütze 15x15x250 | Kurz, bis USL 45 |
| altern. | 1 | 401307 | Einschubrohr schwarz, Beinstütze 15x15x400 | Lang, ab USL 46 |
| 13-14 | 1 | 401104 | Rohrklemmstück 25x25x105x30 für Längenausgleich inkl. Klemmhebel | Entfällt bei Anbau der Wadenauflage |
| 14 | 1 | | Klemmhebel verstellbar M6x20, schwarz | |
| 15-17 | 1 | 610109 | Rastbolzen inkl. Montagezubehör (Feder + Ring) | |
| 16 | 1 | | Druckfeder DIN 2098 0,7x7,65/9,05x21 | |
| 17 | 1 | | Drahtformring, 2x16, 2 Wdg. | |
| 18 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO7380 - M8X40 | |
| 19 | 2 | | Scheibe DIN 125 - A 8,4 | |
| 20 | 1 | | Buchse Ø10/8x28 | |
| 21 | 1 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M8 | |
| 22-25 | 1 | 40551300 | Fussauflage 150mm geteilt, inkl. Montagezubehör | SB, Farbe; links/rechts |
| o.B. | 1 | 40551400 | Fussauflage 230mm geteilt, inkl. Montagezubehör | SB, Farbe; links/rechts |
| 23-25 | 1 | 40551199 | Montagezubehör Fußauflage | |
| 23 | 2 | | Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 M5x30 | |
| 24 | 2 | | Buchse Ø14/5,2x6 | |
| 25 | 2 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 26-30 | 1 | 401305 | Fußplatten-Gelenkhalter 100/15 für durchgehende Fußplatte inkl. Montagezubehör | |
| 27 | 1 | | Sechskantschraube DIN 933 - M6x20 | |
| 28 | 2 | | Stopfen mit Lamellen für Vierkantrohre, schwarz, 15x15 | |
| 29 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x30 | |
| 30 | 1 | | Scheibe DIN 125 - A 6,4 | |
| 31 | 1 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 32-33 | 1 | 690101 | Zugschnapper ø6/M10x1x31 mit Arretierung | |
| 33 | 1 | | Sicherungsring 10, DIN 471 | |

Wadenauflage für Beinstütze hochschwenkbar

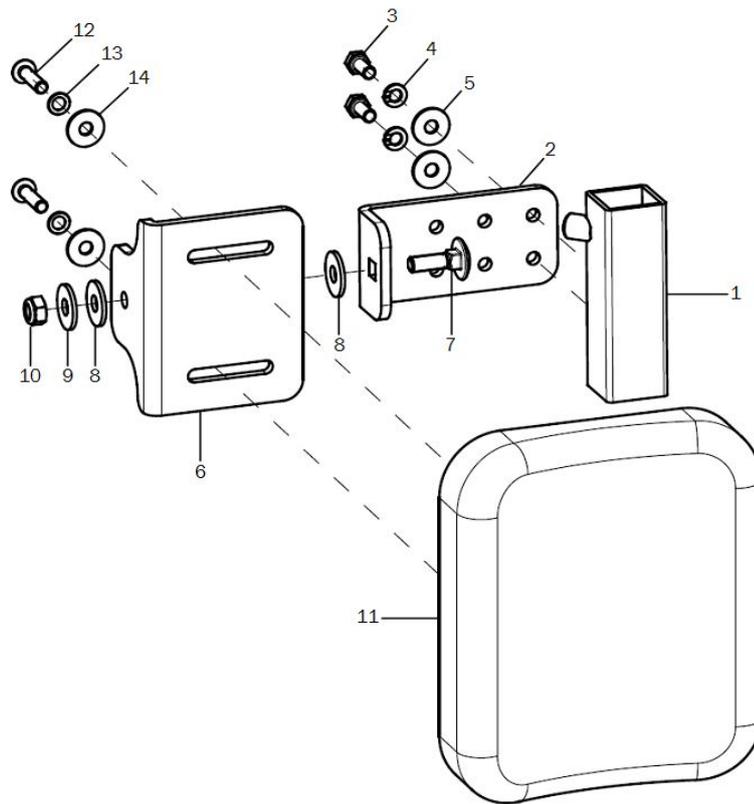


| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|---------|--------|------------|---|-----------------------------|
| 1-14 | 1 | 403106 | Wadenauflage gepolstert incl. Halterung | Größe Polster, links/rechts |
| 1 | 1 | 40300601 | Aufnahme schwarz für Wadenplattenhalter bei im Raster verstellbare Beinstütze | Links/rechts |
| 2-5 | 2 | 40300603 | Verstellwinkel inkl. Montagezubehör | |
| 3 | 2 | | Sechskantschraube DIN 933 - M5x12 | |
| 4 | 2 | | Federring DIN 127 - A 5 | |
| 5 | 2 | | Scheibe DIN 9021 - 5,3 | |
| 6-10 | 2 | 40300604 | Haltewinkel inkl. Montagezubehör | |
| 7 | 1 | | Flachrundschrauben DIN 603 M6x20 | |
| 8 | 2 | | Scheibe DIN 9021 - 6,4 - PA | |
| 9 | 1 | | Scheibe DIN 9021 - 6,4 | |
| 10 | 1 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 11-14 | 2 | 40300610 | Wadenauflage 150x120x30 PU schw. Inkl. Montagezubehör | |
| altern. | 2 | 40300611 | Wadenauflage 230x170x30 PU schw. inkl. Montagezubehör | |
| 12 | 2 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M5x20 | |
| 13 | 2 | | Sicherungsscheibe S5 - FST | |
| 14 | 2 | | Scheibe DIN 9021 - 5,3 | |

Beinstütze dynamisch 4053

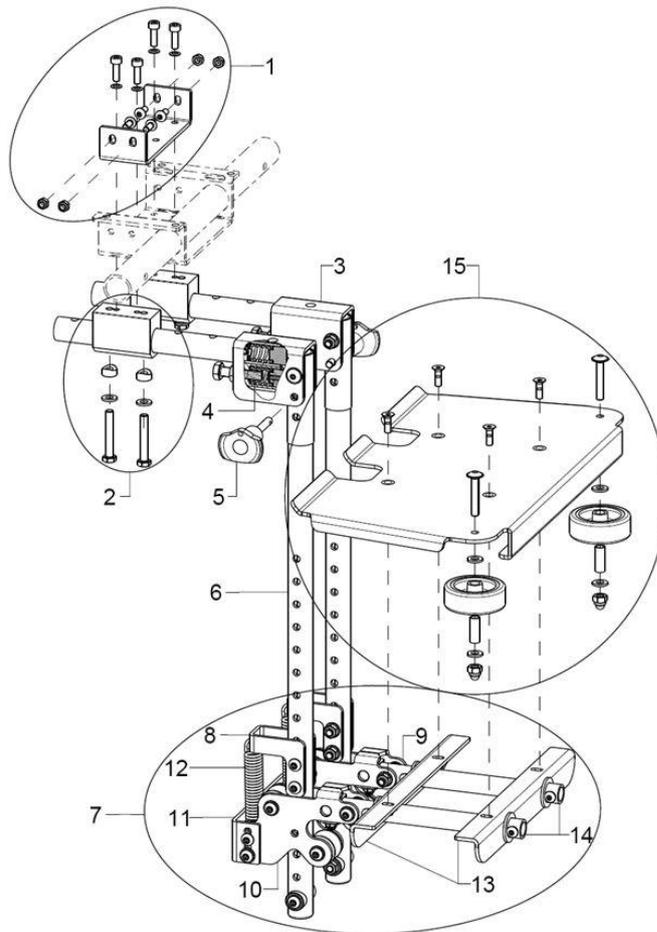


| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|--|-----------|
| 1-15 | 1 | 4053 | Beinstütze dynamisch Genex - federnd am flexiblen Kniewinkel | SB, Farbe |
| 1 | 1 | 19060206 | Versteifung Halter Sitztraverse, schwarz, inkl. Montagezubehör | |
| 2 | 1 | 401301 | Beinstützenaufnahme für Kniewinkel im Raster verstellbar, inkl. Montagezubehör | |
| 3-4 | 2 | 405303 | Beinstützenrohr schwarz, mit Federaufnahme und Federn im Kniewinkel bei Genex Beinstütze | |
| 4 | 4 | 405312 | Druckfeder 2,5x12,5x22 im Kniewinkel für dynam. Beinstütze | |
| 5 | 2 | 405310 | Kugelsperbolzen 6x30 mit rotem Druckknopf | |
| 6 | 2 | 405302 | Beinstützenhalterrohr 500 mm, mit Edelstahlhülse für Genex Beinstütze | |
| 7 | 1 | 405201 | Halterung für Fußplatte kpl. bei dynam. Beinstütze | |
| 8 | 2 | 405205 | Federhalterung oben bei dynam. Beinstütze | |
| 9 | 1 | 40520601 | Rollenaufnahme links, Edelstahl für dynam. Beinstütze | |
| 10 | 1 | 40520602 | Rollenaufnahme rechts, Edelstahl für dynam. Beinstütze | |
| 11 | 1 | 40520801 | Haltebrücke schwarz für dynam. Beinstütze inkl. Montagezubehör | |
| 12 | 2 | 405212 | Zugfeder 2,2x15x74,2 für dynam. Beinstütze | |
| 13 | 2 | 40520902 | Haltewinkel für Fußplatte bei dynam. Beinstütze | |
| 14 | 2 | 405207 | Fußplattenhalterrohr, schwarz bei dynam. Beinstütze inkl. Federnblock | |
| 15 | 1 | 405204 | Fußplatte inkl. Montagezubehör und Abweisrollen für dynam. Beinstütze | SB, Farbe |

Fersenhalter

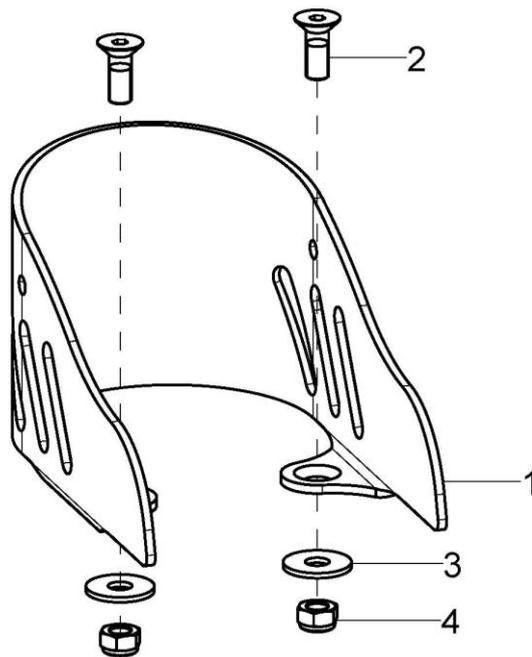


| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|--|-----------|
| 1-4 | 2 | 402001 | Fersenhalter Gr.1, 7 x 11,5 cm inkl. Montagezubehör | |
| o.B. | 2 | 402002 | Fersenhalter Gr.2, 9 x 12,5 cm inkl. Montagezubehör | |
| o.B. | 2 | 402003 | Fersenhalter Gr.3, 10 x 15,5 cm inkl. Montagezubehör | |
| 2 | 2 | | Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 M5x14 | |
| 3 | 2 | | Scheibe DIN 9021 - 5,3 | |
| 4 | 2 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M5 | |

Sitz komplett

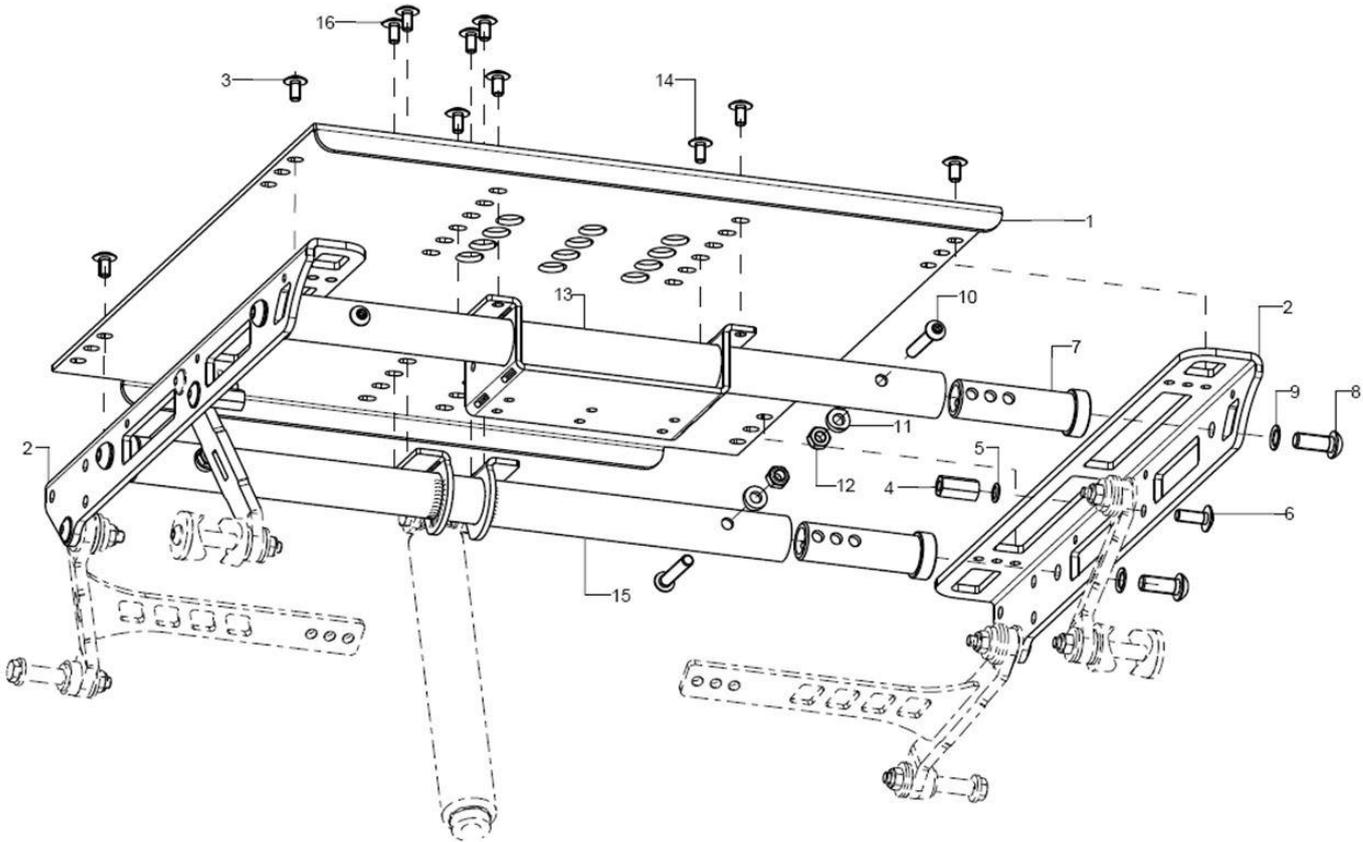


| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|---|--------------------------|
| 1 | 1 | 19060300 | Sitzfix | SB, ST, Farbe |
| 2-6 | 1P | 190604ST | Sitztragewinkel inkl. Montagezubehör | ST, Farbe, rechts, links |
| 3 | 4 | | Linsenflanschschraube mit Innensechskant M5x10 | |
| 4 | 2 | | Distanzmuffe 6-kant N0370 6x20 - vz | |
| 5 | 2 | | Sicherungsscheibe S6 - FST | |
| 6 | 2 | | Linsenflanschschraube mit Innensechskant M6x16 | |
| 7-12 | 4(6) | 19060201 | Traversenadapter oben inkl. Montagezubehör | 6 St. ab ST40 |
| 8 | 4 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M8x20 | |
| 9 | 4 | | Sicherungsscheibe S8 - FST | |
| 10 | 4 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x35 | |
| 11 | 4 | | Sattelscheibe $\phi 12/6 \times 2,5$ | |
| 12 | 4 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 13-14 | 1 | 19060202 | Sitztraverse vorne mit Aufnahme für Beinstütze inkl. Montagezubehör | SB, Farbe |
| 14 | 4 | | Linsenflanschschraube mit Innensechskant M5x10 | |
| 15-16 | 1 | 19060403 | Sitztraverse hinten mit Halter für GDF inkl. Montagezubehör | SB, Farbe |
| o.B. | 1 | 5834SB | Traverse d=24 x 2 x SB | ab ST40, SB, Farbe |
| 16 | 4 | | Linsenflanschschraube mit Innensechskant M5x10 | |

Gelenktraverse- / Lasche

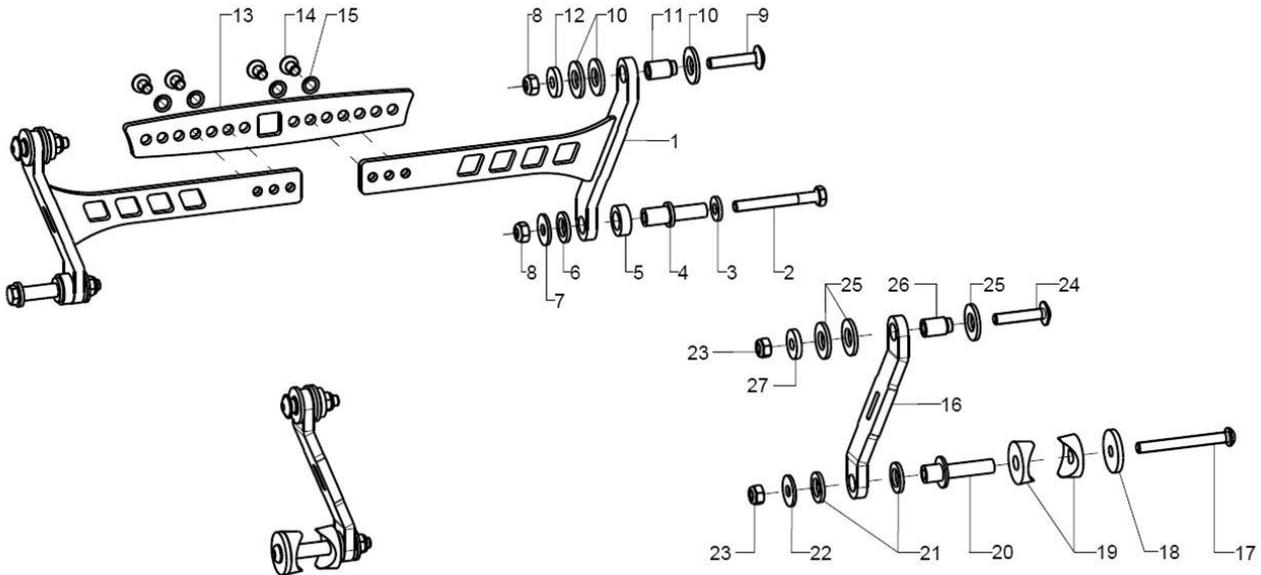

| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|---------|--------|------------|--|-----------|
| 1 | 2 | 19060501 | Traversenanbindung | SB |
| 2-13 | 1 | 19060597 | Montagezubehör Traversenanbindung | |
| 2 | 2 | | Sechskantschraube mit Schaft DIN 931 - M6X50 | |
| 3 | 2 | | Scheibe verstärkt Ø14/6,2x2 | |
| 4 | 2 | | Buchse Gelenklasche - hinten | |
| 5 | 2 | | Scheibe PS - 17.5x10.7x6 | |
| 6 | 2 | | Scheibe PS - 17.5x10.7x2 | |
| 7 | 2 | | Scheibe DIN 9021 - 6,4 | |
| 8 | 4 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 9 | 2 | | Linsenflanschschraube mit Innensechskant M6x30 | |
| 10 | 6 | | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - PA schwarz | |
| 11 | 2 | | Zapfenbuchse für Sitz | |
| 12 | 2 | | Scheibe DIN 7349 - 6,4 | |
| 13 | 1 | 19060505 | Verbindungslasche | SB |
| 14 - 15 | 1 | 19060598 | Montagezubehör Verbindungslasche | |
| 14 | 4 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x10 | |
| 15 | 4 | | Sicherungsscheibe S6 - FST | |
| 16 | 2 | 19060503 | Gelenklasche vorne | |
| 17 - 27 | 1 | 19060599 | Montagezubehör Gelenklasche vorne | |
| 17 | 2 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x55 | |
| 18 | 2 | | Stützscheibe D25/d=6,2x3 | |
| 19 | 4 | | Sattelscheibe schwarz Nenn-Ø 24/8 | |
| 20 | 2 | | Buchse Gelenklasche - vorne | |
| 21 | 4 | | Scheibe PS - 17.5x10.7x2 | |
| 22 | 2 | | Scheibe DIN 9021 - 6,4 | |
| 23 | 4 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 24 | 2 | | Linsenflanschschraube mit Innensechskant M6x30 | |
| 25 | 6 | | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - PA schwarz | |
| 26 | 2 | | Zapfenbuchse für Sitz | |
| 27 | 2 | | Scheibe DIN 7349 - 6,4 | |

Gasdruckfeder inkl. Halter

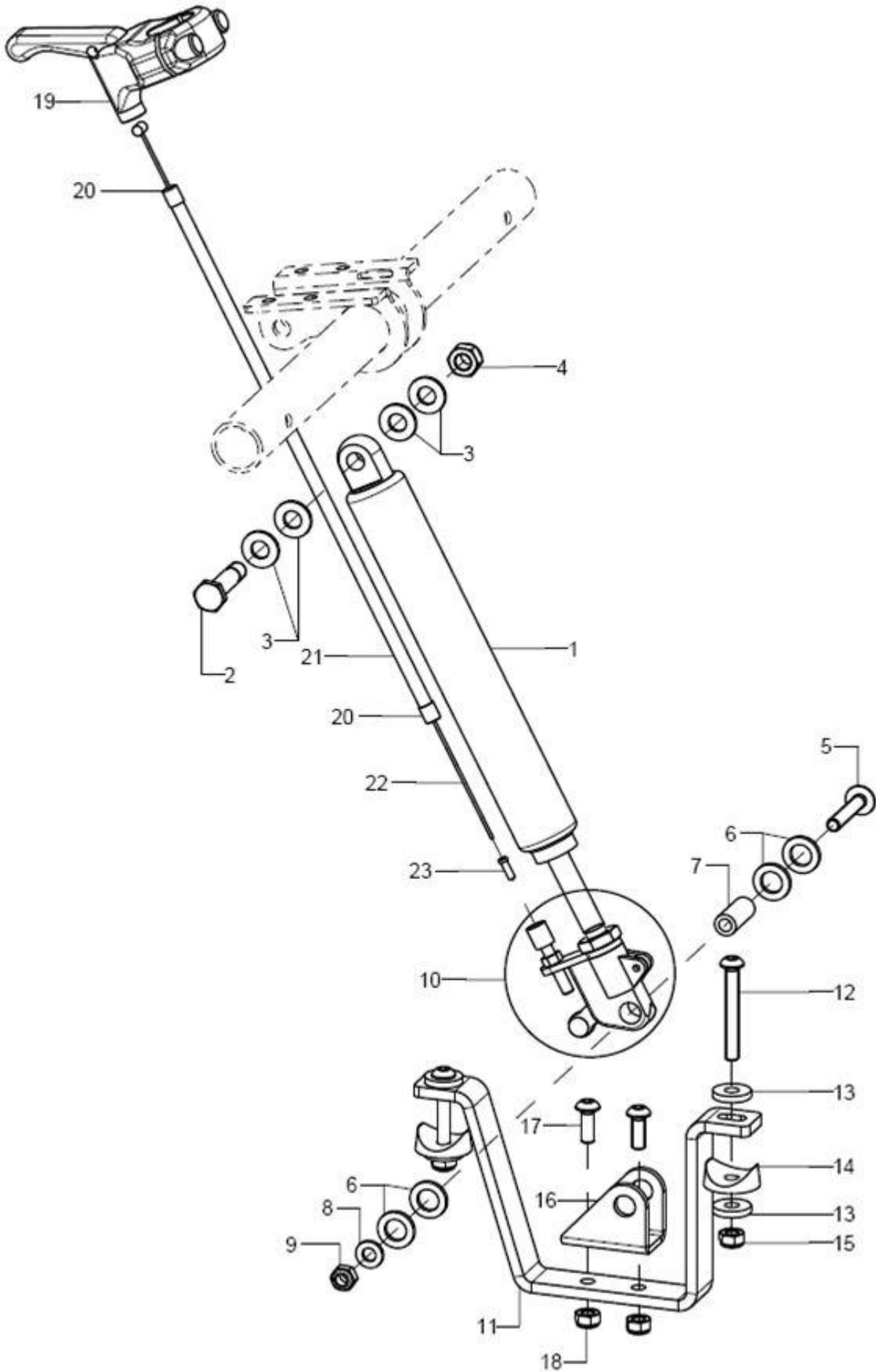

| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|--------------|---------------|-------------------|---|------------------|
| 1 | 1 | 190508 | Gasdruckfeder 100/80 kpl. mit Auslösekopf | |
| 2-4 | 1 | 190503 | Passschraube M8x35 SW13 | |
| 3 | 4 | | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - PA schwarz | |
| 4 | 1 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M8 | |
| 5-9 | 1 | 190504 | Montagezubehör GDF Sitzkantelung unten | |
| 5 | 1 | | Linsenflanschschraube mit Innensechskant M6x35 | |
| 6 | 4 | | Scheibe 10,2x17x2 PA6 natur | |
| 7 | 1 | | Distanzbuchse 10x2x24,5 | |
| 8 | 1 | | Scheibe DIN 125 - A 6,4 | |
| 9 | 1 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 10 | 1 | 190521 | GDF-Auslösekopf kpl. | |
| 11-18 | 1 | 19060210 | Gasdruckfederhalter inkl. Montagezubehör | |
| 12 | 2 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x45 | |
| 13 | 4 | | Scheibe DIN 7349 - 6,4 | |
| 14 | 2 | | Sattelscheibe schwarz Nenn- ϕ 24/6 | |
| 15 | 2 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 16 | 1 | | Lagerbock Gasdruckfeder inkl. Pos. 17 + 18 | |
| 17 | 2 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x16 | |
| 18 | 2 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 19-23 | 1 | 190512 | Gasdruckfederentriegelung inkl. Montagezubehör | |
| 19 | 1 | 190513 | Handauslösehebel für Gasdruckfeder ohne Feststeller | Standard |
| o.B. | 1 | | Handauslösehebel mit Kindersicherung | Kindersicherung |
| 20 | 1 | 351812 | Abschlußhülse bei Hülle des Seilzuges ϕ 5 | |
| 21 | 1 | 352013 | Außenhülle für Bremszug schwarz, 150 cm lang | |
| 22 | 1 | 190517 | Innenzug für Gasdruckfeder ϕ 1.3x2000, Einfachnippel | |
| 23 | 1 | 352005 | Endkappe für Innenzüge ϕ 1-1,5 mm | Set 2 Stück |


Sitzkissen

| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|---|---------------------------------------|
| o.B. | 1 | 891002 | Sitzformteil | SB, ST, Bezugsstoff |
| o.B. | 1 | 891003 | Bezug für Sitzformteil | SB, ST, Bezugsstoff |
| o.B. | 1 | 891004 | Inkontinenzschutz für Sitzformteil | SB, ST |
| o.B. | 1 | 8003 | Sitzkissen aus Verbundschaum für festen Sitzkomfort, Dicke 3cm | SB, ST, Bezugsstoff |
| o.B. | 1 | 8005 | Sitzkissen aus Verbundschaum für festen Sitzkomfort, Dicke 5cm | SB, ST, Bezugsstoff |
| o.B. | 1 | 8103 | Relax-Sitzkissen für mittelweichen Sitzkomfort, Dicke 3cm | SB, ST, Bezugsstoff |
| o.B. | 1 | 8105 | Relax-Sitzkissen für mittelweichen Sitzkomfort, Dicke 5cm | SB, ST, Bezugsstoff |
| o.B. | 1 | 80XX | Bezug für Sitzkissen | SB, ST, Bezugsstoff, Dicke Sitzkissen |
| o.B. | 1 | 8603 | Inkontinenzschutz (für Kissen 3 cm) (vom Umtausch ausgeschlossen) | SB, ST |
| o.B. | 1 | 8605 | Inkontinenzschutz (für Kissen 5 cm) (vom Umtausch ausgeschlossen) | SB, ST |

| Stoffmuster | XX |
|---------------|----|
| Betex schwarz | 20 |
| Betex blau | 21 |
| Betex rot | 22 |
| Betex grau | 23 |
| Betex grün | 24 |
| Betex gelb | 25 |
| Betex orange | 27 |


Alle Stoffmuster können unter www.sorgrollstuhltechnik.de angesehen werden.

Therapietisch Variante 1 (seitlich wegklappbar)

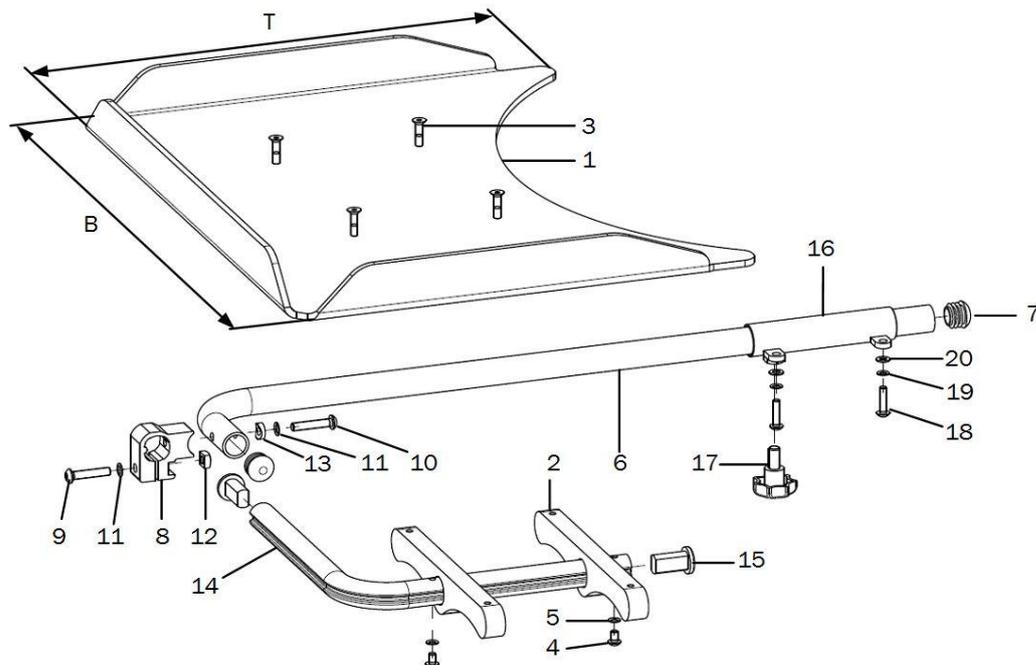


| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|---|---------------------------|
| 1-20 | 1 | 9204XX | Therapietisch Variante 1 seitlich wegklappbar kpl., | Holz, Polycarbonat, Größe |
| 1 | 1 | 920030 | Therapietisch Gr.1 (B45xT36) Polycarbonat | XX=10, Empfohlen SB28 –30 |
| o.B. | 1 | 920031 | Therapietisch Gr.2 (B59xT45) Polycarbonat | XX=11, Empfohlen SB32 –40 |
| o.B. | 1 | 920032 | Therapietisch Gr.3 (B70xT50) Polycarbonat | XX=12, Empfohlen >SB42 |
| o.B. | 1 | 920033 | Therapietisch Gr.1 (B50xT40) Holz | XX=13, Empfohlen SB26 –30 |
| o.B. | 1 | 920034 | Therapietisch Gr.2 (B60xT50) Holz | XX=14, Empfohlen SB32 –42 |
| 2-20 | 1 | 9204 | Montagezubehör Therapietisch Variante 1 kpl. (ohne Tisch) | |
| 2 | 2 | | Tragkonsole umlegbar 15x35x200 | |
| 3 | 4 | | Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 M5x20 | |
| 4 | 2 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M5x8 | |
| 5 | 2 | | Sicherungsscheibe S5 - FST | |
| 6 | 1 | 920402 | Zsb. Tragrohr inkl. Stopfen | |
| 7 | 2 | | Stopfen mit Lamellen für Rohr ø20x1-2, schwarz | |
| 8-13 | 1 | 92040403 | Klemmteil inkl. Montagezubehör | |
| 9 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x30 | |
| 10 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x35 | |
| 11 | 2 | | Sicherungsscheibe S6 - FST | |
| 12 | 1 | | Vierkantmutter DIN 557 – M6 | |
| 13 | 1 | | Sattelscheibe ø12/6x2,5 | |
| 14-15 | 1 | 920404 | Klappbügelrohr inkl. Profilrohr-Endstopfen | |
| 15 | 2 | | Profilrohr- Endstopfen, Rd 20x28,5 | |
| 16 | 1 | 920405 | Rohraufnahme, Schweißteil, rechts inkl. Montagezubehör Rohraufnahme | Anbau rechts |
| o.B. | 1 | 920406 | Rohraufnahme, Schweißteil, links inkl. Montagezubehör Rohraufnahme | Anbau links |
| 17-20 | 2 | 92040599 | Montagezubehör Rohraufnahme | |
| 17 | 1 | | 7-Sterngriff ø32 - M8x15 Außengewinde, schwarz | |
| 18 | 2 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M5x20 | |
| 19 | 2 | | Sicherungsscheibe S5 - FST | |
| 20 | 2 | | Scheibe DIN 125 - A 5,3 | |

Therapietisch Variante 2 (an Armpolster gesteckt)

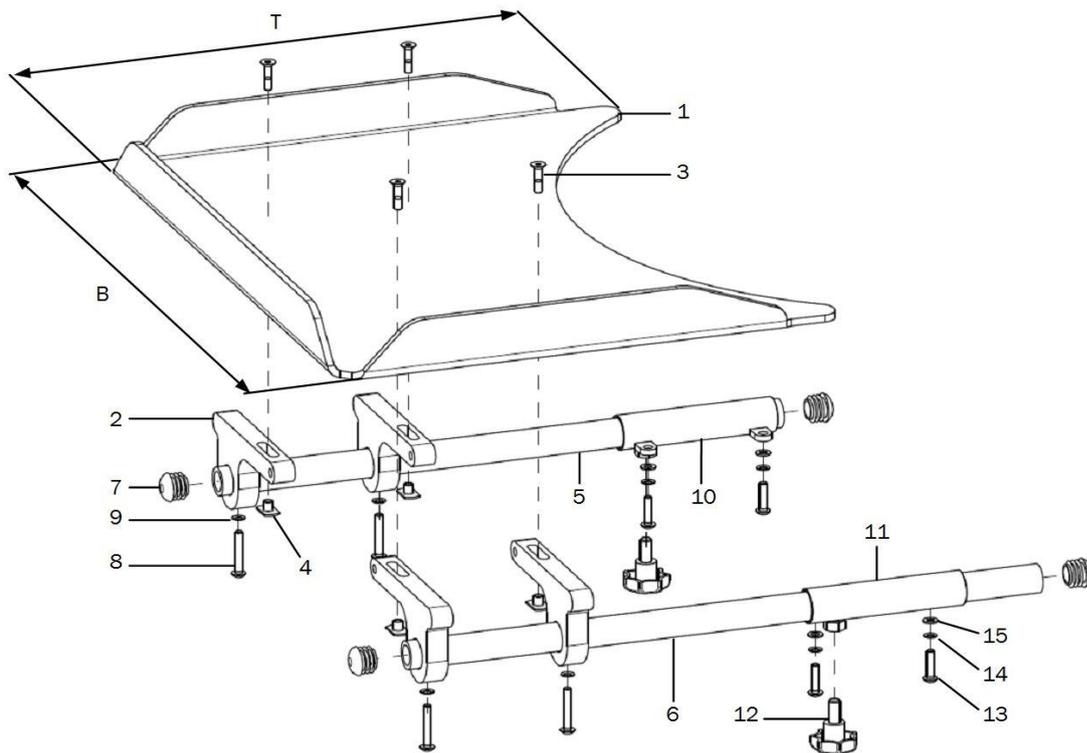


| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|----------|--------|------------|---|---------------------------|
| 1-15 | 1 | 9207XX | Therapietisch Variante 2 an Armpolster kpl. | Holz, Polycarbonat, Größe |
| 1 | 1 | 920030 | Therapietisch Gr.1 (B45xT36) Polycarbonat | XX=10, Empfohlen SB28 –30 |
| o.B. | 1 | 920031 | Therapietisch Gr.2 (B59xT45) Polycarbonat | XX=11, Empfohlen SB32 –40 |
| o.B. | 1 | 920032 | Therapietisch Gr.3 (B70xT50) Polycarbonat | XX=12, Empfohlen >SB42 |
| o.B. | 1 | 920033 | Therapietisch Gr.1 (B50xT40) Holz | XX=13, Empfohlen SB26 –30 |
| o.B. | 1 | 920034 | Therapietisch Gr.2 (B60xT50) Holz | XX=14, Empfohlen SB32 –42 |
| 2-15 | | 9207 | Montagezubehör Therapietisch Variante 2 an Armpolster | |
| 2 | 4 | 920705 | Tragkonsole steckbar 15x61x120 | |
| 3-4 | 1 | 92070599 | Montagezubehör Tragkonsole | |
| 3 | 4 | | Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 M5x20 | |
| 4 | 4 | | Anschweißmutter C - M5x7,5 | |
| 5 | 1 | 920702 | Tragrohr Ro 20x3x400 inkl. Montagezubehör | |
| 6 | 1 | 920704 | Tragrohr Ro 20x3x450 inkl. Montagezubehör | |
| 7 | 2 | | Stopfen mit Lamellen für Rohr ø20x1-2, schwarz | |
| 8 | 2 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M5x30 | |
| 9 | 2 | | Sicherungsscheibe S5 - FST | |
| 10+12-15 | 1 | 920701 | Rohraufnahme, Schweißst., rechts inkl. Montagezubehör | |
| 11-15 | 1 | 920703 | Rohraufnahme, Schweißst., links inkl. Montagezubehör | |
| 12-15 | 2 | 92040599 | Montagezubehör Rohraufnahme | |
| 12 | 1 | | 7-Sterngriff ø32 - M8x15 Außengewinde, schwarz | |
| 13 | 2 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M5x20 | |
| 14 | 2 | | Sicherungsscheibe S5 - FST | |
| 15 | 2 | | Scheibe DIN 125 - A 5,3 | |

Therapietisch Variante 6 (mittig unter Sitzfix montiert)

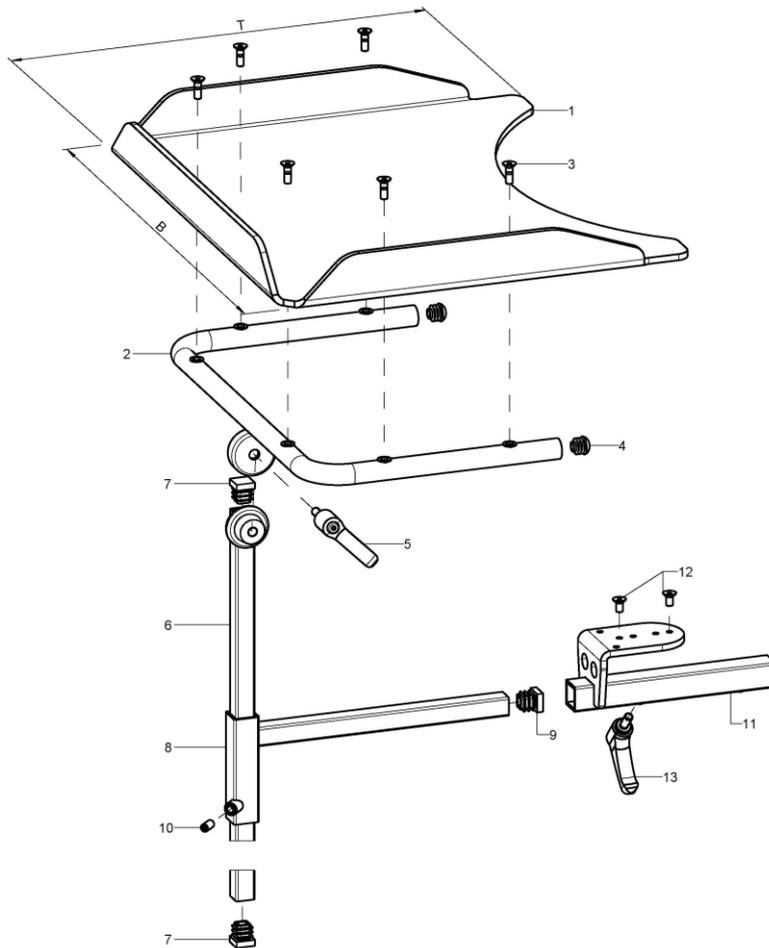


| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|--|---|
| 1-13 | 1 | 9209XX | Therapietisch Anbau mittig unter SitzFix kpl. | Holz, Polycarbonat, Größe |
| 1-7 | 1 | | Therapietisch für Kombination mit Abduktionskeil | |
| 1 | 1 | 920030 | Therapietisch Gr.1 (B45xT36) Polycarbonat | XX=10, Empfohlen SB28 –30 |
| o.B. | 1 | 920031 | Therapietisch Gr.2 (B59xT45) Polycarbonat | XX=11, Empfohlen SB32 –40 |
| o.B. | 1 | 920032 | Therapietisch Gr.3 (B70xT50) Polycarbonat | XX=12, Empfohlen >SB42 |
| o.B. | 1 | 920033 | Therapietisch Gr.1 (B50xT40) Holz | XX=13, Empfohlen SB26 –30 |
| o.B. | 1 | 920034 | Therapietisch Gr.2 (B60xT50) Holz | XX=14, Empfohlen SB32 –42 |
| 2-13 | 1 | 9209 | Montagezubehör Therapietisch kpl. (ohne Tisch) | |
| 2-5 | 1 | 920901 | Halter für Therapietisch inkl. Montagezubehör | Variante 331 bei Gr.0+1, Variante 480 bei Gr. 2+3 |
| 3 | 6 | | Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 M5x16 | |
| 4 | 2 | | Stopfen mit Lamellen für Rohr ø22x1-2, schwarz | |
| 5 | 1 | | Klemmhebel verstellbar M8x16, schwarz | |
| 6-7 | 1 | 920902 | Konusstange 450 inkl. Stopfen | |
| 7 | 2 | | Stopfen mit Lamellen für Vierkantrohre, schwarz, 15x15 | |
| 8-10 | 1 | 920903 | Aufnahme 220x85 inkl. Montagezubehör | |
| 9 | 1 | | Stopfen mit Lamellen für Vierkantrohre, schwarz, 15x15 | |
| 10 | 1 | | Gewindestift mit Innensechskant DIN 913, M6x12 | |
| 11-13 | 1 | 195102 | Schweißteil Aufnahme mit Flanschwinkel, inkl. Montagezubehör | |
| 12 | 2 | | Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 M5x10 | |
| 13 | 1 | | Klemmhebel verstellbar M6x16, schwarz | |

Abduktionskeil

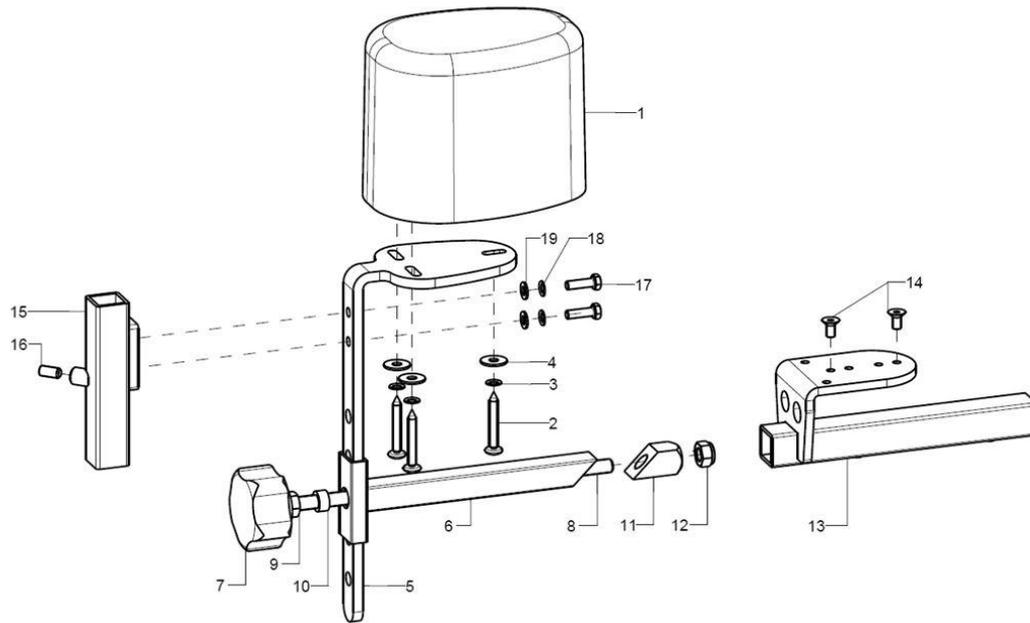


| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|--|---------------------|
| 1-14 | 1 | 1952 | Abduktionskeil Gr. S kpl. | |
| o.B. | 1 | 1953 | Abduktionskeil Gr. M kpl. | |
| o.B. | 1 | 1954 | Abduktionskeil Gr. L kpl. | |
| 1 | 1 | 195002 | Abduktionskeil Gr. S | LxBxH 93x66x90 mm |
| o.B. | 1 | 195003 | Abduktionskeil Gr. M | LxBxH 113x82x100 mm |
| o.B. | 1 | 195004 | Abduktionskeil Gr. L | LxBxH 128x92x100 mm |
| 2-4 | 1 | 19500299 | Montagezubehör Abduktionskeil an Haltewinkel | |
| 2 | 3 | | Rundkopf Spanschraube 5x25 DIN WN56 | |
| 3 | 3 | | Sicherungsscheibe S5 - FST | |
| 4 | 3 | | Scheibe DIN 9021 - 5,3 | |
| 5 | 1 | 195101 | Haltewinkel für Abduktionskeil | |
| 6 | 1 | 195103 | Schweißteil Klemmstück | |
| 7-12 | 1 | 684004 | Klemmset für Gesäßpelotte oder Abduktionskeil | |
| 7 | 1 | | 5-Sterngriff ø50 - M8 Innengewinde , schwarz | |
| 8 | 1 | | Gewindestange M8 210mm | |
| 9 | 1 | | Sechskantmutter DIN 934 - M8 | |
| 10 | 1 | | Distanzbuchse ø 12x2x6,0 mm | |
| 11 | 1 | | Klemmteil - Gesäßpelotte, 4kt 15x15x30 | |
| 12 | 1 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 13-14 | 1 | 195102 | Schweißteil Aufnahme mit Flanschwinkel, inkl. Montagezubehör | |
| 14 | 2 | | Linsenflanschschraube mit Innensechskant M5x10 | |
| 15-19 | 1 | 400105 | Beinstützenaufnahme universal für Kombination Abduktionskeil mit Therapietisch, inkl. Montagezubehör | |
| 16 | 1 | | Gewindestift mit Innensechskant DIN 913, M6x12 | |
| 17 | 2 | | Sechskantschraube DIN 933 - M5x16 | |
| 18 | 2 | | Sicherungsscheibe S5 - FST | |
| 19 | 2 | | Scheibe DIN 125 - A 5,3 | |

Rücken winkelverstellbar

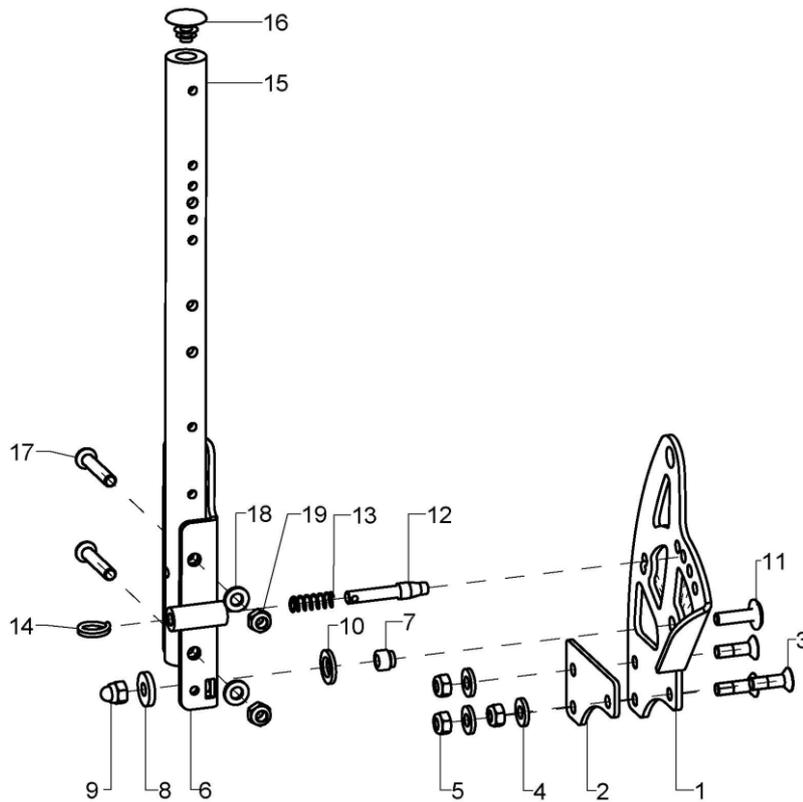


| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|--|-----------|
| 1 | 1 | 61210102 | Rastplatte rechts | |
| o.B. | 1 | 61210101 | Rastplatte links | |
| 2-5 | 1 | 61210103 | Distanz bei Rastplatte inkl. Montagezubehör | |
| 3 | 2 | | Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 M6x20 | |
| 4 | 2 | | Scheibe verstärkt Ø14/6,2x2 | |
| 5 | 2 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 6 | 1 | 62370204 | Rückenrohrgelenk rechts 137 mm kpl. incl. Montagematerial | |
| o.B. | 1 | 62370203 | Rückenrohrgelenk links 137 mm kpl. incl. Montagematerial | |
| 7-11 | 2 | 62370298 | Montagezubehör U-Teil 137 mm | |
| 7 | 1 | | Bundbuchse Ø8/10x8,1 | |
| 8 | 1 | | Scheibe DIN 7349 - 6,4 | |
| 9 | 1 | | Sechsk.-Hutmutter niedr. Form mit Klemmt. DIN 986 - M6 | |
| 10 | 1 | | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - PA schwarz | |
| 11 | 1 | | Flachkopfschraube m. Innensechskant Typ KF - M6x20 | |
| 12-14 | 1 | 610109 | Rastbolzen inkl. Montagezubehör (Feder + Ring) | |
| 13 | 2 | | Druckfeder DIN 2098 0,7x7,65/9,05x21 | |
| 14 | 2 | | Drahtformring, 2x16, 2 Wdg. | |
| o.B. | 1 | 610212 | Schlüsselring, Federstahldraht ø3- Ringaußen ø 32 + Polyesterleine ø3 mm | |
| 15-16 | 2 | 623302XX | Rückenrohr winkelverstellbar inkl. Stopfen | XX=RH |
| 16 | 2 | | Lamellenstopfen f. Ø20x5mm | |
| 17-19 | 2 | 62330099 | Montagezubehör Rückenrohr | |
| 17 | 2 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x35 | |
| 18 | 2 | | Scheibe DIN 125 - A 6,4 | |
| 19 | 2 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |

Rücken mit Gasdruckfederverstellung


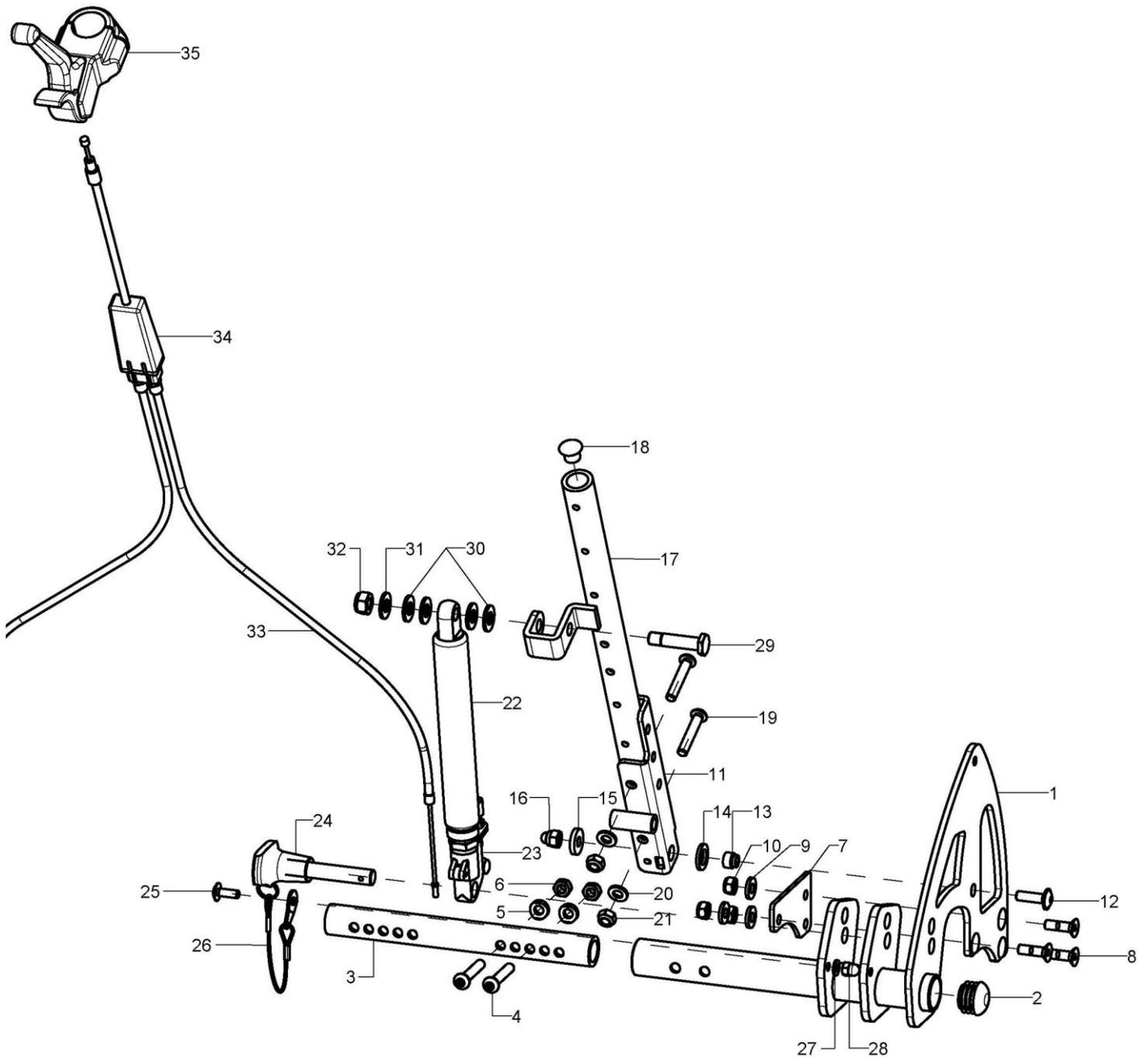


| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|--------------|---------------|-------------------|---|------------------|
| 1-35 | 1 | 613500 | Rücken mit Gasdruckfederverstellung kpl. | SB, RH, Farbe |
| 1-2 | 1 | 613502 | Winkelverstelltraverse rechts, inkl. Stopfen | SB, Farbe |
| o.B. | 1 | 613501 | Winkelverstelltraverse links, inkl. Stopfen | SB, Farbe |
| 2 | 1 | | Stopfen mit Lamellen für Rohr $\varnothing 22 \times 1-2$, schwarz | |
| 3-6 | 1 | 613504 | Traversenrohr GDF inkl. Montagezubehör | SB |
| 4 | 4 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x35 | |
| 5 | 4 | | Sattelscheibe $\varnothing 12/6 \times 2,5$ | |
| 6 | 4 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 7-10 | 2 | 61210103 | Distanz bei Rastplatte inkl. Montagezubehör | |
| 8 | 3 | | Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 M6x20 | |
| 9 | 3 | | Scheibe verstärkt $\varnothing 14/6,2 \times 2$ | |
| 10 | 3 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 11 | 1 | 62370204 | Rückenrohrgelenk rechts 137 mm kpl. incl. Montagematerial | |
| o.B. | 1 | 62370203 | Rückenrohrgelenk links 137 mm kpl. incl. Montagematerial | |
| 12-16 | 2 | 62350199 | Montagezubehör U-Teil 137 mm | |
| 12 | 1 | | Linsenflanschschrabe mit Innensechskant M6x20 | |
| 13 | 1 | | Bundbuchse $\varnothing 8/10 \times 8,1$ | |
| 14 | 1 | | Scheibe DIN 125 - A 10,5 - PA schwarz | |
| 15 | 1 | | Scheibe DIN 7349 - 6,4 | |
| 16 | 1 | | Sechsk.-Hutmutter niedr. Form mit Klemmt. DIN 986 - M6 | |
| 17-18 | 1 | 623502RH | Rückenrohr-GDF rechts, inkl. Abdeckkappe | Rückenhöhe |
| o.B. | 1 | 623501RH | Rückenrohr-GDF links, inkl. Abdeckkappe | Rückenhöhe |
| 18 | 1 | | Abdeckkappe für DIN912 M6 | |
| 19-21 | 2 | 62330099 | Montagezubehör Rückenrohr | |
| 19 | 2 | | Linsenflanschschrabe mit Innensechskant M6x35 | |
| 20 | 2 | | Scheibe DIN 125 - A 6,4 | |
| 21 | 2 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 22-23 | 2 | 190507 | Gasdruckfeder 200/40 kpl. mit Auslösekopf | |
| 23 | 2 | 190521 | GDF-Auslösekopf kpl. | |
| 24-28 | 2 | 613509 | Kugelsperrbolzen kpl. | |
| 25 | 2 | | Linsenflanschschrabe mit Innensechskant M5x14 | |
| 26 | 2 | | Sicherungsseil für Sperrbolzen | |
| 27 | 2 | | Scheibe DIN 125 - A 5,3 | |
| 28 | 2 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M5 | |
| 29-32 | 2 | 190503 | Passschraube M8x35 SW13 | |
| 30 | 4 | | Scheibe DIN 125 - A 8,4 - PA schwarz | |
| 31 | 2 | | Scheibe DIN 125 - A 8,4 | |
| 32 | 2 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M8 | |
| 33 | 2 | 190514 | Seilzug inkl. Hülle und Anschlusssteile | |
| 34 | 1 | 0454918030 10 | Doppel-Seilzugverteiler | |
| 35 | 1 | 352010 | Handbremshebel schwarz, feststellbar | |
| o.B. | 1 | 352014 | Handbremshebel feststellbar incl. Kindersicherung | Kindersicherung |

Muldenrücken

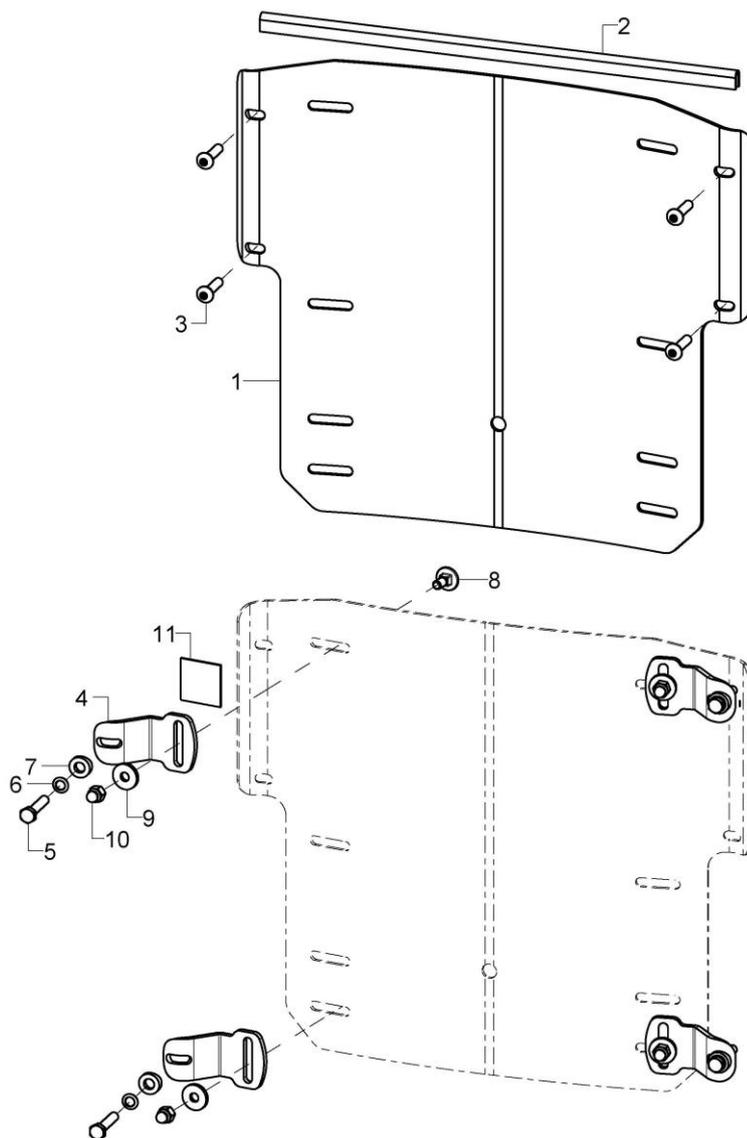

| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|--|-------------------------------|
| 1 | 1 | 6930XX | Muldenrücken Modell 1, RH gerade verlängert um 2 cm | SB, RH, Farbe, XX=Muldentiefe |
| o.B. | 1 | 6931XX | Muldenrücken Modell 2, RH gerade verlängert um 10 cm | SB, RH, Farbe, XX=Muldentiefe |
| o.B. | 1 | 6932XX | Muldenrücken Modell 2, RH gerade verlängert um 20 cm | SB, RH, Farbe, XX=Muldentiefe |
| o.B. | 1 | 6933XX | Muldenrücken Modell 3, RH gebogen verlängert um 5 cm | SB, RH, Farbe, XX=Muldentiefe |
| o.B. | 1 | 6934XX | Muldenrücken Modell 3, RH gebogen verlängert um 10 cm | SB, RH, Farbe, XX=Muldentiefe |
| o.B. | 1 | 6935XX | Muldenrücken Modell 3, RH gebogen verlängert um 15 cm | SB, RH, Farbe, XX=Muldentiefe |
| 2 | 1 | 450030 | Kantenschutzprofil - Stahlklemmband, 1-2 mm, schwarz | 1 m |
| 3 | 4 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M5x22 | |
| 4-11 | 4 | 692598 | Halterungsset Muldenrücken kpl. | |
| 4 | 1 | 692510 | Halteblech verschraubt | |
| 5 | 1 | | Sechskantschraube DIN 933 - M5x25 | |
| 6 | 1 | | Sicherungsscheibe S5 - FST | |
| 7 | 1 | | Sattelscheibe ø 12/5x2.5 | |
| 8 | 1 | | Flachrundschauben DIN 603 M5x12 | |
| 9 | 1 | | Scheibe DIN 7349 - 5,3 | |
| 10 | 1 | | Sechsk.-Hutmutter niedr. Form mit Klemmt. DIN 986 - M5 | |
| 11 | 1 | | Flauschband selbstklebend 25mm, schwarz | |

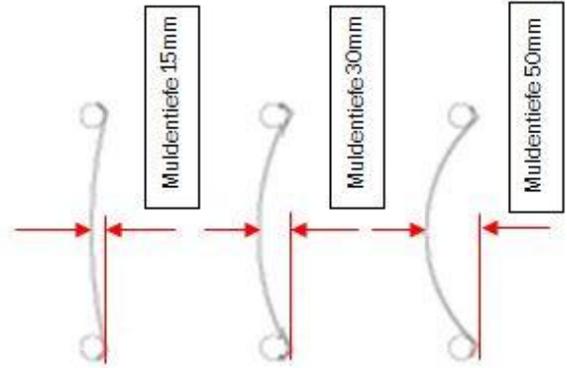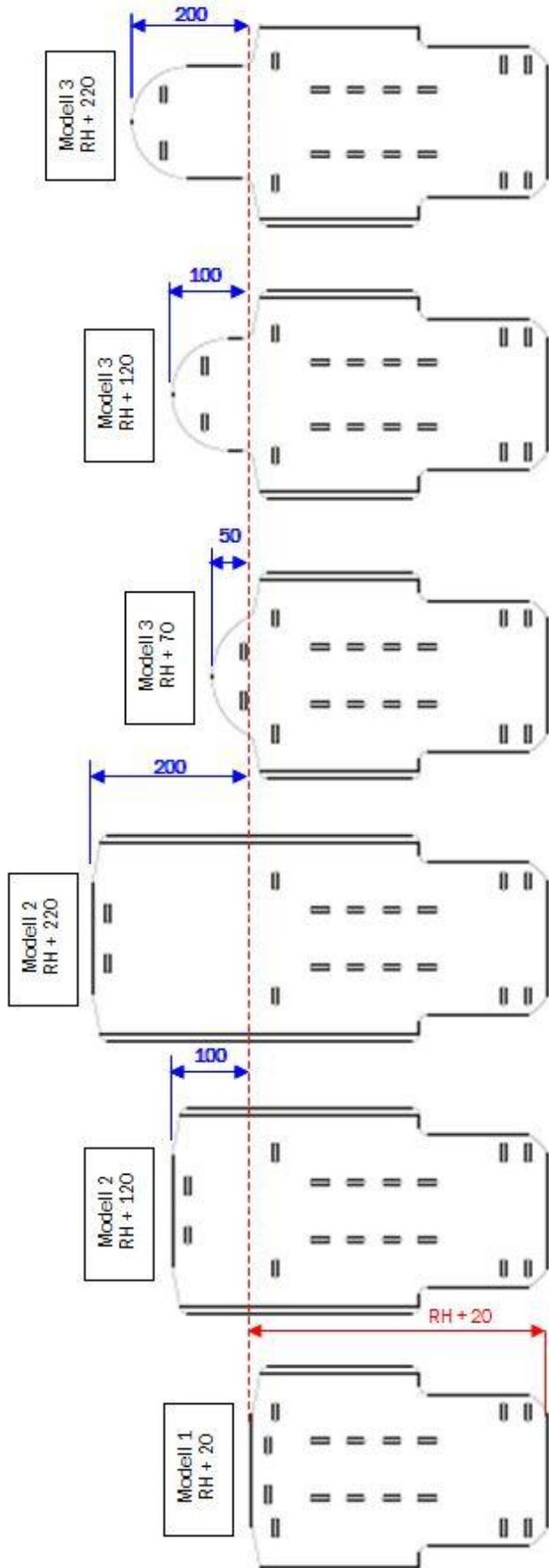


Rückenverlängerung

Muldenrücken Modell 1: erst ab RH35cm

Muldenrücken Modell 3: erst ab RH30cm, nur mit RH+5cm

Wenn der Muldenrücken mit dem Halterungsset für Muldenrücken befestigt wird, ist eine Rückenverlängerung erst ab SB28 möglich.

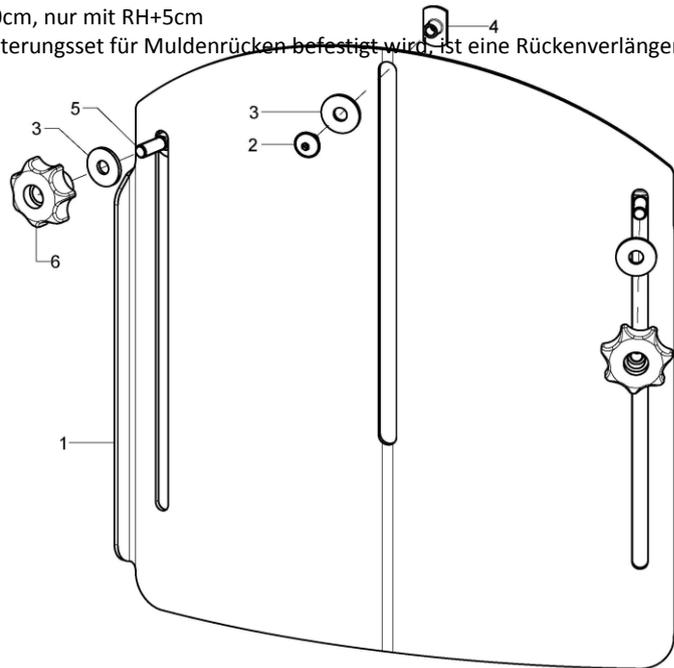

| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|---|---------------|
| 1 | 1 | | Rückenverlängerung | SB, MT, Farbe |
| 2-6 | 1 | 68607299 | Montagezubehör Rückenverlängerung | |
| 2 | 1 | | Linsenflanschschraube mit Innensechskant M5x8 | |
| 3 | 3 | | Scheibe DIN 9021 - 6,4 - PA | |
| 4 | 1 | | Anschweißmutter C - M5x7,5 | |
| 5 | 2 | | Flachrundschraben DIN 603 M6x20 | |
| 6 | 2 | | 7-Sterngriff ø32 - M6 Innengewinde durchgehend, schwarz | |

Kissen für Muldenrücken


| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|---|--|
| o.B. | 1 | 8517 | Rückenkissen 3 cm dick Bezug mit Reißverschluss | SB, RH, Modell, Bezugsstoff |
| o.B. | 1 | 8517XX | Bezug für Rückenkissen | SB, RH, Modell, XX=Bezugsstoff |
| o.B. | 1 | 891104 | Rückenformteil (3cm) inkl. Bezug wechselbar | SB, RH, Modell, Bezugsstoff |
| o.B. | 1 | 891106 | Rückenformteil (5cm) inkl. Bezug wechselbar | SB, RH, Modell, Bezugsstoff |
| o.B. | 1 | 8911XX | Bezug für Rückenformteil | SB,RH, Modell, Muldentiefe, XX=Bezugsstoff |
| o.B. | 1 | 68607201 | Kopfstützenpolster inkl. Bezug für Rückenverlängerung | Farbe angeben |

| | |
|---------------|----|
| Stoffmuster | XX |
| Betex schwarz | 20 |
| Betex blau | 21 |
| Betex rot | 22 |
| Betex grau | 23 |
| Betex grün | 24 |
| Betex gelb | 25 |
| Betex orange | 27 |


Alle Stoffmuster können unter www.sorgrollstuhltechnik.de angesehen werden.

Rückenbespannung Standard


| | |
|-------------|----|
| Stoffmuster | XX |
| schwarz | 20 |
| blau | 21 |
| rot | 22 |
| grau | 23 |

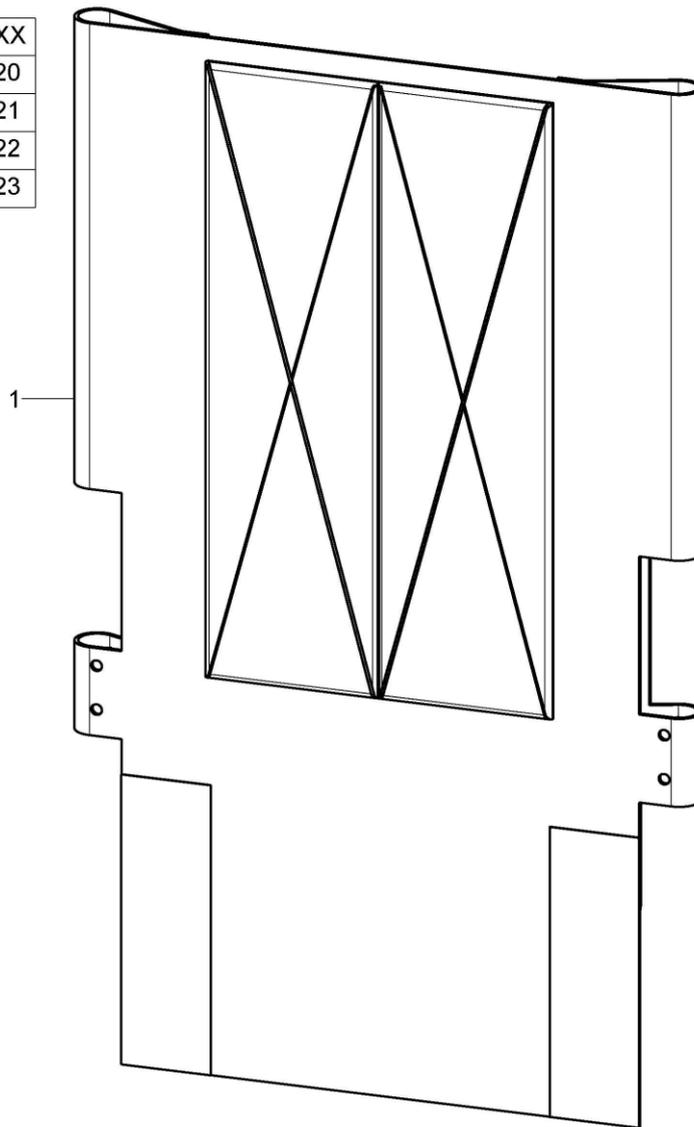

| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|--|------------------|
| 1 | 1 | 671104XX | Rückenbespannung standard, für Rückenwinkelverstellung | SB, RH, XX=Farbe |
| o.B. | 2 | | Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 M5x16 | |
| o.B. | 2 | | Rosette ø13/6x2, schwarz | |

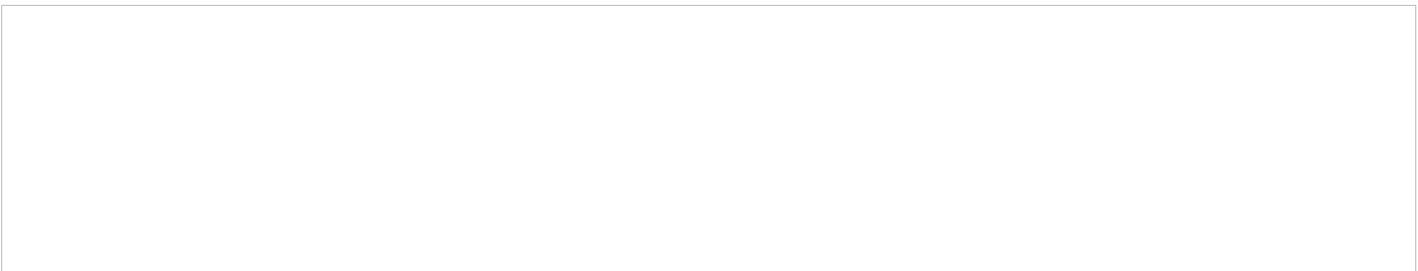


Rückenbespannung anpassbar

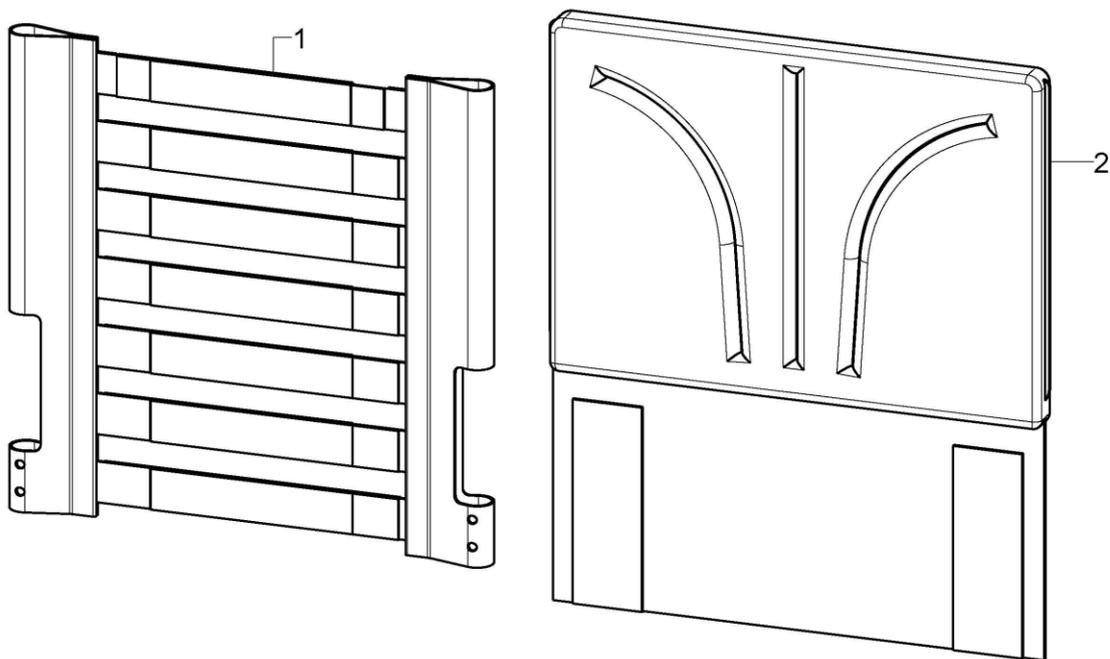


| | |
|---------------|----|
| Stoffmuster | XX |
| Betex schwarz | 20 |
| Betex blau | 21 |
| Betex rot | 22 |
| Betex grau | 23 |
| Betex grün | 24 |
| Betex gelb | 25 |
| Betex orange | 27 |

| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|--|---------------|
| 1+2 | 1 | 670103XX | Bespannung anpassbar 3-teilig, für Rückenwinkelverstellung | SB, RH, Farbe |
| 1 | 1 | | Bespannung anpassbar, für Rückenwinkelverstellung | SB, RH, Farbe |
| 2 | 1 | 670599 | Überwurf Rückenbespannung mit Kissen 2cm | SB, RH, Farbe |
| o.B. | 2 | | Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 M5x16 | |
| o.B. | 2 | | Rosette ø13/6x2, schwarz | |

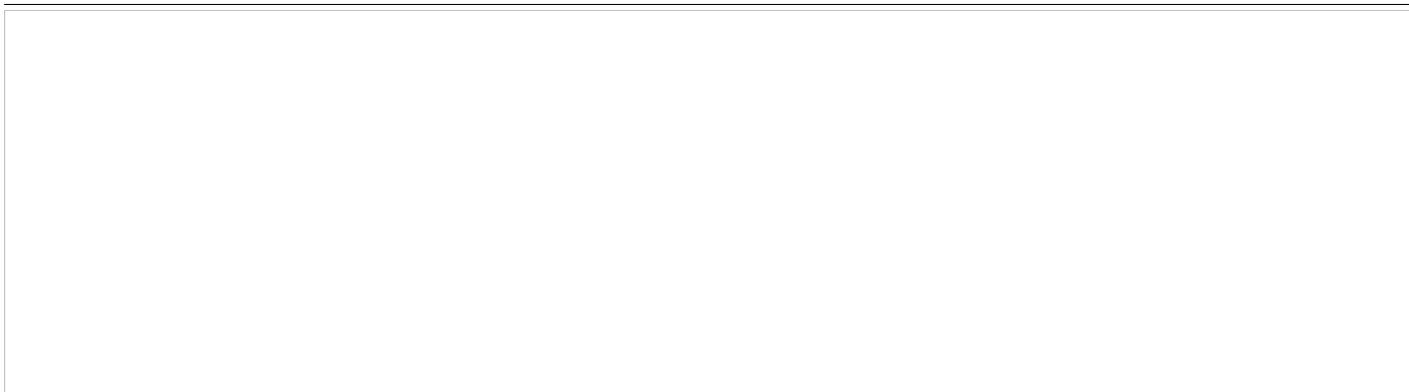


Stabilisierungsstange

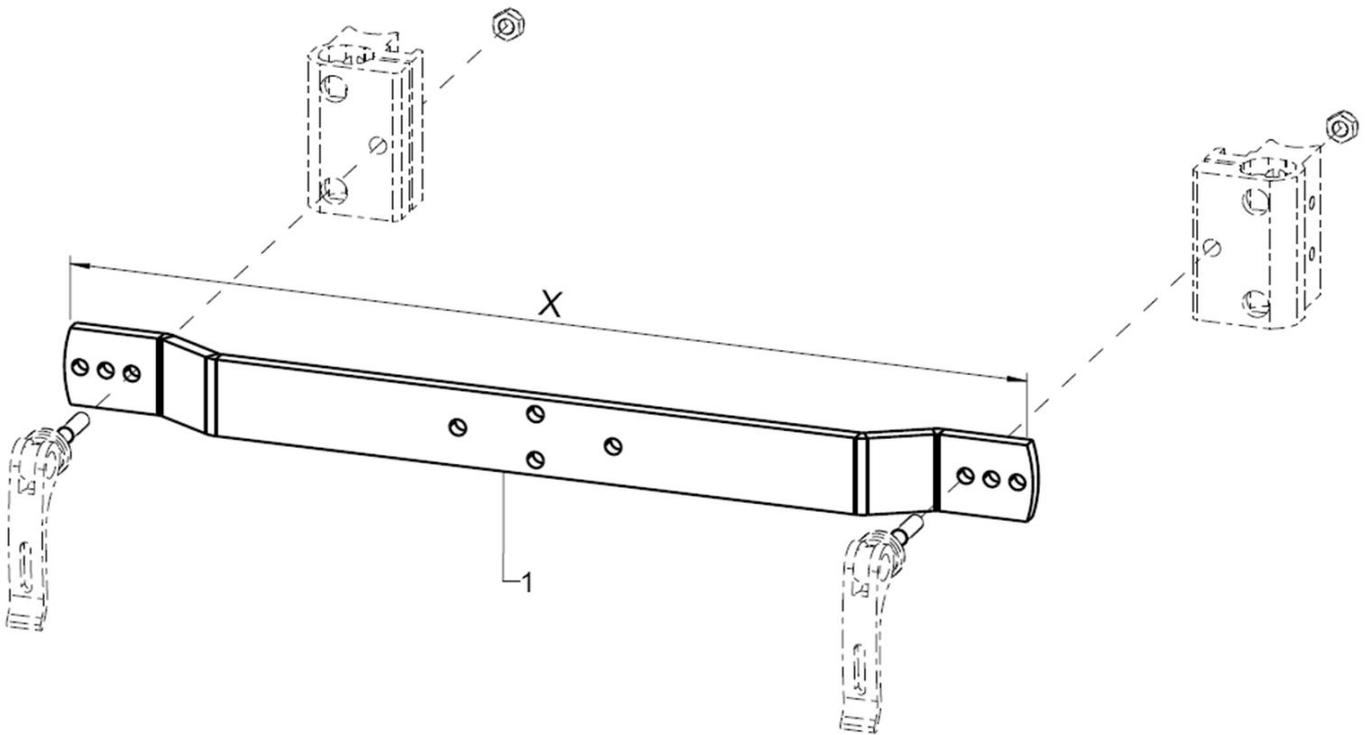


| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|-------------------------------------|-----------|
| 1 | 1 | 640901 | Stabilisierungsstange am SHG-Halter | SB |

Schiebegriffe ausziehbar

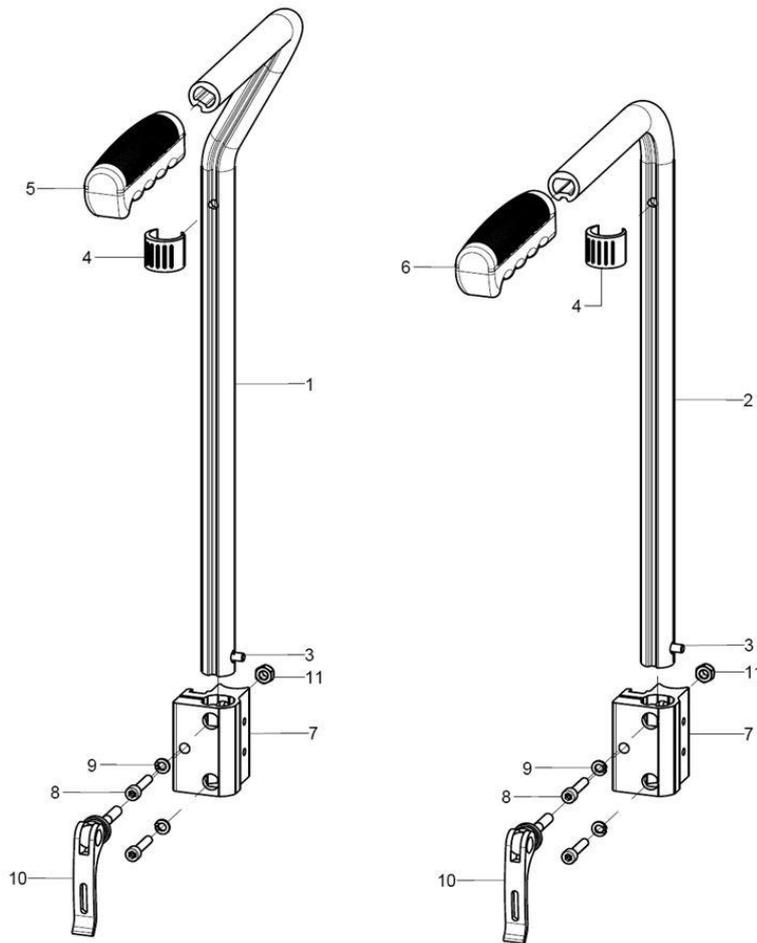


| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|--|------------------------------|
| 1+3-5 | 1 | 650532 | Schiebegriff 15 cm, gekröpft, ausziehbar, rechts, kpl. | |
| o.B. | 1 | 650531 | Schiebegriff 15 cm, gekröpft, ausziehbar, links, kpl. | |
| o.B. | 1 | 650632 | Schiebegriff 25 cm, gekröpft, ausziehbar, rechts, kpl. | |
| o.B. | 1 | 650631 | Schiebegriff 25 cm, gekröpft, ausziehbar, links, kpl. | |
| 2-4+6 | 2 | 650130 | Schiebegriff 15 cm gerade ausziehbar, kpl. | |
| o.B. | 2 | 650230 | Schiebegriff 25 cm, gerade, ausziehbar, kpl. | |
| 3 | 2 | 650160 | Stativfeder für Schiebegriffsicherung | 10er Set |
| 4 | 2 | 0463502000 | Klemmschalengleiter schwarz, Nenn- \varnothing 20-22 10 | 10 er Set |
| 5 | 1 | 650018 | Handgriff mit Steg rechts - 26x40x112 schwarz | Schiebegriff gekröpft rechts |
| o.B. | 1 | 650019 | Handgriff mit Steg links - 26x40x112 schwarz | Schiebegriff gekröpft links |
| 6 | 2 | 650017 | Handgriff PVC schwarz, gerade mit Steg | Schiebegriff gerade |
| 7-11 | 2 | 650051 | Schiebegriff-Klemmhalter Pr 38x42x58 | |
| 8 | 2 | | Zylinderschraube DIN 912 M5x25 | |
| 9 | 2 | | Federring DIN 127 - A 5 | |
| 10-11 | 1 | 0413406035 | Exzentrerspanner Länge 35 mm M6x20, schwarz 10 | |
| 11 | 1 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |

Schiebestange für ausziehbare Schiebegriffe

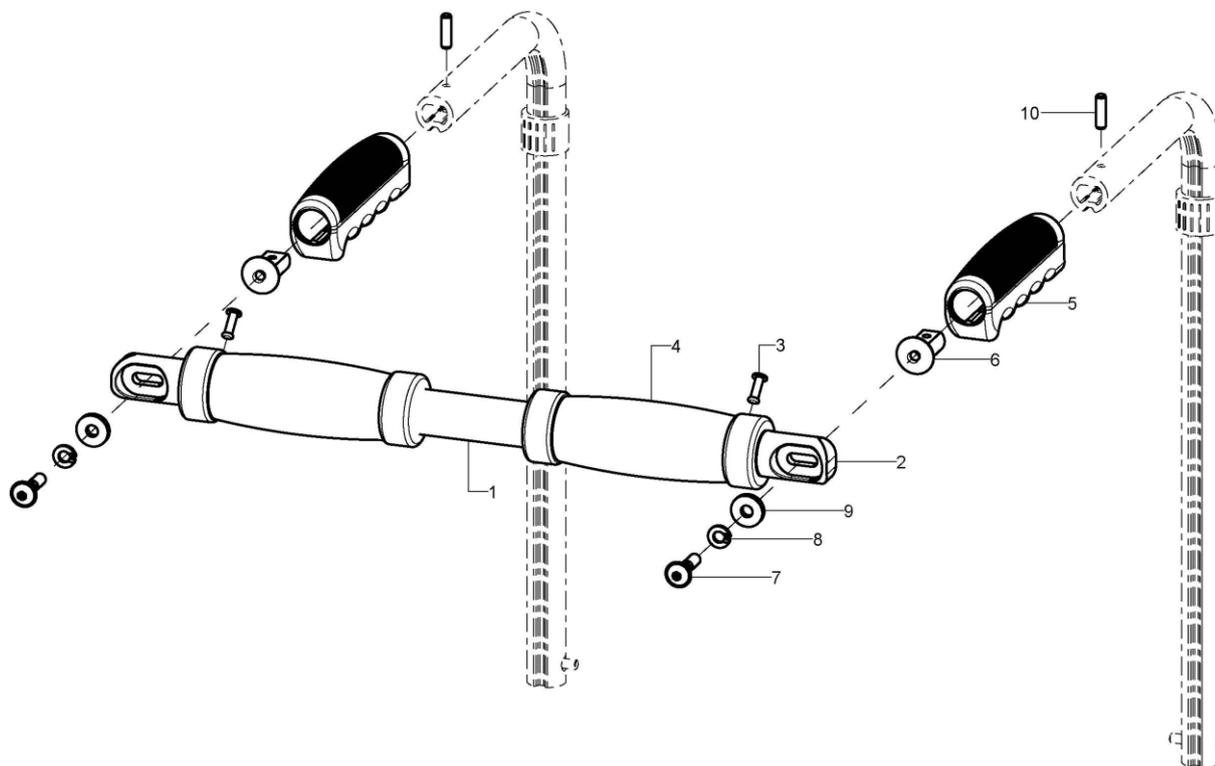


| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|----------|--------|------------|---|---|
| 1-4+6-11 | 1 | 6550 | Schiebestange kpl. | SB, Farbe, Schiebegriff gerade - gekröpft |
| 1-4 | 1 | | Schiebestangenrohr | SB, Farbe |
| 2 | 2 | 655000 | Halter geschlossen | |
| 3 | 2 | | Blindniet F4x18 Al/St | |
| 4 | 2 | 655004 | Griffüberzug 125 mm | |
| 5 | 2 | 650020 | Handgriff PVC schwarz, gerade ohne Steg | Schiebegriff gerade |
| o.B. | 1 | 650018 | Handgriff mit Steg rechts - 26x40x112 schwarz | Schiebegriff gekröpft rechts |
| o.B. | 1 | 650019 | Handgriff mit Steg links - 26x40x112 schwarz | Schiebegriff gekröpft links |
| 6-10 | 2 | 65500199 | Montagezubehör Schiebestange | |
| 6 | 2 | 655003 | Profilrohr-Endstopfen Aluminium | |
| 7 | 1 | | Linsenflanschschraube mit Innensechskant M6x25 | |
| 8 | 1 | | Federring DIN 127 - A 6 | |
| 9 | 1 | | Scheibe DIN 7349 - 6,4 | |
| 10 | 1 | | Spannstift DIN 1481, \varnothing 4x16 - St., ISO8752EN28752 | |

Schiebebügel ausziehbar

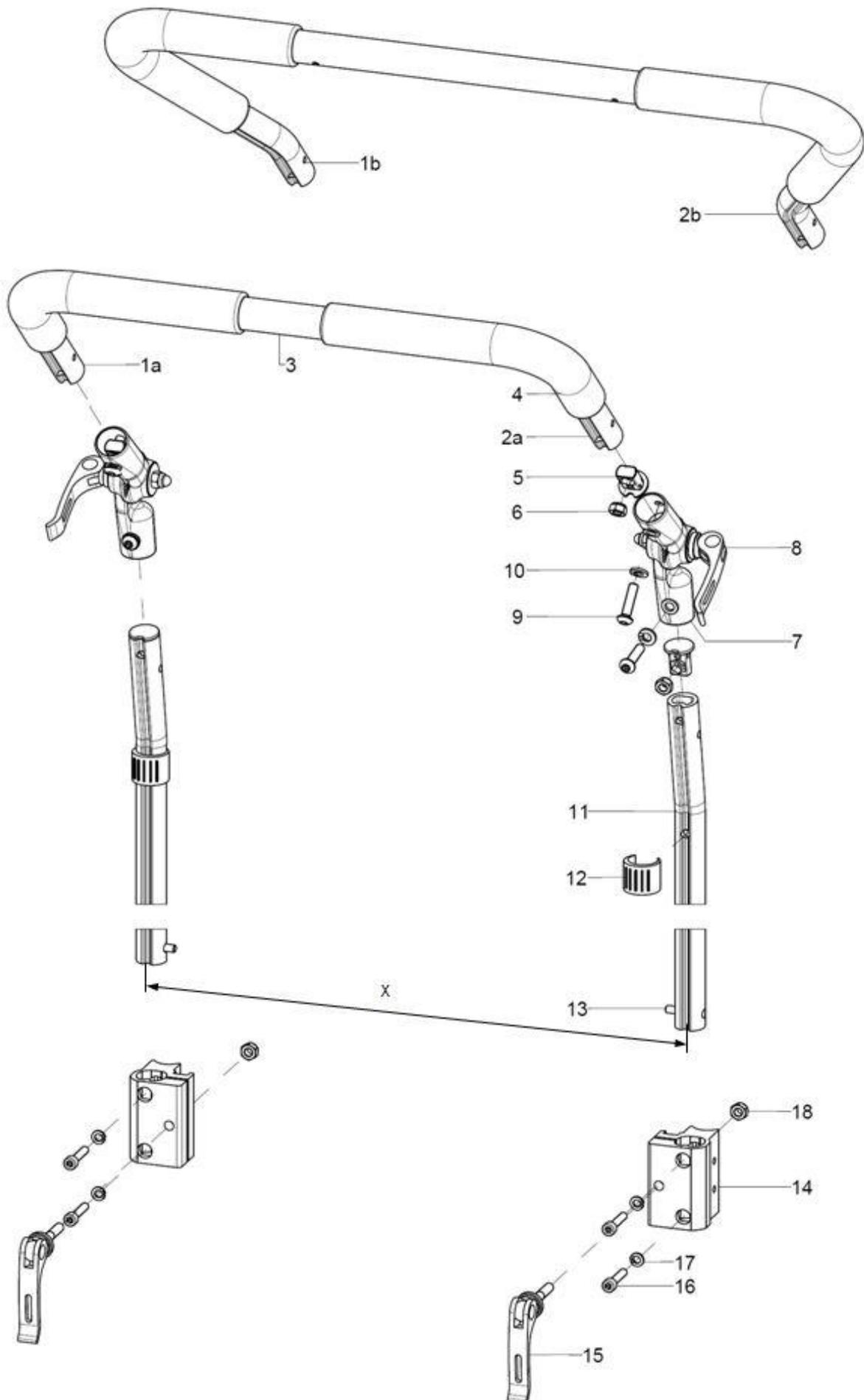

| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-----------|--------|--------------|---|-----------|
| 1-5+9-11 | 1 | 6532 | Schiebebügelgriff um 20 cm ausziehbar, 307° winkelverst., Metallgelenk, kpl. | SB, Maß X |
| 1a+2a+3-4 | 1 | 653001 | Schiebebügelgriff 90° vormontiert, Bei SB40 – 46 wenn Schiebegriffklemmhalter am Rückenrohr montiert ist. | SB, Maß X |
| 1b+2b+3+4 | 1 | 653002 | Schiebebügel gekröpft vormontiert | SB, Maß X |
| 1a | 1 | 653009 | Bügelschiebegriff, Biegeteil- Pr 20x150x150, links | |
| 1b | 1 | 653006 | Schiebebügelgriffhälfte links | |
| 2a | 1 | 653010 | Bügelschiebegriff, Biegeteil- Pr 20x150x150, rechts | |
| 2b | 1 | 653007 | Schiebebügelgriffhälfte rechts | |
| 3 | 1 | 653004 | Stahlrohr inkl. Nieten | SB, Maß X |
| 4 | 2 | 653005 | Rohrüberzug - Gummi 260 mm | |
| 5+6 | 4 | 653406 | Stopfen für Mutter M6 inkl. Sechskantmutter | |
| 6 | 4 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 7-10 | 2 | 652220 | Winkelverstellelement Metall 307° kpl. mit Exzenterspanner und Montagezubehör | |
| 8 | 2 | 652224 | Exzenterspanner Länge 35 mm M6x20, schwarz (inkl. Feder, Hutmutter, Scheibe, Hülse) | |
| 9 | 2 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x25 | |
| 10 | 2 | | Federring DIN 127 - A 6 | |
| 11 | 2 | 653202 | Profilrohr Stütze 200 | |
| 12 | 2 | 046350200010 | Klemmschalengleiter schwarz, Nenn-ø 20-22 | 10 er Set |
| 13 | 2 | 650160 | Stativfeder für Schiebegriffsicherung | 10er Set |
| 14-18 | 2 | 650061 | Halter Schiebereglergriff ohne Nut | |
| 15 | 1 | 041340603510 | Exzenterspanner Länge 35 mm M6x20, schwarz | |
| 16 | 2 | | Zylinderschraube DIN 912 M5x25 | |
| 17 | 2 | | Federring DIN 127 - A 5 | |
| 18 | 1 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |


Seitenpelotten ab RH35

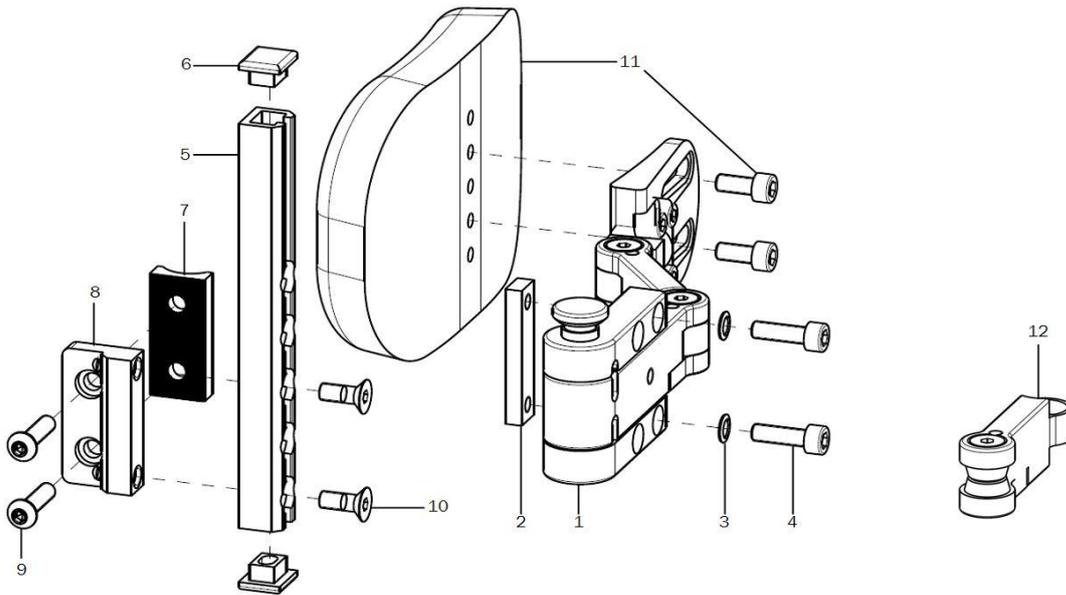

| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|---------|--------|------------|--|-----------------------|
| 1 | 1 | 685802 | Halterung abklappbar Größe 2 für Seitenpelotte, rechts | |
| o.B. | 1 | 685801 | Halterung abklappbar Größe 2 für Seitenpelotte, links | |
| o.B. | 1 | 685702 | Halterung abklappbar Größe 1 für Seitenpelotte, rechts | Bis 35kg |
| o.B. | 1 | 685701 | Halterung abklappbar Größe 1 für Seitenpelotte, links | Bis 35kg |
| 2-10 | 1 | 685810 | Halterungsset für Anbau Seitenpelotten | Größe 1 oder 2 |
| 2 | 1 | | Gewindeplatte M6 | Bei Halterung Größe 2 |
| altern. | 1 | | Gewindeplatte UNF | Bei Halterung Größe 1 |
| 3 | 2 | | Sicherungsscheibe S6 - FST | |
| 4 | 2 | | Zylinderschraube DIN 912 M6x20 | |
| altern. | 2 | | Zylinderschraube ä DIN 912 - UNF10-32x16 - 8.8 | Bei Halterung Größe 1 |
| 5 | 1 | | C-Schiene | |
| 6 | 2 | | Bremsschienen-Endstopfen | |
| 7 | 1 | | Halbschale 45 R10 | |
| 8 | 1 | | Pelottenanbindung Std. | |
| 9 | 2 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x25 | |
| 10 | 2 | | Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 M6x16 | |
| 11 | 1 | 685804 | Polster Seitenpelotte 15x10cm, schwarz, inkl. Schrauben | Bei Halterung Größe 2 |
| o.B. | 1 | 685805 | Polster Seitenpelotte 18x13cm, schwarz, inkl. Schrauben | Bei Halterung Größe 2 |
| o.B. | 1 | 685704 | Polster Seitenpelotte 15x2,5cm, schwarz, inkl. Schrauben | Bei Halterung Größe 1 |
| o.B. | 1 | 685705 | Polster Seitenpelotte 10x7cm, schwarz, inkl. Schrauben | Bei Halterung Größe 1 |
| o.B. | 1 | 685706 | Polster Seitenpelotte 10x9cm, schwarz, inkl. Schrauben | Bei Halterung Größe 1 |
| 12 | 1 | 685703 | Verlängerungsgelenk (3,8cm) für Halterung Größe 1 | Bei Halterung Größe 1 |
| o.B. | 1 | 685803 | Verlängerungsgelenk (5,5cm) für Halterung Größe 2 | Bei Halterung Größe 2 |


Kopfstütze

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <p>Modell 1</p> <p>Nr. 21</p> | <p>Modell 3</p> <p>Nr. 23</p> | <p>Modell 5</p> <p>Nr. 25</p> |
| <p>Modell 2</p> <p>Nr. 22</p> | <p>Modell 4</p> <p>Nr. 24</p> | <p>Modell 6</p> <p>Nr. 26</p> |
| <p>muschelförmig</p> | <p>bogenförmig</p> | <p>4-Bügelform</p> |

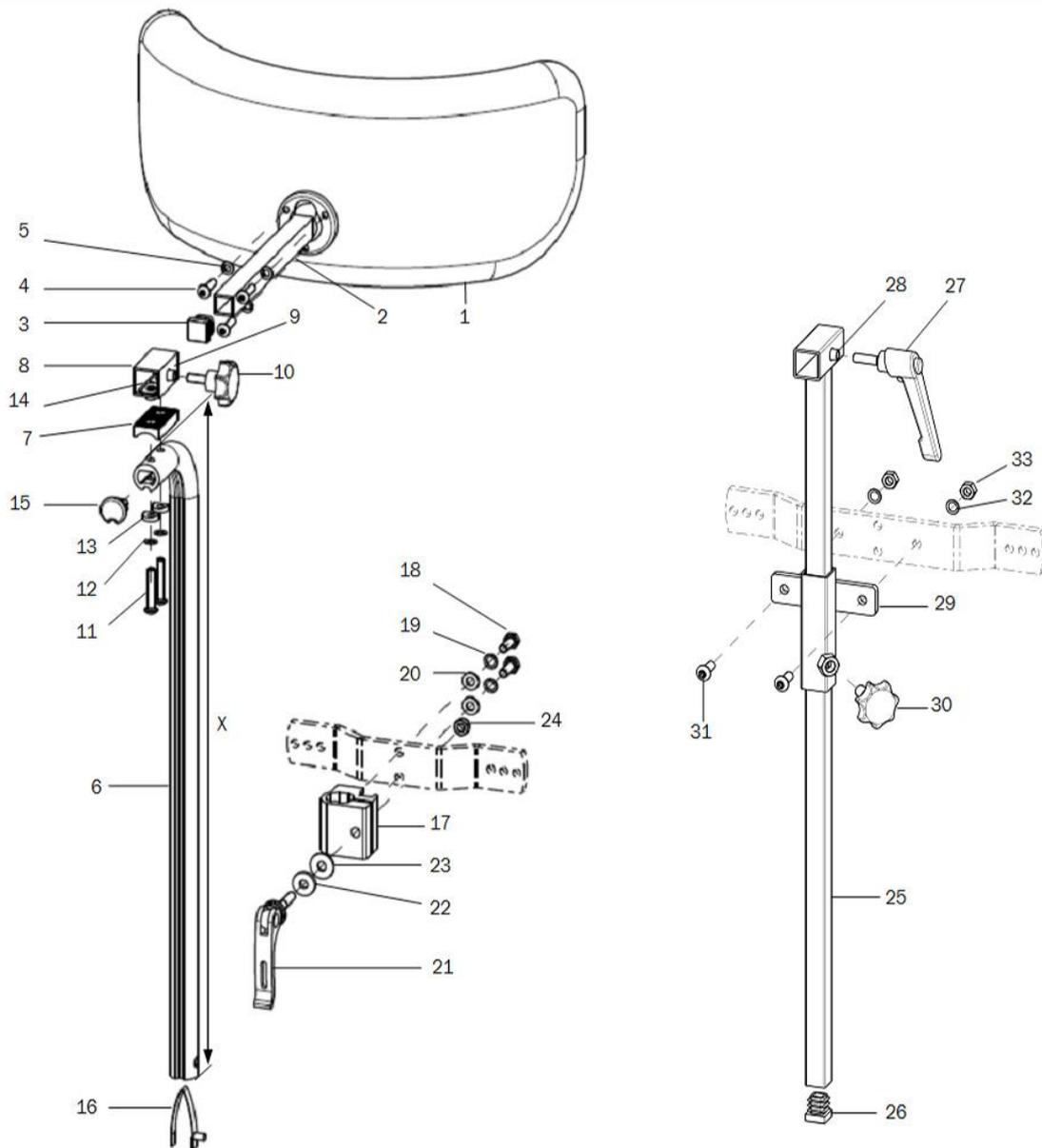


| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|--------------|---------------|-------------------|---|-----------------------|
| 1-5 | 1 | 686031 | Kopfstützenpolster Modell 1, 213x145 mm muschelförmig kpl. | Nr.21 |
| altern. | 1 | 686032 | Kopfstützenpolster Modell 2, 220x189 mm muschelförmig kpl. | Nr.22 |
| altern. | 1 | 686033 | Kopfstütze Modell 3, 225x100 bogenförmig kpl. | Nr.23 |
| altern. | 1 | 686034 | Kopfstütze Modell 4, 300x150 bogenförmig kpl. | Nr.24 |
| altern. | 1 | 686035 | Kopfstütze Modell 5, 230x120, 4-Bügelform kpl. | Nr.25 |
| altern. | 1 | 686036 | Kopfstütze Modell 5, 270x140, 4-Bügelform kpl. | Nr.26 |
| 2 | 1 | | Kopfstützen-Anbindung 4 kt - Rohr 15x15 | |
| 3 | 1 | | Stopfen mit Lamellen für Vierkantrohre, schwarz, 15x15 | |
| 4 | 3 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M5x20 | |
| 5 | 3 | | Federring DIN 127 - A 5 | |
| 6-16 | 1 | 686007 | Kopfstützenhalter kpl., für Profilrohr | Maß X |
| 6 | 1 | 686005 | Kopfstützenhalter 475 mm | |
| o.B. | 1 | 686008 | Kopfstützenhalter 675 mm | |
| 7-14 | 1 | 686009 | Klemmrohr, 4kt 20x20x1,5x40 mit Montagezubehör und Sterngriff | |
| 7 | 1 | | Halbschale R10, 20x8,5x40 | |
| 8 | 1 | | Klemmrohr, 4kt 20x20x1,5x40 | |
| 9 | 1 | | Anschweißmutter C - M6x7,5 | |
| 10 | 1 | | 7-Sterngriff ø32 - M6x16 Außengewinde, schwarz | |
| 11 | 2 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M5x30 | |
| 12 | 2 | | Sicherungsscheibe S5 - FST | |
| 13 | 2 | | Sattelscheibe ø 12/5x2.5 | |
| 14 | 2 | | Anschweißmutter C - M5x7,5 | |
| 15 | 1 | 620105 | Stopfen für Profilrohr | |
| 16 | 1 | 650160 | Stativfeder für Schiebegriffsicherung | 10er Set |
| 17 | 1 | 650054 | Halter EH-Schiebegriff Pr 38x37x38 inkl. Montagezubehör | Montage an Stabstange |
| 18-24 | 1 | 68005499 | Montagezubehör Halter EH-Schiebegriff kpl. | |
| 18 | 2 | | Sechskantschraube DIN 933 - M6x16 | |
| 19 | 2 | | Sicherungsscheibe S6 - FST | |
| 20 | 2 | | Scheibe DIN 125 - A 6,4 | |
| 21 | 1 | 0413406035 10 | Exzentranspanner Länge 35 mm M6x20, schwarz | |
| 22 | 1 | | Scheibe DIN 7349 - 6,4 | |
| 23 | 1 | | Scheibe DIN 9021 - 6,4 | |
| 24 | 1 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 25-28 | | 686003 | Haltestange für Kopfstütze 500 vormontiert | |
| 25 | 1 | | Haltestange für Kopfstütze 500 | |
| 26 | 1 | | Stopfen mit Lamellen für Vierkantrohre, schwarz, 15x15 | |
| 27 | 1 | | Klemmhebel verstellbar M6x20, schwarz | |
| 28 | 1 | | Anschweißmutter C - M6x7,5 | |
| o.B. | 1 | | Ausgleichwinkel 20,L 16x16x1x38 | |
| 29-33 | 1 | 686004 | Stangenhalter für Kopfstütze inkl. Montagezubehör | Erst ab SB 24 |
| 30 | 1 | | 7-Sterngriff ø32 - M8x15 Außengewinde, schwarz | |
| 31 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x16 | |
| 32 | 1 | | Sicherungsscheibe S6 - FST | |
| 33 | 1 | | Sechskantmutter DIN 934 - M10 | |

Aktivseitenteil (nur für 7° Radsturz)

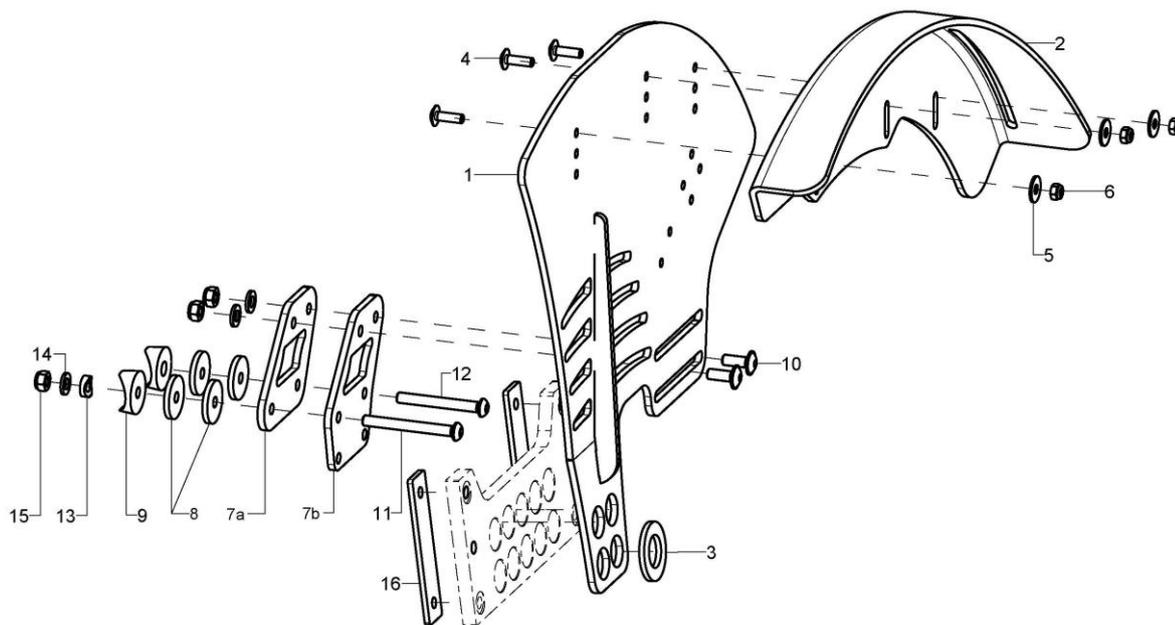


| Pos.: | Menge: | Artikelnr.: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|---------|--------|-------------|--|------------------------------|
| 1-16 | 1 | 500104 | Aktivseitenteil kpl. rechts | Farbe, Radgröße, Rahmengröße |
| o.B. | 1 | 500103 | Aktivseitenteil kpl. links | Farbe, Radgröße, Rahmengröße |
| 1 | 1+3 | 50012202 | Aktivseitenteil - rechts, 22" | Farbe |
| o.B. | 1+3 | 50012201 | Aktivseitenteil - links, 22" | Farbe |
| altern. | 1+3 | 50012402 | Aktivseitenteil - rechts, 24" | Farbe |
| o.B. | 1+3 | 50012401 | Aktivseitenteil - links, 24" | Farbe |
| 2 + 4-6 | 1 | 50220202 | Radschutz 22" rechts | |
| o.B. | 1 | 50220201 | Radschutz 22" links | |
| altern. | 1 | 50220302 | Radschutz 24" rechts | |
| o.B. | 1 | 50220301 | Radschutz 24" links | |
| 3 | 1 | | Scheibe DIN 125 - B 19 - St vz | |
| 4 | 3 | | Linsenflanschschraube mit Innensechskant M5x16 | |
| 5 | 3 | | Scheibe DIN 9021 - 5,3 | |
| 6 | 3 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M5 | |
| 7a-16 | 1 | 50010204 | Halter für Aktivseitenteil inkl. Montagezubehör | |
| 7b-16 | 1 | 50010207 | Halter für Aktivstetenteil bei RSVL inkl. Montagezubehör | Bei kurzem Rahmen mit RSVL |
| 8 | 4 | | Stützscheibe D25/d=6,2x3 | |
| 9 | 2 | | Sattelscheibe schwarz Nenn- ϕ 24/6 | |
| 10 | 2 | | Linsenflanschschraube mit Innensechskant M6x16 | |
| 11 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M5x55 | |
| 12 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M5x50 | |
| 13 | 1 | | Sattelscheibe ϕ 12/6x2,5 | |
| 14 | 3 | | Scheibe DIN 125 - A 6,4 | |
| 15 | 3 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 16 | 2 | | Distanzplatte für Lochplatte | |
| o.B. | 1 | | Distanzhülse für Bremsschiene 27mm | Bei kurzem Rahmen |
| o.B. | 1 | | Linsenflanschschraube mit Innensechskant M6x45 | |

Seitenteil Standard

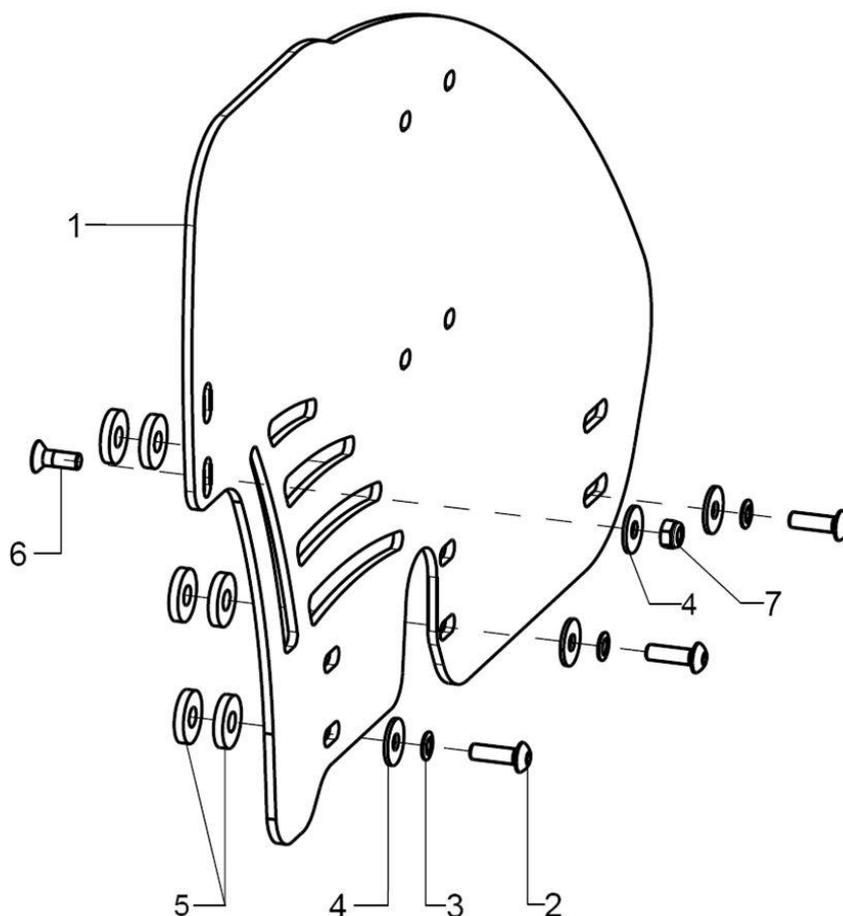


| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|---------|--------|------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 452300 | Seitenteil Standard-kurz | 358 (ST30-ST34) Farbe |
| altern. | 2 | 452401 | Seitenteil Standard-mittel | 418(ST36-ST40) Farbe |
| altern. | 2 | 452402 | Seitenteil Standard-lang | 456 (ST42-ST44) Farbe |
| 2-6 | 1 | 453899 | Montagezubehör Seitenteil XXL oder Standard | |
| 2 | 3 | | Linsenflanschschraube mit Innensechskant M5x16 | |
| 3 | 3 | | Sicherungsscheibe S5 - FST | |
| 4 | 4 | | Scheibe DIN 9021 - 5,3 | |
| 5 | 6 | | Scheibe DIN 7349 - 6,4 | |
| 6 | 1 | | Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 M5x14 | |
| 7 | 1 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M5 | |

Seitenteil XXL (nur für 3° Radsturz)

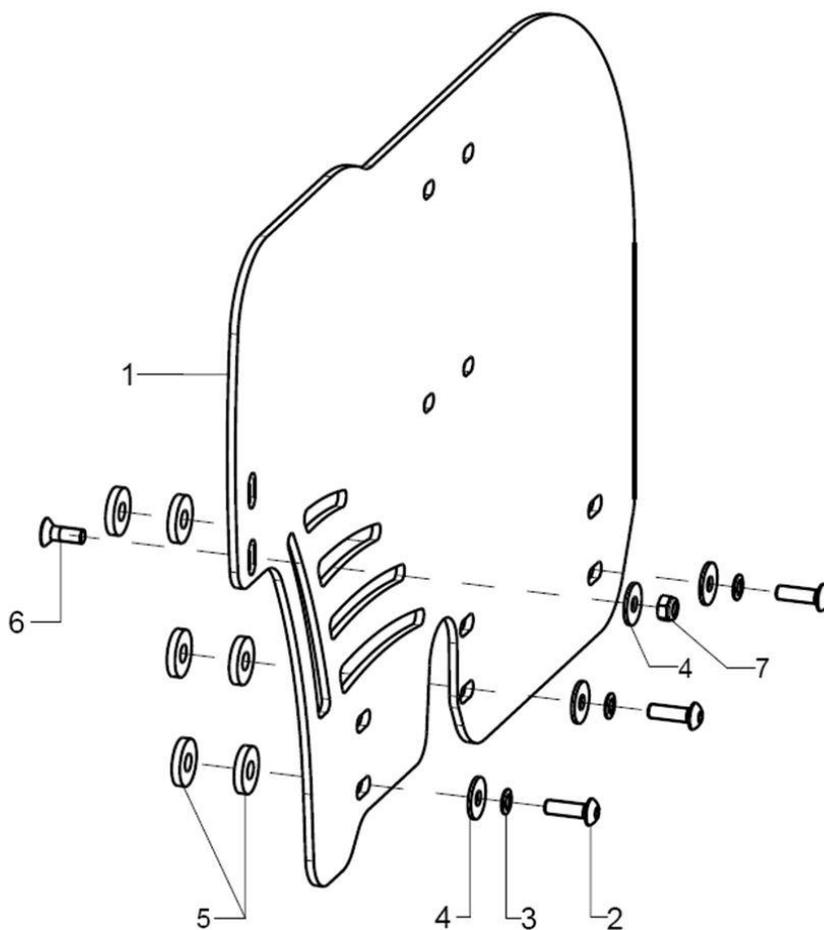


| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|--|-----------|
| 1 | 2 | 453801 | Seitenteil XXL | ST Farbe |
| 2-6 | 1 | 453899 | Montagezubehör Seitenteil XXL oder Standard | |
| 2 | 3 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M5x16 | |
| 3 | 3 | | Sicherungsscheibe S5 - FST | |
| 4 | 4 | | Scheibe DIN 9021 - 5,3 | |
| 5 | 6 | | Scheibe DIN 7349 - 6,4 | |
| 6 | 1 | | Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 M5x14 | |
| 7 | 1 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M5 | |

Armlehne 24cm lang, winkelverstellbar

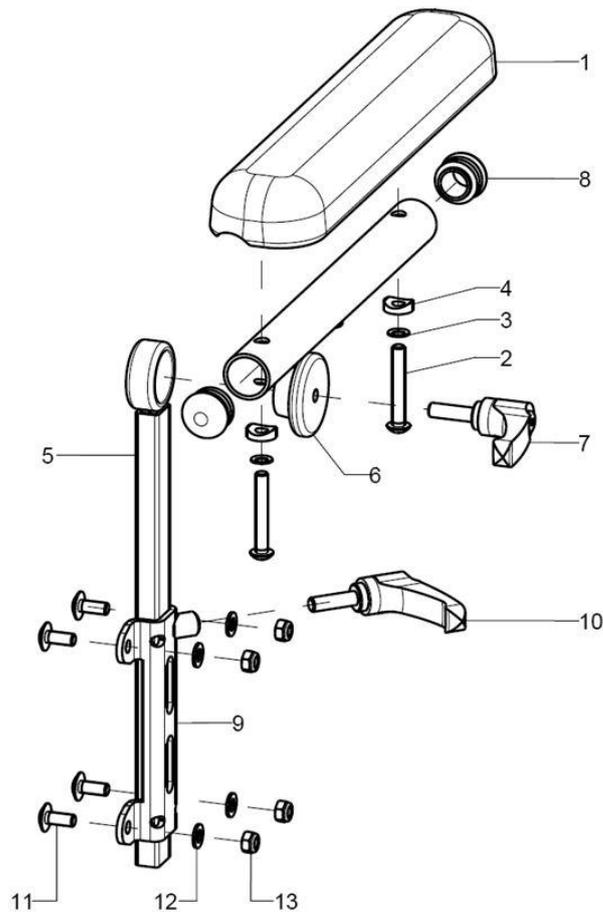


| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|--|--------------|
| 1-8 | 1 | 452203 | Armpolster 240 mm lang winkelverstellbar mit Armpolsterhalter (links/rechts angeben) | links/rechts |
| 1-4 | 1 | 450007 | Armauflage gerade schwarz 240x50x26,2xM5x164 | |
| 2 | 2 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M5x35 | |
| 3 | 2 | | Sicherungsscheibe S5 - FST | |
| 4 | 2 | | Sattelscheibe \varnothing 12/5x2.5 | |
| 5-8 | 1 | 45220304 | Armpolsterhalter rechts kpl. (Armlehnenstütze mit Konus, Armlehnenrohr, Klemmhebel, Stopfen) | |
| o.B. | 1 | 45220303 | Armpolsterhalter links kpl. (Armlehnenstütze mit Konus, Armlehnenrohr, Klemmhebel, Stopfen) | |
| 5 | 1 | 451511 | Armlehnenstütze mit Konusteil M, verchromt | |
| 6-8 | 1 | 45151202 | Armlehnenrohr rechts mit Konus V für Armlehne winkelverstellbar | |
| o.B. | 1 | 45151201 | Armlehnenrohr links mit Konus V für Armlehne winkelverstellbar | |
| 7 | 1 | | Klemmhebel verstellbar M6x20, schwarz | |
| 8 | 2 | | Stopfen mit Lamellen für Rohr \varnothing 20x1-2, schwarz | |
| 9-13 | 1 | 45220302 | Armlehnenaufnahme rechts, inkl. Armlehnenaufnahme rechts, inkl. Montagematerial und Klemmhebel | |
| o.B. | 1 | 45220301 | Armlehnenaufnahme links, inkl. Montagematerial und Klemmhebel | |
| 10 | 1 | | Klemmhebel verstellbar M6x20, schwarz | |
| 11 | 4 | | Linsenflanschschraube mit Innensechskant M5x12 | |
| 12 | 4 | | Scheibe DIN 125 - A 5,3 | |
| 13 | 4 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M5 | |

Radschutz Kunststoff (nur für 3° Radsturz)

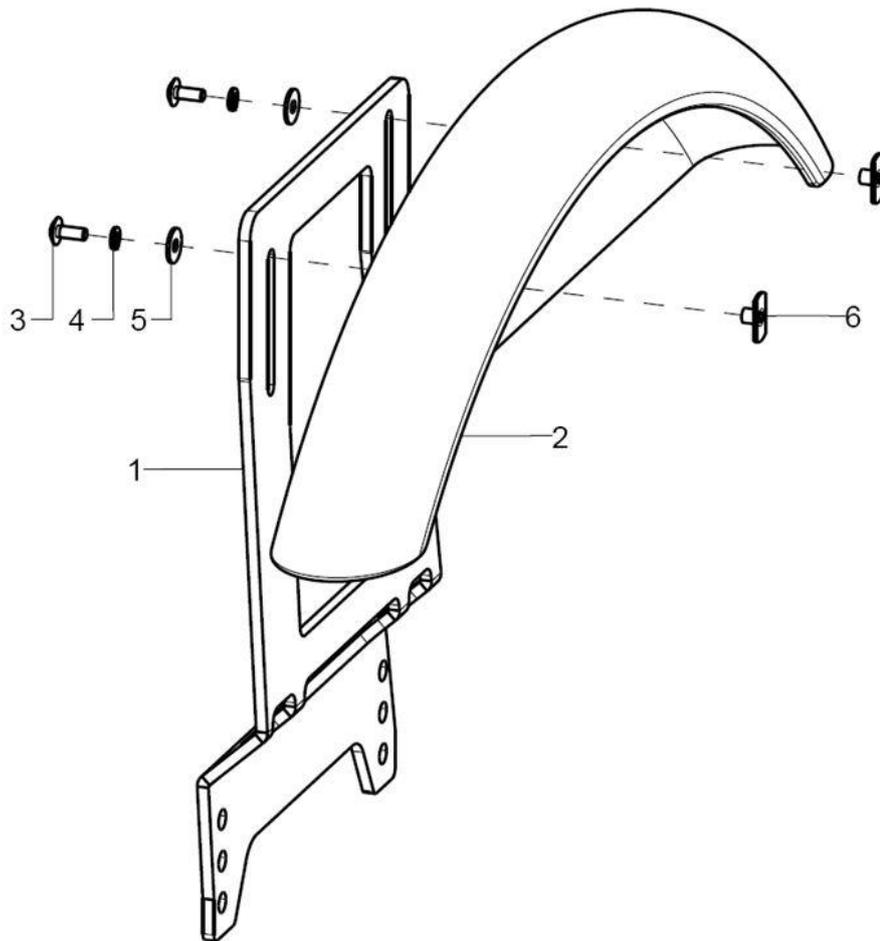

| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|--|---------------------|
| 1-6 | 1 | 5201 | Radschutz Kunststoff kpl. | Farbe, rechts/links |
| 1 | 1 | 50010202 | Radschutzhalter rechts für Kunststoffradschutz bei Vario inkl. Montagezubehör) | Farbe |
| o.B. | 1 | 50010201 | Radschutzhalter links für Kunststoffradschutz bei Vario inkl. Montagezubehör) | Farbe |
| 2-6 | 1 | 520002 | Radschutz groß inkl. Montagezubehör | |
| 3 | 2 | | Linsenflanschschraube mit Innensechskant M4x10 | |
| 4 | 2 | | Federring DIN 127 - A 4 | |
| 5 | 2 | | Scheibe DIN 9021 - 4,3 | |
| 6 | 2 | | Anschweißmutter - C - M4 - 5 | |

Lenkradadapter Aluminium

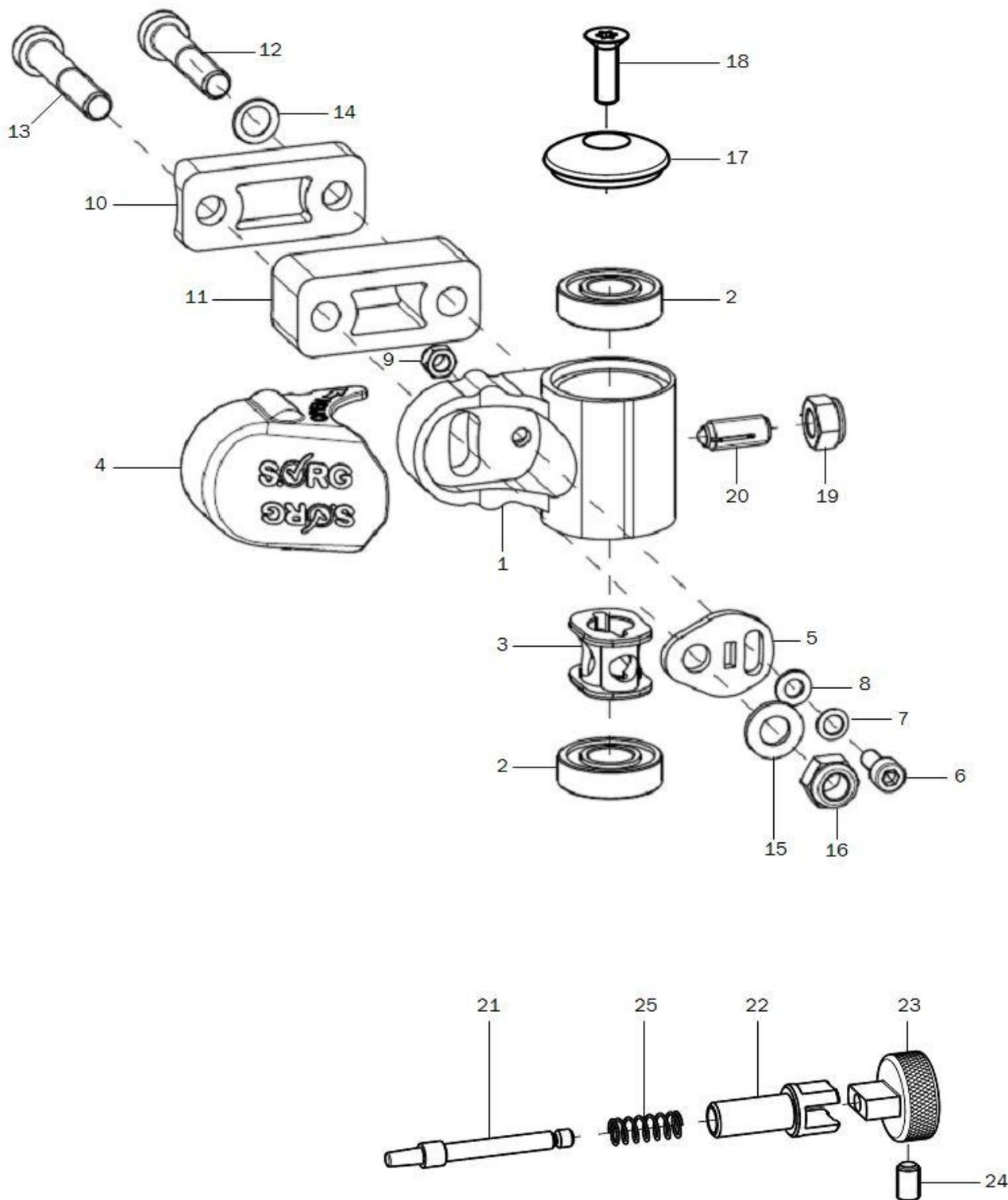


| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|---------|--------|------------|---|------------------------------|
| 1-9 | 2 | 280506 | Lenkradadapter Alu, Spurfixierung, kpl. | Spurfixierung,- Verriegelung |
| o.B. | 2 | 280500 | Lenkradadapter Alu, kpl. | |
| 1 | 1 | 280501 | Lenkradadapter Aluminium | |
| altern. | 1 | 280507 | Lenkradadapter Alu, Spurfixierung, | Spurfixierung,- Verriegelung |
| 2 | 2 | 200011 | Rillenkugellager ø28/12 6001z | |
| 3 | 1 | 280504 | Dämpferelement | |
| 4 | 1 | 280030 | Abdeckkappe | |
| 5 | 1 | 280503 | Exzenterscheibe | |
| 6 | 1 | | Zylinderschraube DIN 912 M5x12 | |

| | | | | |
|----------|---|--------|--|--|
| 7 | 1 | | Sicherungsscheibe S5 - FST | |
| 8 | 1 | | Scheibe DIN 125 - A 5,3 | |
| 9 | 1 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M5 | |
| 10+12-16 | 2 | 280510 | Montageset Lenkradadapter Alu | |
| 10-16 | 2 | 280511 | Montageset Lenkradadapter Aluminium für Verbreiterung 20mm | |
| 10-16 | 2 | 280512 | Montageset Lenkradadapter Aluminium für Verbreiterung 40mm | |
| 10+12-16 | 2 | 280550 | Umbauset, Lenkradadapter Alu | Für Rahmenvers. mit Senkung f. Schrauben DIN7991 |
| 10-16 | 2 | 280551 | Umbauset, Lenkradadapter Alu für Verbreiterung 20mm | Für Rahmenvers. mit Senkung f. Schrauben DIN7991 |
| 10-16 | 2 | 280552 | Umbauset, Lenkradadapter Alu für Verbreiterung 40mm | Für Rahmenvers. mit Senkung f. Schrauben DIN7991 |
| 10 | 1 | 280502 | Halbschale LRAD – R12 | |
| 11 | 1 | 280513 | Spurverbreiterung 20mm | |
| altern. | 1 | 280514 | Spurverbreiterung 40mm | |
| 12 | 1 | | Zylinderschraube niedriger Kopf DIN 7984 - M8x40 | |
| altern. | 1 | | Zylinderschraube niedriger Kopf DIN 7984 - M8x60 | Spurverbreiterung 20mm |
| altern. | 1 | | Zylinderschraube niedriger Kopf DIN 7984 - M8x80 | Spurverbreiterung 40mm |
| altern. | 1 | | Senkschraube ähnl. DIN 7991 M8x45 | Umbauset |
| altern. | 1 | | Senkschraube ähnl. DIN 7991 M8x65 | Umbauset, Spurverbr. 20mm |
| altern. | 1 | | Senkschraube ähnl. DIN 7991 M8x85 | Umbauset, Spurverbr. 40mm |
| 13 | 1 | | Zylinderschraube niedriger Kopf DIN 7984 - M8x45 | |
| altern. | 1 | | Zylinderschraube niedriger Kopf DIN 7984 - M8x65 | Spurverbreiterung 20mm |
| altern. | 1 | | Zylinderschraube niedriger Kopf DIN 7984 - M8x85 | Spurverbreiterung 40mm |
| altern. | 1 | | Senkschraube ähnl. DIN 7991 M8x55 | Umbauset |
| altern. | 1 | | Senkschraube ähnl. DIN 7991 M8x75 | Umbauset, Spurverbr. 20mm |
| altern. | 1 | | Senkschraube ähnl. DIN 7991 M8x95 | Umbauset, Spurverbr. 40mm |
| 14 | 1 | | Sicherungsscheibe S8 - FST | |
| 15 | 1 | | Scheibe DIN 125 - A 8,4 | |
| 16 | 1 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M8 | |
| 17-18 | 1 | 282107 | Kappe 35x10, schwarz eloxiert inkl. Montageschraube | Aluminium Lenkradadapter |
| 18 | 1 | | Senkschraube mit Torx ISO 14581 M6x20 vz, schwarz | |
| 19 | 1 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M8 | |
| 20 | 2 | 285103 | Federndes Druckstück M8 kpl. | Spurfixierung |
| 21-25 | 1 | 285003 | Spurverriegelung kpl. | Spurverriegelung |
| 21 | 1 | | Fixierstift | Spurverriegelung |
| 22 | 1 | | Aufnahme Fixierstift | Spurverriegelung |
| 23 | 1 | | Zugknopf Lenkradverriegelung | Spurverriegelung |
| 24 | 1 | | Gewindestift mit Innensechskant DIN 913, M5x8 | |
| 25 | 1 | | Druckfeder 0,55x5,5x23,7 | |


Achtung: Bei der Umrüstung von Kunststoff auf Aluminium-Lenkradadapter bitte paarweise bestellen.

Lenkradgabel

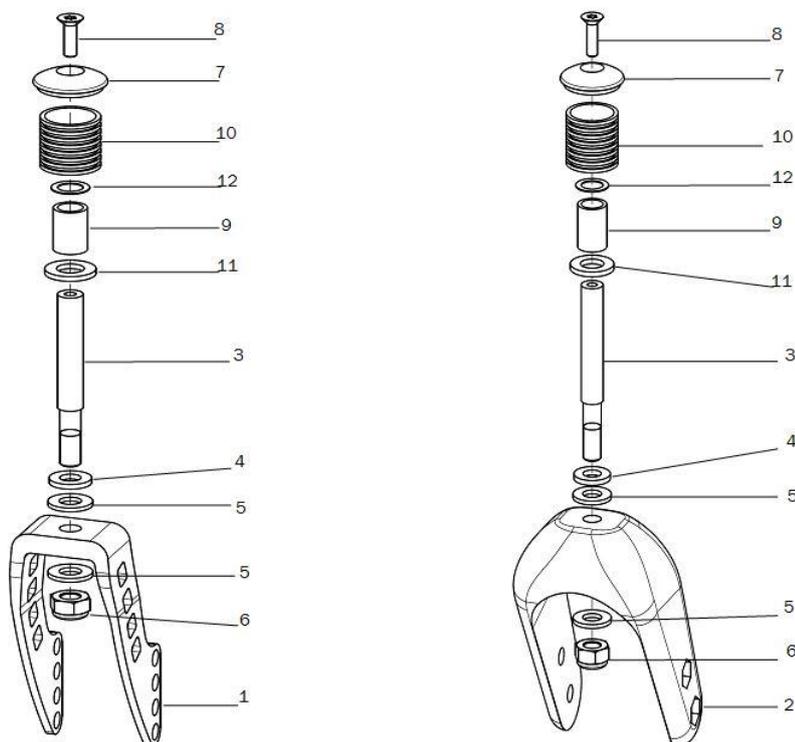

| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 2841 | Lenkradgabel Alu 164x45 | |
| o.B. | 2 | 2842 | Lenkradgabel Alu 126x45 | |
| o.B. | 2 | 2843 | Lenkradgabel Alu 100x45 | |
| 2 | 2 | 2823 | Lenkradgabel groß, PU, 60x130 | |
| o.B. | 2 | 2822 | Lenkradgabel klein, PU, 32x120 | |
| 3 | 2 | 282104 | Lenkachse \varnothing 12x65,1 | |
| o.B. | 2 | 285101 | Lenkachse 65mm für Spurfixierung | |
| o.B. | 2 | 285001 | Lenkachse 65 für Verriegelung | |
| o.B. | 2 | 282105 | Lenkachse 90, \varnothing 12x89,8 | |
| o.B. | 2 | 285102 | Lenkachse 90 für Spurfixierung | |
| o.B. | 2 | 285002 | Lenkachse 90 für Verriegelung | |
| 4-6 | 2 | 282120 | Montageset Lenkradachse an Lenkradgabel Alu (Scheiben, 6-kt Mutter) | |
| 4 | 1 | | Scheibe DIN 1440 - 10x20x2,5 | |
| 5 | 2 | | Scheibe DIN 125 - A 10,5 | |
| 6 | 1 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M10 | |
| 7-8 | 2 | 282107 | Kappe 35x10, schwarz eloxiert inkl. Montageschraube | Aluminium Lenkradadapter |
| o.B. | 2 | 270005 | Kappe Rd 32x10 | Stahl Lenkradadapter |
| 8 | 2 | | Senkschraube mit Torx ISO 14581 M6x20 vz, schwarz | |
| 9-12 | 2 | 282123 | Montagezubehör Lenkradachse 90mm | |
| 9 | 1 | | Distanzbuchse Ro 16x2x22 | |
| 10 | 1 | | PVC-Schlauch 25x4 | |
| 11 | 1 | | Scheibe DIN 125 - B 13 - St vz | |
| 12 | 1 | | Passscheibe DIN 988 - 12x18x0,5 | |

Lenkradgabel mit Steckachse

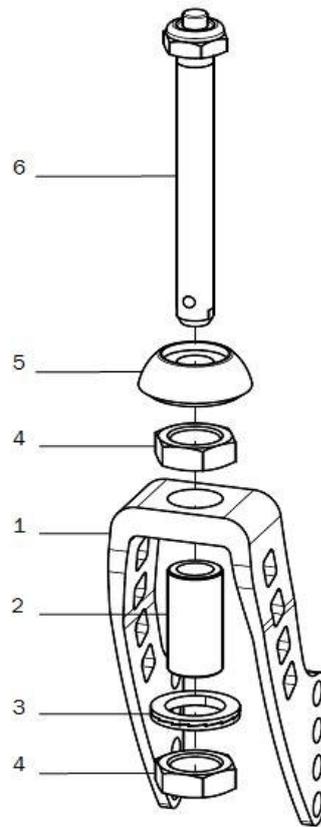


| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|--|-----------|
| 1 | 2 | 272114 | Lenkradgabel 164x45 für Steckachse | |
| o.B. | 2 | 272113 | Lenkradgabel 126x45 für Steckachse | |
| o.B. | 2 | 272112 | Lenkradgabel 100x45 für Steckachse | |
| 2 | 1 | 272102 | Einschraubadapter M18x1 ø12; 35 mm | |
| 3-4 | 2 | 272104 | Montagezubehör Einschraubadapter | |
| 3 | 1 | | Sicherungsscheibe Nord-Lock M18 | |
| 4 | 2 | | Mutter M18x1 SW24 | |
| 5 | 1 | 272101 | Distanzkappe 37x16,2, Alu schwarz eloxiert | |
| 6 | 1 | 272103 | Steckachse ø 12x85 mm | |

Lenkräder


| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|--|---|
| o.B. | 2 | 2812 | Lenkrad 4 Zoll PU | |
| o.B. | 2 | 2804 | Lenkrad 4 Zoll Vollgummi | |
| o.B. | 2 | 2820 | Lenkrad 4 Zoll PU transparent mit Leuchtdioden | |
| o.B. | 2 | 2835 | Lenkrad 4 Zoll Vollgummi schwarz, mit Alufelge | |
| o.B. | 2 | 2805 | Lenkrad 5 Zoll PU | |
| o.B. | 2 | 2809 | Lenkrad 5 Zoll Soft - Vollgummi | |
| o.B. | 2 | 2834 | Lenkrad 5 Zoll PU transparent mit Leuchtdioden | |
| o.B. | 2 | 2836 | Lenkrad 5 Zoll Vollgummi schwarz, mit Alufelge | |
| o.B. | 2 | 2806 | Lenkrad ø 140 mm soft, Nabenbreite 46 | |
| o.B. | 2 | 2803 | Lenkrad 6 Zoll PU | |
| o.B. | 2 | 2811 | Lenkrad 6 Zoll Vollgummi | |
| o.B. | 2 | 2808 | Lenkrad 6 Zoll luftbereift | |
| o.B. | 2 | 289999 | Montagezubehör Lenkrad an Lenkradgabel (Zylinderschraube, Scheiben DIN 125,Distanzbuchsen, Sechskantmutter DIN 985 M8) | Angepasst an Lenkrad / Lenkradgabel Kombination |

Lochplatte für Antriebsrad

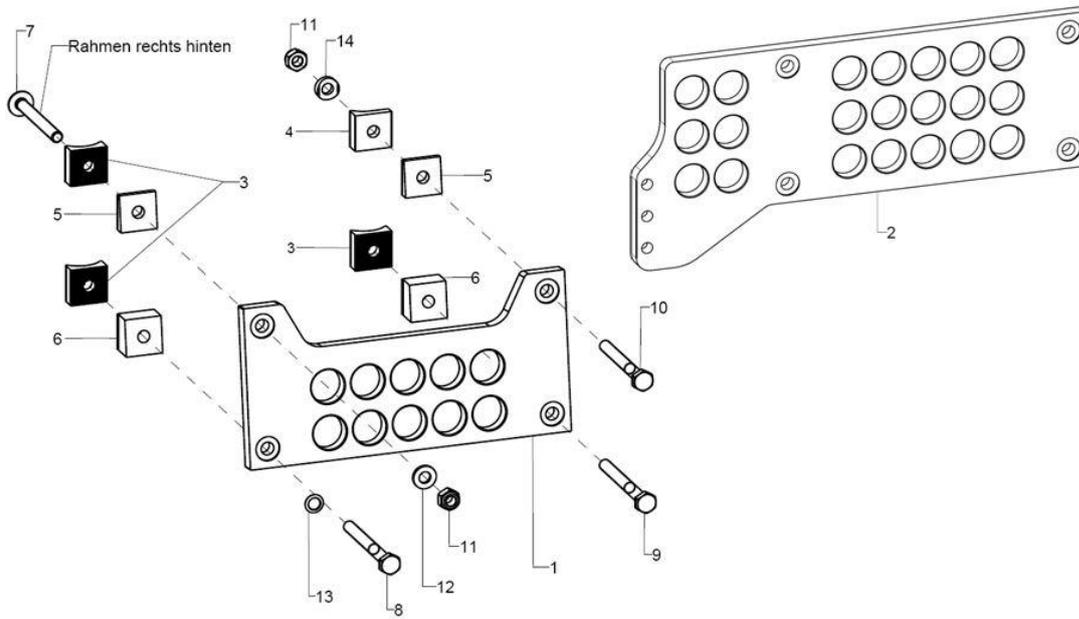


| Pos.: | Menge: | Artikelnr.: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|---------|--------|-------------|---|-----------|
| 1+3-14 | 2 | 207101 | Lochplatte für Antriebsrad mit 3° Sturz kpl. | |
| 1+3-14 | 2 | 207102 | Lochplatte für Antriebsrad mit 7° Sturz kpl. | |
| 2-14 | 1 | 207110 | Lochplatte RSV für Antriebsrad mit 3° Sturz kpl. rechts | |
| o.B. | 1 | 207111 | Lochplatte RSV für Antriebsrad mit 3° Sturz kpl. links | |
| 2-13 | 1 | 207112 | Lochplatte RSV für Antriebsrad mit 7° Sturz kpl. rechts | |
| o.B. | 1 | 207113 | Lochplatte RSV für Antriebsrad mit 7° Sturz kpl. links | |
| 1 | 1 | 20710101 | Lochplatte für Antriebsrad | |
| 2 | 1 | 20710502 | Lochplatte mit RSV rechts | |
| o.B. | 1 | 20710501 | Lochplatte mit RSV links | |
| 3 | 3 | | Halbschale 20, R12 | |
| 4 | 1 | 207108 | Halbschale 20x20x8,5 | |
| 5 | 2 | 207105 | Radsturzkeil 3° oben | |
| o.B. | 2 | 207107 | Radsturzkeil 7° oben | |
| 6 | 2 | 207109 | Radsturzkeil 3° unten | |
| o.B. | 2 | 207106 | Radsturzkeil 7° unten | |
| 5-14 | 1 | 20710201 | Montagezubehör – Lochplatte 3° Sturz | |
| 5-14 | 1 | 20710202 | Montagezubehör – Lochplatte 7° Sturz | |
| 7 | 1 | | Linsenflanschschrabe mit Innensechskant M6x55 | |
| altern. | 1 | | Sechskantschraube DIN 931 - M6x55 | |
| 8 | 1 | | Sechskantschraube DIN 931 - M6x60 | |
| 9 | 1 | | Sechskantschraube DIN 931 - M6x60 | |
| 10 | 1 | | Sechskantschraube DIN 931 - M6x55 | |
| 11 | 1 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 12 | 1 | | Scheibe DIN 125 - A 6,4 | |
| 13 | 1 | | Sicherungsscheibe S6 - FST | |
| 14 | 4 | | Sattelscheibe ø12/6x2,5 | |

Steckachsenfitting

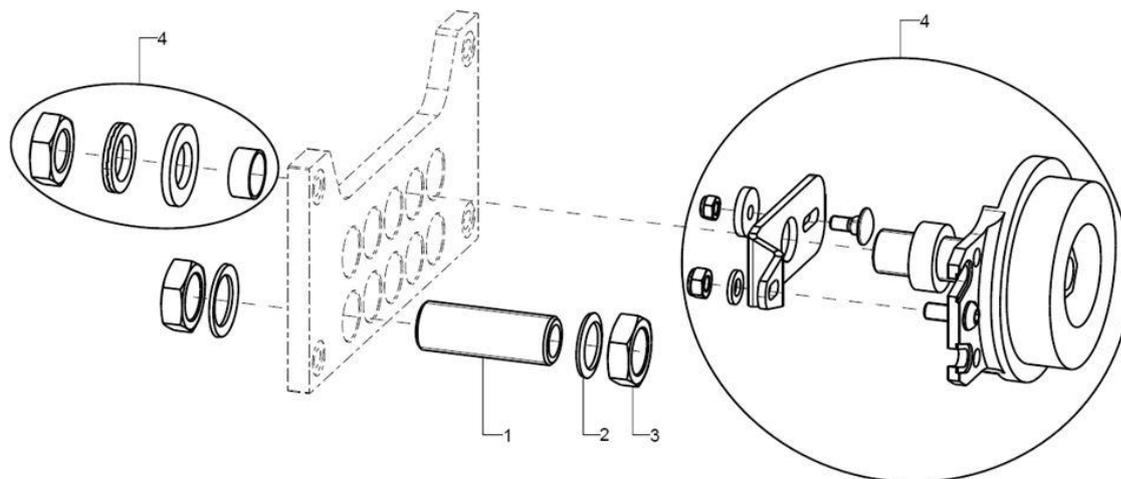


| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|---|--------------|
| 1-3 | 2 | 210018 | Einschraubadapter M18x1 d=12 inkl. Montagezubehör | |
| 2 | 2 | | Sicherungsscheibe S18 - FST | |
| 3 | 2 | | Mutter M18x1 SW24 | |
| 4 | 2 | 220005 | Trommelbremskörper kpl., inkl. Einschraubadapter und Gegenhalter | links/rechts |
| o.B. | 2 | 220013 | Trommelbremskörper bei LLR-TBR Rad, inkl. Einschraubadapter und Gegenhalter | links/rechts |

Antriebsräder

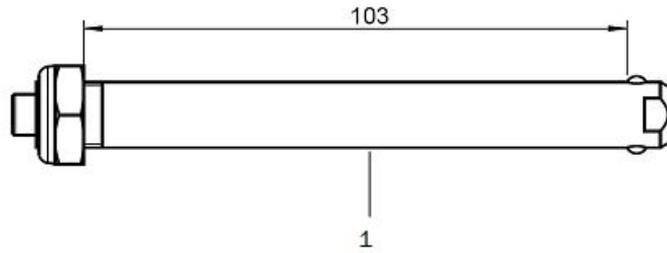


| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|---|---|
| o.B. | 2 | 212200 | Antriebsradfelge 22 Zoll/Standard-Nabe | |
| o.B. | 2 | 212400 | Antriebsradfelge 24 Zoll/Standard-Nabe | |
| o.B. | 2 | 222200 | Antriebsradfelge 22 Zoll/Trommelbrems-Nabe | |
| o.B. | 2 | 222400 | Antriebsradfelge 24 Zoll/Trommelbrems-Nabe | |
| o.B. | 2 | 212240 | Profilradfelge 22 Zoll/Standard-Nabe und integr. Greifring | |
| o.B. | 2 | 212440 | Profilradfelge 24 Zoll/Standard-Nabe und integr. Greifring | |
| o.B. | 2 | 222240 | Profilradfelge 22 Zoll/Trommelbrems-Nabe und integr. Greifring | |
| o.B. | 2 | 222440 | Profilradfelge 24 Zoll/Trommelbrems-Nabe und integr. Greifring | |
| o.B. | 2 | 212277 | Leichtlaufradfelge 22 Zoll/Standard-Nabe mit Greifring | |
| o.B. | 2 | 212477 | Leichtlaufradfelge 24 Zoll/Standard-Nabe mit Greifring | |
| o.B. | 2 | 212281 | Leichtlaufradfelge 22 Zoll/Trommelbrems-Nabe, schwarz | |
| o.B. | 2 | 212481 | Leichtlaufradfelge 24 Zoll/Trommelbrems-Nabe, schwarz | |
| 1 | 2 | 210003 | Steckachse $\varnothing 12,0 \times 103$ mm für Standard-Nabe ab 5/2013 und Leichtlaufrad | |
| o.B. | 2 | 220001 | Steckachse $\varnothing 12,0 \times 123$ mm für Trommelbremsnabe | |
| o.B. | 2 | 200011 | Rillenkugellager $\varnothing 28/12$ 6001z | |
| o.B. | 2 | 210007 | Rillenkugellager $\varnothing 28/12,7$ 6001RS | Profil-Rad, Spider-Wheel, Standard-Nabe |
| o.B. | 2 | 210008 | Rillenkugellager $\varnothing 28,53/12,7$ | Antriebsrad Standard-Nabe |

Doppelgreifreifen Standard

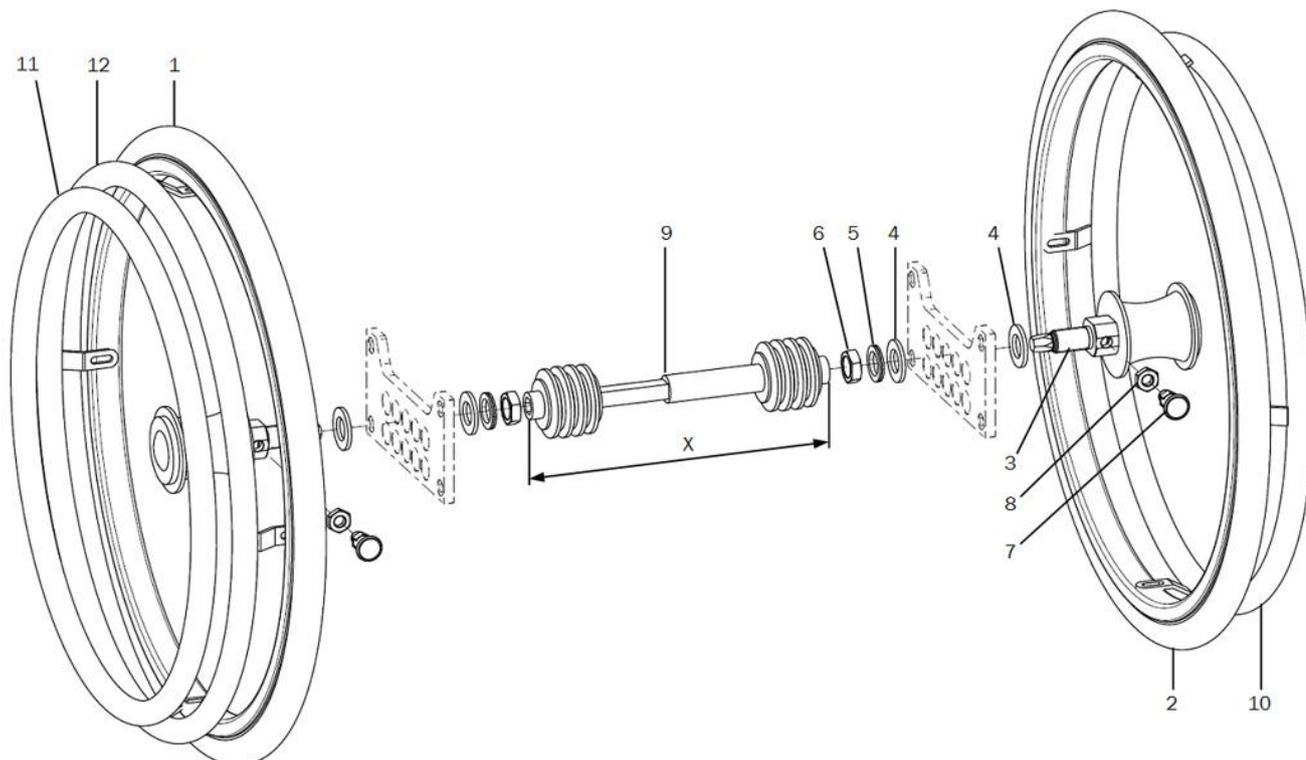

| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|--|--|
| 1-9 | 1 | 261403 | Doppelgreifringssystem 22" für Standard-Nabe inkl. Bremsanker, Einschraubadapter, Gegenhalter und Teleskopstange | SB |
| o.B. | 1 | 261405 | Doppelgreifringssystem 24" für Standard-Nabe inkl. Bremsanker, Einschraubadapter, Gegenhalter und Teleskopstange | SB |
| 1+3-9 | 1 | 261442 | 22" Doppelgreifringrad mit Standard-Nabe inkl. Steckachse, Antriebsseite | |
| o.B. | 1 | 261444 | 24" Doppelgreifringrad mit Standard-Nabe inkl. Steckachse, Antriebsseite | |
| 2-8 | 1 | 261443 | 22" Doppelgreifringrad mit Standard-Nabe inkl. Steckachse, Gegenseite | |
| o.B. | 1 | 261445 | 24" Doppelgreifringrad mit Standard-Nabe inkl. Steckachse, Gegenseite | |
| 3-8 | 1 | 261429 | Montagezubehör DGR | |
| 3 | 1 | | Einschraubadapter DGR Standard | |
| 4 | 1 | | Scheibe DIN 125 - B 19 - St vz | |
| 5 | 1 | | Sicherungsscheibe Nord-Lock M18 | |
| 6 | 1 | | Mutter M18x1 SW24 | |
| 7 | 1 | | Zugschnapper \varnothing 6/M10x1x31 mit Arretierung | |
| 8 | 1 | | Sechskantmutter DIN 934 - M10 | |
| 9 | 1 | 2614XX | Teleskoprohr für Doppelgreifring | SB, siehe Tabelle |
| 10 | 1 | 261430 | Greifring 20" für Gegenseite | |
| o.B. | 1 | 261431 | Greifring 22" für Gegenseite | SB, siehe Tabelle oben |
| o.B. | 1 | 261432 | Greifring 24" für Gegenseite | |
| 11 | 1 | 322008 | Greifringüberzug 20" Silikon innen | |
| o.B. | 1 | 322208 | Greifring-Überzug Silikon schwarz \varnothing 388 | DGR 22" innen |
| o.B. | 1 | 322002 | Greifring-Überzug Silikon schwarz \varnothing 442 | Profilrad 20"/ Greifring 20" hoch / 22" std./ DGR 24"innen |
| 12 | 1 | 322005 | Greifring-Überzug Silikon schwarz \varnothing 425 | Leichtlaufrad „D“ 20“, DGR 20“ außen |
| o.B. | 1 | 322203 | Greifringüberzug 22" Silikon außen | |
| o.B. | 1 | 322405 | Greifring-Überzug Silikon schwarz \varnothing 514 | Leichtlaufrad „D“ 24“/ DGR 24“ außen |

Doppelgreifreifen Trommelbremse

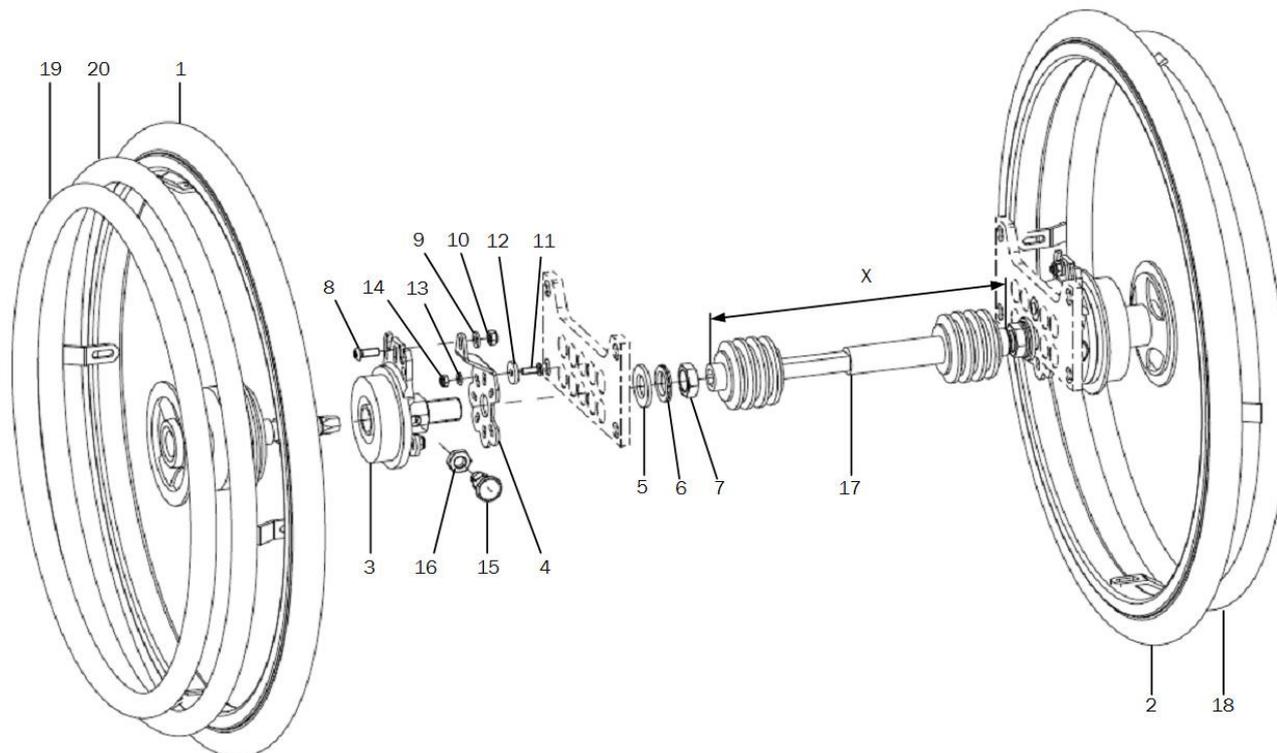

| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|---|-------------------------|
| 1-17 | 1 | 261404 | Doppelgreifringssystem 22" für TBR-Nabe inkl. Bremsanker, Einschraubadapter, Gegenhalter und Teleskopstange | SB |
| o.B. | 1 | 261406 | Doppelgreifringssystem 24" für TBR-Nabe inkl. Bremsanker, Einschraubadapter, Gegenhalter und Teleskopstange | SB |
| 1 | 1 | 261452 | 22" Doppelgreifringrad mit Trommelbremse, Luftbereifung, Antriebsseite | Anbau rechts oder links |
| o.B. | 1 | 261454 | 24" Doppelgreifringrad mit Trommelbremse Luftbereifung, Antriebsseite | Anbau rechts oder links |
| 2 | 1 | 261453 | 22" Doppelgreifringrad mit Trommelbremse inkl. Steckachse, Gegenseite | Anbau rechts oder links |
| o.B. | 1 | 261455 | 24" Doppelgreifringrad mit Trommelbremse inkl. Steckachse, Gegenseite | Anbau rechts oder links |
| 3-16 | 1 | 261428 | Montagezubehör DGR Trommelbremse | Anbau rechts oder links |
| 3 | 1 | | Bremsanker inkl. Einschraubadapter Fitting DGR | |
| 4 | 1 | 220012 | Gegenhalter TRB DGR | Anbau rechts oder links |
| 5 | 1 | | Scheibe DIN 125 - B 19 - St vz | |
| 6 | 1 | | Sicherungsscheibe Nord-Lock M18 | |
| 7 | 1 | | Mutter M18x1 SW24 | |
| 8 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x16 | |
| 9 | 1 | | Scheibe DIN 125 - A 6,4 | |
| 10 | 1 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |
| 11 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M5x14 | |
| 12 | 1 | | Scheibe, ø18/5,2x3 für Bremsgegenhalter DGR, schwarz | |
| 13 | 1 | | Scheibe DIN 125 - A 5,3 | |
| 14 | 1 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M5 | |
| 15 | 1 | | Zugschnapper ø 6/M10x1x31 mit Arretierung | |
| 16 | 1 | | Sechskantmutter DIN 934 - M10 | |
| 17 | 1 | 2614XX | Teleskoprohr für Doppelgreifring | SB, siehe Tabelle |
| 18 | 1 | 261430 | Greifring 20" für Gegenseite | |
| o.B. | 1 | 261431 | Greifring 22" für Gegenseite | SB, siehe Tabelle oben |
| o.B. | 1 | 261432 | Greifring 24" für Gegenseite | |
| 19 | 1 | 322008 | Greifringüberzug 20" Silikon innen | |
| o.B. | 1 | 322208 | Greifring-Überzug Silikon schwarz ø388 | DGR 22" innen |

| | | | | |
|------|---|--------|--|--|
| o.B. | 1 | 322002 | Greifring-Überzug Silikon schwarz ø442 | Profilrad 20"/ Greifring 20" hoch / 22" std./ DGR 24"innen |
| 20 | 1 | 322005 | Greifring-Überzug Silikon schwarz ø425 | Leichtlaufgrad „D“ 20“, DGR 20“ außen |
| o.B. | 1 | 322203 | Greifringüberzug 22“ Silikon außen | |
| o.B. | 1 | 322405 | Greifring-Überzug Silikon schwarz ø514 | Leichtlaufgrad „D“ 24“/ DGR 24“ außen |

Teleskopstange

| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|--------------|---------------|-------------------|-----------------------------|------------------|
| o.B. | 1 | 261412 | Teleskopstange 195 – 235 mm | SB28 |
| o.B. | 1 | 261413 | Teleskopstange 220 – 275 mm | SB30 + 32 |
| o.B. | 1 | 261414 | Teleskopstange 255 – 315 mm | SB34 + 36 |
| o.B. | 1 | 261415 | Teleskopstange 295 – 370 mm | SB38 - 42 |
| o.B. | 1 | 261416 | Teleskopstange 350 – 460 mm | SB44 |

Bereifungen

| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|---|-----------|
| o.B. | 2 | 202213 | Luftbereifung 22 x 1" Right Run, grau/schwarz | |
| o.B. | 2 | 202413 | Luftbereifung 24 x 1" Right Run, grau/schwarz | |
| o.B. | 2 | 202221 | Luftbereifung 22 x 1 3/8" grau | |
| o.B. | 2 | 202421 | Luftbereifung 24 x 1 3/8" grau | |
| o.B. | 2 | 202414 | Luftbereifung 24 x1" Right Run blau/schwarz | |
| o.B. | 2 | 202415 | Luftbereifung 24 x1" Right Run rot/schwarz | |
| o.B. | 2 | 232211 | Pannensichere Bereifung 22 x 1 Zoll | |
| o.B. | 2 | 232411 | Pannensichere Bereifung 24 x 1 Zoll | |
| o.B. | 2 | 232221 | Pannensichere Bereifung 22 x 1 3/8 Zoll | |
| o.B. | 2 | 232421 | Pannensichere Bereifung 24 x 1 3/8 Zoll | |
| o.B. | 2 | 202212 | Luftbereifung 22 x 1" Marathon plus, schwarz | |
| o.B. | 2 | 202412 | Luftbereifung 24 x 1" Marathon plus, schwarz | |
| o.B. | 2 | 200522 | Schlauch 22" | |
| o.B. | 2 | 200524 | Schlauch 24" | |

Greifringe

| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|--------------|---------------|-------------------|---|------------------------------|
| o.B. | 2 | 302201 | Greifring 22" Standard, Edelstahl poliert | Nur für Standardrad |
| o.B. | 2 | 302301 | Greifring 22" hoch, Edelstahl poliert | Nur für Standardrad |
| o.B. | 2 | 302401 | Greifring 24" Standard, Edelstahl poliert | Nur für Standardrad |
| o.B. | 2 | 302501 | Greifring 24" hoch, Edelstahl poliert | Nur für Standardrad |
| o.B. | 2 | 302202 | Greifring 22" Standard, Aluminium beschichtet | Nur für Standardrad, Farbe |
| o.B. | 2 | 302302 | Greifring 22" hoch, Aluminium beschichtet | Nur für Standardrad, Farbe |
| o.B. | 2 | 302402 | Greifring 24" Standard, Aluminium beschichtet | Nur für Standardrad, Farbe |
| o.B. | 2 | 302502 | Greifring 24" hoch, Aluminium beschichtet | Nur für Standardrad, Farbe |
| o.B. | 2 | 3422 | Maxgrepp-Greifring 22", 4 Laschen kpl. | Für Standard- + Leichtlaufad |
| o.B. | 2 | 3424 | Maxgrepp-Greifring 24", 4 Laschen kpl. | Für Standard- + Leichtlaufad |
| o.B. | 2 | 3122 | Greifring Edelstahl 22", 8 Noppen | Nur für Standardrad |
| o.B. | 2 | 3124 | Greifring Edelstahl 24", 8 Noppen | Nur für Standardrad |
| o.B. | 2 | 3322 | Greifring Aluminium 22", schwarz; PVC-Ummantelung | Nicht für Profilräder |
| o.B. | 2 | 3324 | Greifring Aluminium 24", schwarz; PVC-Ummantelung | Nicht für Profilräder |
| o.B. | 2 | 342405 | Greifring SURGE LT 24", 6 Laschen | Für Standard- + Leichtlaufad |


Greifringüberzüge

| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|--|--|
| o.B. | 2 | 322002 | Greifring-Überzug Silikon schwarz ø442 | Profilrad 20"/ Greifring 20" hoch / 22" std./ DGR 24"innen |
| o.B. | 2 | 322202 | Greifring-Überzug Silikon schwarz ø478 | Profilrad 22" |
| o.B. | 2 | 322205 | Greifring-Überzug Silikon schwarz ø453 | Leichtlauftrad „D“ 22"/ DGR 22" außen |
| o.B. | 2 | 322208 | Greifring-Überzug Silikon schwarz ø388 | DGR 22" innen |
| o.B. | 2 | 322402 | Greifring-Überzug Silikon schwarz ø532 | Profilrad 24" |
| o.B. | 2 | 322404 | Greifring-Überzug Silikon schwarz ø504 | Greifring 24" Standard/ Greifring 22" hoch |
| o.B. | 2 | 322405 | Greifring-Überzug Silikon schwarz ø514 | Leichtlauftrad „D“ 24"/ DGR 24" außen |
| o.B. | 2 | 322603 | Greifring-Überzug Silikon schwarz ø565 | Greifring 24" hoch |
| o.B. | 2 | 322201 | Greifring-Überzug Profilrad, Ergo 22" | |
| o.B. | 2 | 322401 | Greifring-Überzug Profilrad, Ergo 24" | |

Speichenschutz


| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|---|-----------|
| o.B. | 1 | 250001 | Clip-Halter für transparenten Speichensch. Set=20 St. | |
| o.B. | 1 | 250002 | Kabelbinder für bedruckten Speichenschutz Set=10 St. | |
| o.B. | 2 | 252200 | Speichenschutz 22", Unicolor transparent | |
| o.B. | 2 | 252206 | Speichenschutz 22", Manta | |
| o.B. | 2 | 252207 | Speichenschutz 22", Dragon | |
| o.B. | 2 | 252208 | Speichenschutz 22", Afrika | |
| o.B. | 2 | 252211 | Speichenschutz 22", Bubbles | |
| o.B. | 2 | 252212 | Speichenschutz 22", Flower Power | |
| o.B. | 2 | 252251 | Speichenschutz 22", Unicolor yellow | |
| o.B. | 2 | 252252 | Speichenschutz 22", Unicolor red | |
| o.B. | 2 | 252253 | Speichenschutz 22", Unicolor blue | |
| o.B. | 2 | 252400 | Speichenschutz 24", Unicolor transparent | |
| o.B. | 2 | 252406 | Speichenschutz 24", Manta | |
| o.B. | 2 | 252407 | Speichenschutz 24", Dragon | |
| o.B. | 2 | 252408 | Speichenschutz 24", Afrika | |
| o.B. | 2 | 252411 | Speichenschutz 24", Bubbles | |
| o.B. | 2 | 252412 | Speichenschutz 24", Flower Power | |
| o.B. | 2 | 252451 | Speichenschutz 24", Unicolor yellow | |
| o.B. | 2 | 252452 | Speichenschutz 24", Unicolor red | |
| o.B. | 2 | 252453 | Speichenschutz 24", Unicolor blue | |

Kniehebelbremse Standard

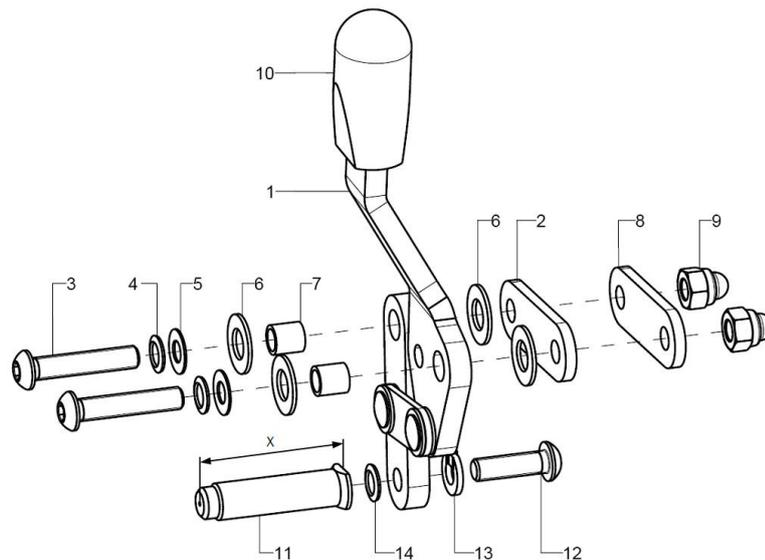


| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|---------|--------|------------|--|-----------------------|
| 1-11 | 1 | 352502 | Kniehebelbremse Standard, rechts, kpl. | Länge X |
| 1-11 | 1 | 352501 | Kniehebelbremse Standard, links, kpl. | Länge X |
| 1 | 1 | 352504 | Bremsgrundkörper Standard, vormontiert, rechts | |
| o.B. | 1 | 352503 | Bremsgrundkörper Standard, vormontiert, links | |
| 2 | 2 | 352505 | Lasche 34, Bd 16x3x50 | |
| 3-9 | 2 | 352508 | Montageset Kniehebelbremse | |
| 3 | 2 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x30 | |
| 4 | 2 | | Sicherungsscheibe S6 - FST | |
| 5 | 2 | | Passscheibe DIN 988 - 6x12x0,5 - A2 | |
| 6 | 4 | | Kotflügelscheibe 8,4x16x1 PE | |
| 7 | 2 | | Distanzhülse 8,2 Ro 8x1x8,2 | |
| 8 | 2 | 352505 | Lasche 34, Bd 16x3x50 | |
| 9 | 2 | | Sechsk.-Hutmutter niedr. Form mit Klemmt. DIN 986 - M6 | |
| 10 | 2 | 350017 | Abdeckkappe schwarz, 15x6,8 | |
| 11-14 | 1 | 352518 | Bremsbolzen 40 mm Linksgew., inkl. Montagezubehör | Länge X, Rechte Seite |
| o.B. | 1 | 352506 | Bremsbolzen gerändelt 40 mm, inkl. Montagezubehör | Länge X, Linke Seite |
| altern. | 1 | 352519 | Bremsbolzen 50 mm Linksgewinde, inkl. Montagezubehör | Länge X, Rechte Seite |
| o.B. | 1 | 352507 | Bremsbolzen gerändelt 50 mm, inkl. Montagezubehör | Länge X, Linke Seite |
| 12 | 1 | | Li-schr. m. Innensechsk. ISO 7380, M6x20, Links-gew. | |
| o.B. | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x20 | |
| 13 | 1 | | Federring DIN 127 - A 6 | |
| 14 | 1 | | Sicherungsscheibe S6 - FST | |

Kniehebelbremse verriegelbar

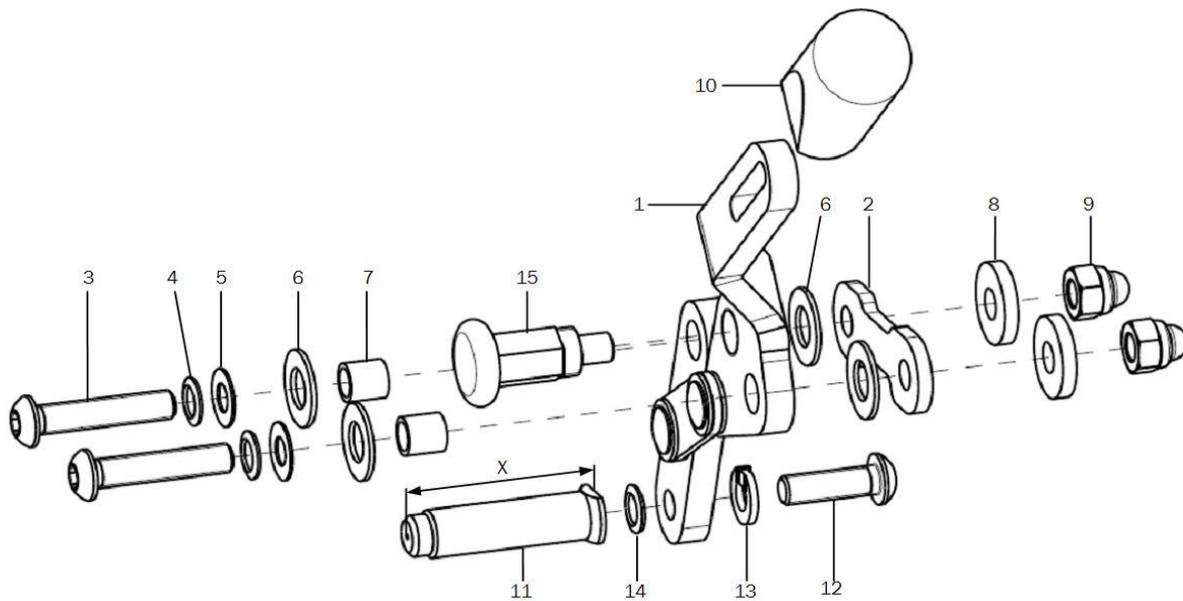

| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|---------|--------|------------|--|-----------------------|
| 1-15 | 1 | 351302 | Kniehebelbremse verriegelbar, rechts kpl. | Länge X |
| o.B. | 1 | 351301 | Kniehebelbremse verriegelbar, links, kpl. | Länge X |
| 1 | 1 | 351304 | Bremsgrundkörper verriegelbar, vormontiert, rechts | |
| o.B. | 1 | 351303 | Bremsgrundkörper verriegelbar, vormontiert, links | |
| 2 | 2 | 352510 | Lasche 34, Bd 16x3x50, verriegelbar | |
| 3-9 | 2 | 352508 | Montageset Kniehebelbremse | |
| 3 | 2 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x30 | |
| 4 | 2 | | Sicherungsscheibe S6 - FST | |
| 5 | 2 | | Passscheibe DIN 988 - 6x12x0,5 - A2 | |
| 6 | 4 | | Kotflügelscheibe 8,4x16x1 PE | |
| 7 | 2 | | Distanzhülse 8,2 Ro 8x1x8,2 | |
| 8 | 1 | 352505 | Lasche 34, Bd 16x3x50 | |
| 9 | 2 | | Sechsk.-Hutmutter niedr. Form mit Klemmt. DIN 986 - M6 | |
| 10 | 2 | 350017 | Abdeckkappe schwarz, 15x6,8 | |
| 11-14 | 1 | 352518 | Bremsbolzen 40 mm Linksgew., inkl. Montagezubehör | Länge X, Rechte Seite |
| o.B. | 1 | 352506 | Bremsbolzen gerändelt 40 mm, inkl. Montagezubehör | Länge X, Linke Seite |
| altern. | 1 | 352519 | Bremsbolzen 50 mm Linksgewinde, inkl. Montagezubehör | Länge X, Rechte Seite |
| o.B. | 1 | 352507 | Bremsbolzen gerändelt 50 mm, inkl. Montagezubehör | Länge X, Linke Seite |
| 12 | 1 | | Li-schr. m. Innensechsk. ISO 7380, M6x20, Links-gew. | |
| o.B. | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x20 | |
| 13 | 1 | | Federring DIN 127 - A 6 | |
| 14 | 1 | | Sicherungsscheibe S6 - FST | |
| 15 | 2 | 690101 | Zugschnapper ø6/M10x1x31 mit Arretierung | |


Kniehebelbremse, zusätzlich vom Begleiter feststellbar

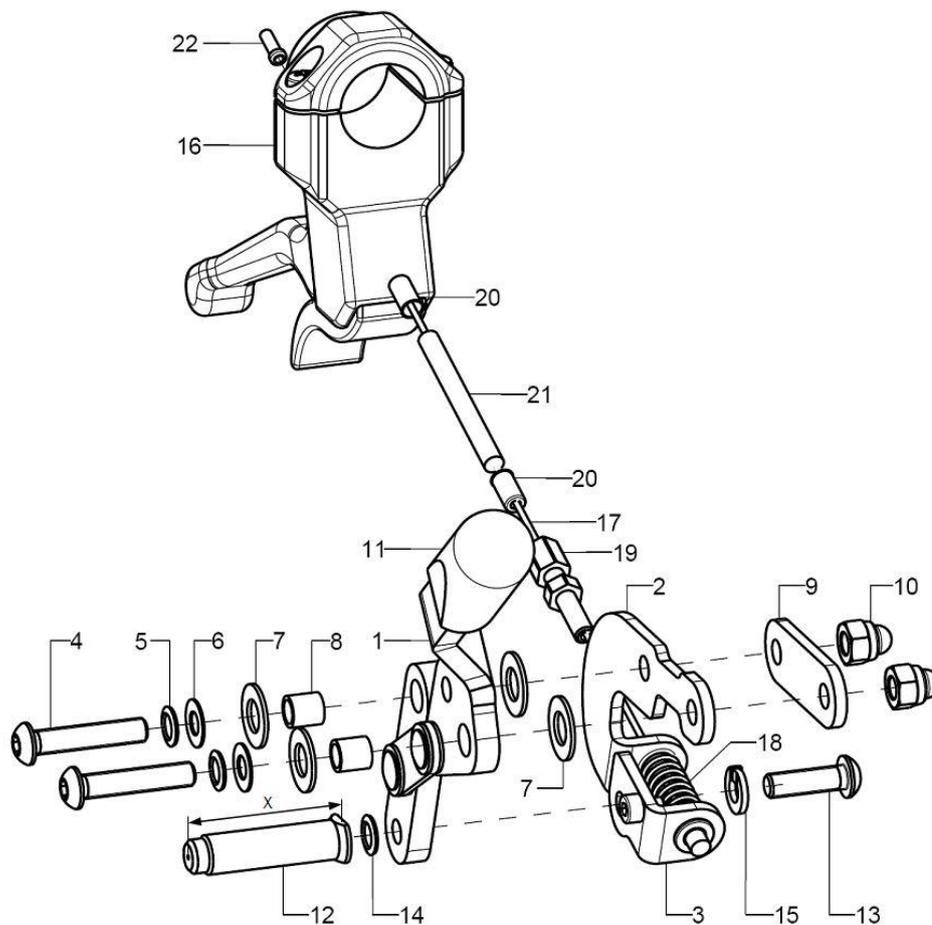

| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|---------|--------|------------|---|-----------------------|
| 1-22 | 1 | 352402 | Kniehebelbremse Begleiter, rechts, incl. Bedieneinheit kpl. | Länge X |
| o.B. | 1 | 352401 | Kniehebelbremse Begleiter, links, incl. Bedieneinheit kpl. | Länge X |
| 1 | 1 | 352504 | Bremsgrundkörper Standard, vormontiert, rechts | |
| o.B. | 1 | 352503 | Bremsgrundkörper Standard, vormontiert, links | |
| 2 | 1 | 35240102 | Gegenhalter Bremsbolzen rechts | |
| o.B. | 1 | 35240101 | Gegenhalter Bremsbolzen links | |
| 3 | 1 | 35240104 | Gegenhalter Zug rechts | |
| o.B. | 1 | 35240103 | Gegenhalter Zug links | |
| 4-10 | 2 | 352499 | Montageset Kniehebelbremse Begleiter | Rahmenvariante |
| 4 | 2 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x30 | |
| 5 | 2 | | Sicherungsscheibe S6 - FST | |
| 6 | 2 | | Passscheibe DIN 988 - 6x12x0,5 - A2 | |
| 7 | 4 | | Kotflügelscheibe 8,4x16x1 PE | |
| 8 | 2 | | Distanzhülse 8,2 Ro 8x1x8,2 | |
| 9 | 1 | 352505 | Lasche 34, Bd 16x3x50 | |
| 10 | 2 | | Sechsk.-Hutmutter niedr. Form mit Klemmt. DIN 986 - M6 | |
| 11 | 2 | 350017 | Abdeckkappe schwarz, 15x6,8 | |
| 12-15 | 1 | 352518 | Bremsbolzen 40 mm Linksgew., inkl. Montagezubehör | Länge X, Rechte Seite |
| o.B. | 1 | 352506 | Bremsbolzen gerändelt 40 mm, inkl. Montagezubehör | Länge X, Linke Seite |
| altern. | 1 | 352519 | Bremsbolzen 50 mm Linksgewinde, inkl. Montagezubehör | Länge X, Rechte Seite |
| o.B. | 1 | 352507 | Bremsbolzen gerändelt 50 mm, inkl. Montagezubehör | Länge X, Linke Seite |
| 13 | 1 | | Li-schr. m. Innensechsk. ISO 7380, M6x20, Links-gew. | |
| o.B. | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x20 | |

| | | | | |
|-------|---|--------|--|-------------|
| 14 | 1 | | Federring DIN 127 - A 6 | |
| 15 | 1 | | Sicherungsscheibe S6 - FST | |
| 16-22 | 2 | 351810 | Handbremshebel Begleiterbremse, kpl. (Bedieneinheit) | |
| 16 | 1 | 352010 | Handbremshebel schwarz, feststellbar | |
| 17 | 1 | 352012 | Innenzug Ø1,5x2250mm mit Doppelnippel | |
| 18 | 1 | 352405 | Druckfeder, 1,1x9,4x44,3 | |
| 19 | 1 | 352406 | Einstellschraube f. Bowdenzug, M5x34 mm | |
| 20 | 2 | 352412 | Abschlußhülse gedreht aus Metall, ø5, Endkappen | |
| 21 | 1 | 352013 | Außenhülle für Bremszug schwarz, 150 cm lang | |
| 22 | 1 | 352005 | Endkappe für Innenzüge ø1-1,5 mm | Set 2 Stück |


Einhandbremse Bedienseite (rechts)

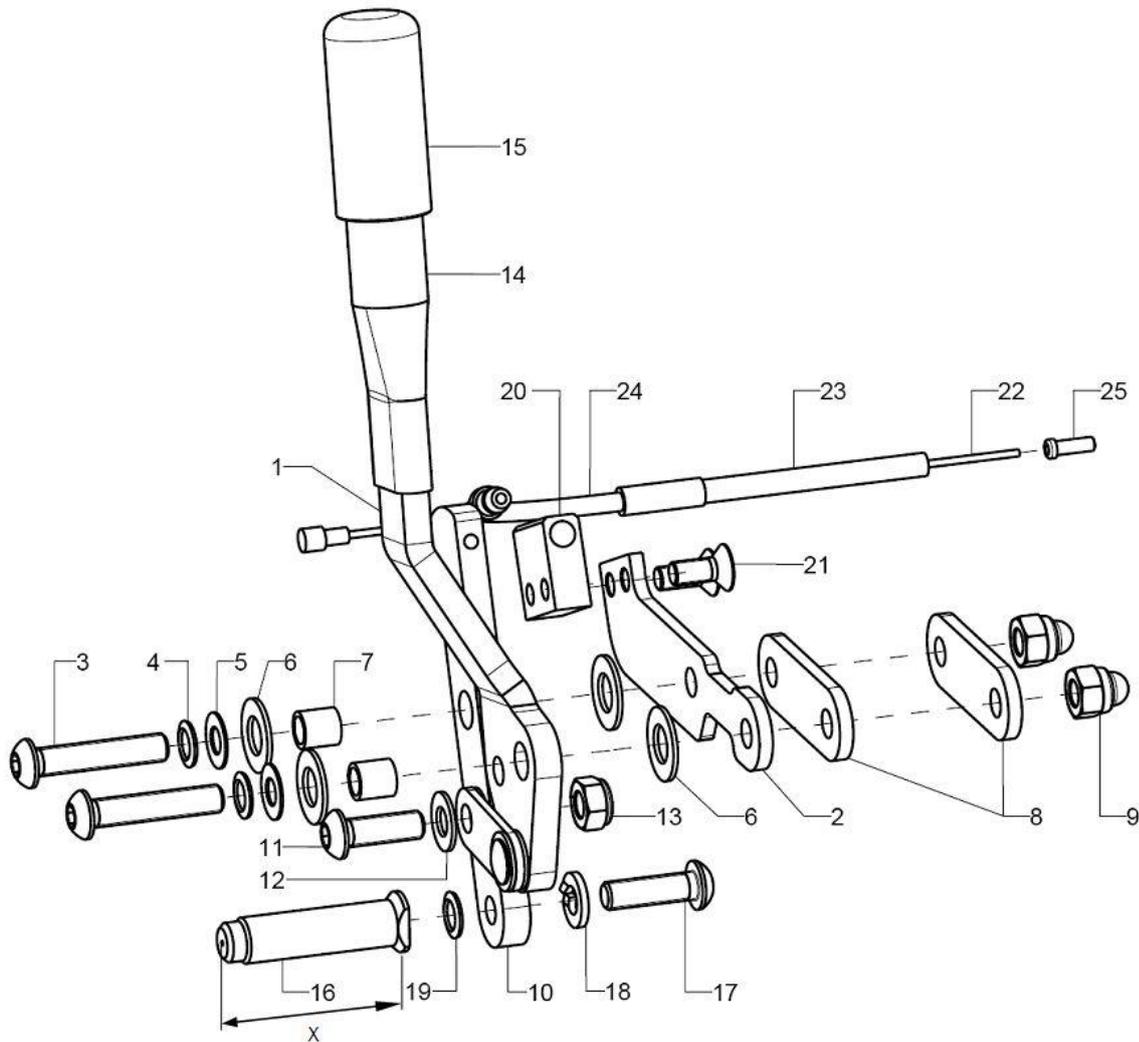

| Pos.: | Menge: | Artikelnr.: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|-------------|---|-----------|
| 1-48 | 1 | 350902 | Einhandbremse rechts, kpl, Bedienseite + Nichtbedienseite | Länge X |
| o.B. | 1 | 350901 | Einhandbremse links, kpl, Bedienseite + Nichtbedienseite | Länge X |
| | | | Bedienseite | |
| 1-25 | 1 | 350904 | Einhandbremse Bedienseite rechts, kpl. | Länge X |
| o.B. | 1 | 350903 | Einhandbremse Bedienseite links, kpl. | Länge X |
| 1 | 1 | 350906 | Bremsgrundkörper EHB, vormontiert, rechts | |
| o.B. | 1 | 350905 | Bremsgrundkörper EHB, vormontiert, links | |
| 2 | 1 | 350910 | Halteblech Bedienseite EHB rechts | |
| o.B. | 1 | 350909 | Halteblech Bedienseite EHB links | |
| 3-9 | 1 | 350999 | Montageset Kniehebelbremse | |
| 3 | 2 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x30 | |
| 4 | 2 | | Sicherungsscheibe S6 - FST | |
| 5 | 2 | | Passscheibe DIN 988 - 6x12x0,5 - A2 | |
| 6 | 4 | | Kotflügelscheibe 8,4x16x1 PE | |
| 7 | 2 | | Distanzhülse 8,2 Ro 8x1x8,2 | |
| 8 | 2 | 352505 | Lasche 34, Bd 16x3x50 | |
| 9 | 2 | | Sechsk.-Hutmutter niedr. Form mit Klemmt. DIN 986 - M6 | |
| 10-13 | 1 | 350913 | Bremsbolzenhalter EHB inkl. Montagezubehör | |
| 11 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x18 | |
| 12 | 2 | | Scheibe 6x12,7x0.9 (Tw) | |
| 13 | 1 | | Sechskantmutter selbstsi. niedrige Form DIN 985 - M6 | |

| | | | | |
|---------|---|--------|--|-----------------------|
| 14 | 1 | | Bremshebelverlängerung kpl. | |
| 15 | 1 | | PVC-Tauchkappe EHB | |
| 16-19 | 1 | 352518 | Bremsbolzen 40 mm Linksgew., inkl. Montagezubehör | Länge X, Rechte Seite |
| o.B. | 1 | 352506 | Bremsbolzen gerändelt 40 mm, inkl. Montagezubehör | Länge X, Linke Seite |
| altern. | 1 | 352519 | Bremsbolzen 50 mm Linksgewinde, inkl. Montagezubehör | Länge X, Rechte Seite |
| o.B. | 1 | 352507 | Bremsbolzen gerändelt 50 mm, inkl. Montagezubehör | Länge X, Linke Seite |
| 17 | 1 | | Li-schr. m. Innensechsk. ISO 7380, M6x20, Links-gew. | |
| o.B. | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x20 | |
| 18 | 1 | | Federring DIN 127 - A 6 | |
| 19 | 1 | | Sicherungsscheibe S6 - FST | |
| 20-21 | 1 | 350914 | Führungshalter EHB Bedienseite inkl. Montageschraube | |
| 21 | 2 | | Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 M5x12 | |
| 22-25 | 1 | 350917 | Bowdenzug, kpl. | |
| 22 | 1 | 352012 | Innenzug Ø1,5x2250mm mit Doppelnippel | |
| 23 | 1 | 350915 | Außenhülle für Bremszug schwarz | SB +10cm |
| 24 | 2 | 350916 | Bügelführung mit Hülse | |
| 25 | 1 | 352005 | Endkappe für Innenzüge ø1-1,5 mm | Set 2 Stück |


Einhandbremse Nicht-Bedienseite (links)

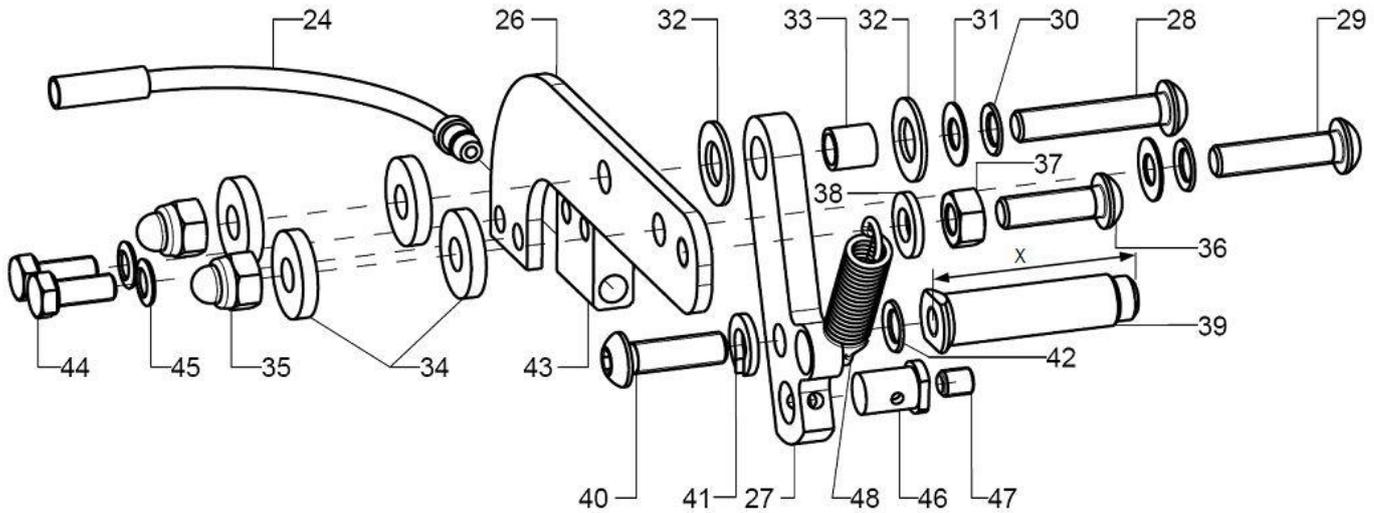

| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|---------|--------|------------|--|-----------------------|
| 26-48 | 1 | 350912 | Einhandbremse Nicht-Bedienseite, kpl. | Länge X, links/rechts |
| 26 | 1 | 350920 | Halteblech EHB | |
| 27 | 1 | 350921 | Bremsbolzenhalter EHB | |
| 28-38 | 1 | 350998 | Montageset EHB | Rahmenvariante |
| 28 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x30 | |
| 29 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x25 | |
| 30 | 2 | | Sicherungsscheibe S6 - FST | |
| 31 | 2 | | Passscheibe DIN 988 - 6x12x0,5 - A2 | |
| 32 | 2 | | Kotflügelscheibe 8,4x16x1 PE | |
| 33 | 1 | | Distanzhülse 8,2 Ro 8x1x8,2 | |
| 34 | 4 | | Scheibe DIN 7349 - 6,4 | |
| 35 | 2 | | Sechsk.-Hutmutter niedr. Form mit Klemmt. DIN 986 - M6 | |
| 36 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x20 | |
| 37 | 1 | | Sechskantmutter DIN 934 - M10 | |
| 38 | 1 | | Scheibe DIN 125 - A 6,4 | |
| 39-42 | 1 | 352518 | Bremsbolzen 40 mm Linksgew., inkl. Montagezubehör | Länge X, Rechte Seite |
| o.B. | 1 | 352506 | Bremsbolzen gerändelt 40 mm, inkl. Montagezubehör | Länge X, Linke Seite |
| altern. | 1 | 352519 | Bremsbolzen 50 mm Linksgewinde, inkl. Montagezubehör | Länge X, Rechte Seite |
| o.B. | 1 | 352507 | Bremsbolzen gerändelt 50 mm, inkl. Montagezubehör | Länge X, Linke Seite |
| 40 | 1 | | Li-schr. m. Innensechsk. ISO 7380, M6x20, Links-gew. | |
| o.B. | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x20 | |
| 41 | 1 | | Federring DIN 127 - A 6 | |
| 42 | 1 | | Sicherungsscheibe S6 - FST | |
| 43-45 | 1 | 350922 | Führungshalter EHB Nicht-Bediens. inkl. Montagezubehör | |
| 44 | 2 | | Sechskantschraube DIN 933 - M5x12 | |
| 45 | 2 | | Sicherungsscheibe S5 - FST | |
| 46-47 | 1 | 350923 | Klemmnippel inkl. Gewindestift | |
| 47 | 1 | | Gewindestift mit Innensechskant DIN 913, M5x6 | |

48 1 350924 Zugfeder 1,2x9x40


Seilzugbremse Andrückteil

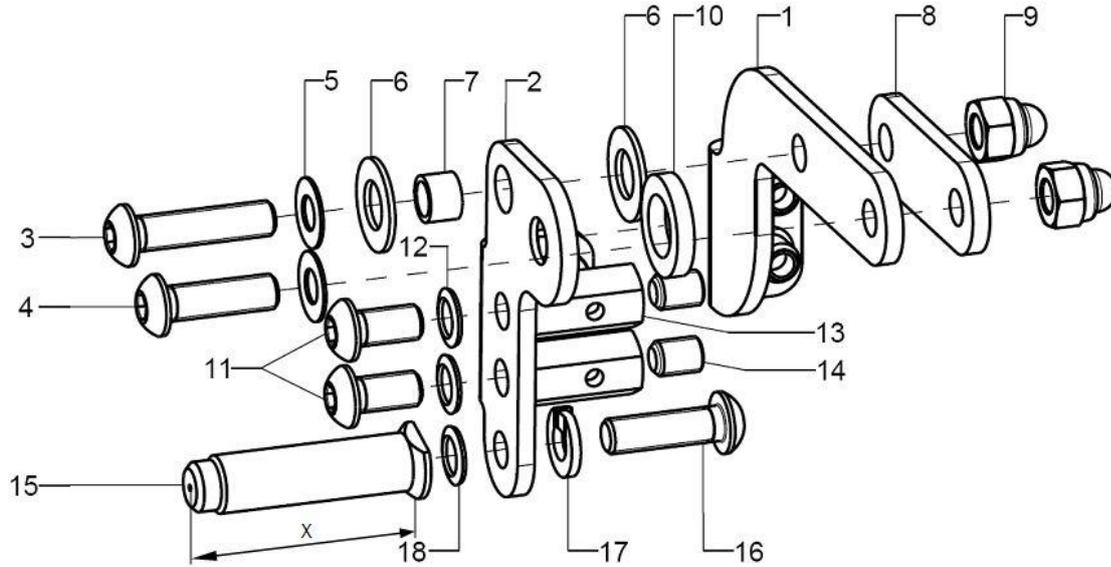


| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|---------|--------|------------|--|---|
| 1-32 | 1 | 3531 | Seilzugbremse im Seitenteil integriert kpl. (Bremskörper , Benutzerbedienung, Verschraubung) | Länge X, Benutzer-Begleiterbedienteil, links/rechts |
| 1 | 1 | 35310604 | Basisteil Kombi, rechts | zusätzlich. Begleiterbedienteil |
| altern. | 1 | 35310205 | Basisteil, rechts | Benutzerbedienteil |
| o.B. | 1 | 35310603 | Basisteil Kombi, links | zusätzlich. Begleiterbedienteil |
| altern. | 1 | 35310204 | Basisteil, links | Benutzerbedienteil |
| 2 | 1 | 35310606 | Andrückteil Kombi, rechts | zusätzlich. Begleiterbedienteil |
| altern. | 1 | 35310202 | Andrückteil, rechts | Benutzerbedienteil |
| o.B. | 1 | 35310605 | Andrückteil Kombi, links | zusätzlich. Begleiterbedienteil |
| altern. | 1 | 35310201 | Andrückteil links | Benutzerbedienteil |
| 3-14 | 2 | 353199 | Montageset bei Bremskörper der Seilzugbremse | |
| 3 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x25 | |
| 4 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x20 | |
| 5 | 2 | | Passscheibe DIN 988 - 6x12x0,5 - A2 | |
| 6 | 2 | | Kotflügelscheibe 8,4x16x1 PE | |
| 7 | 1 | | Messingbuchse 8x6x5,5 | |
| 8 | 1 | 352505 | Lasche 34, Bd 16x3x50 | |
| 9 | 2 | | Sechsk.-Hutmutter niedr. Form mit Klemmt. DIN 986 - M6 | |
| 10 | 1 | | Scheibe PS 3xØ17,5/10,7 schwarz | |
| 11 | 1(2) | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x12 | |
| 12 | 1(2) | | Sicherungsscheibe S6 - FST | |
| 13 | 1(2) | | Klemmnippelmuffe SW10 M6x20 mit Bohrung | (zusätzl. Begleiterbed. 2 St.) |
| 14 | 1(2) | | Gewindestift mit Innensechskant DIN 913, M6x8 | |
| 15-18 | 1 | 352518 | Bremsbolzen 40 mm Linksgew., inkl. Montagezubehör | Länge X, Rechte Seite |
| o.B. | 1 | 352506 | Bremsbolzen gerändelt 40 mm, inkl. Montagezubehör | Länge X, Linke Seite |
| altern. | 1 | 352519 | Bremsbolzen 50 mm Linksgewinde, inkl. Montagezubehör | Länge X, Rechte Seite |
| o.B. | 1 | 352507 | Bremsbolzen gerändelt 50 mm, inkl. Montagezubehör | Länge X, Linke Seite |
| 16 | 1 | | Li-schr. m. Innensechsk. ISO 7380, M6x20, Links-gew. | |
| o.B. | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M6x20 | |
| 17 | 1 | | Federring DIN 127 - A 6 | |
| 18 | 1 | | Sicherungsscheibe S6 - FST | |

Seilzugbremse Bedienteile

Seilzugbremse
Benutzerbedienteil

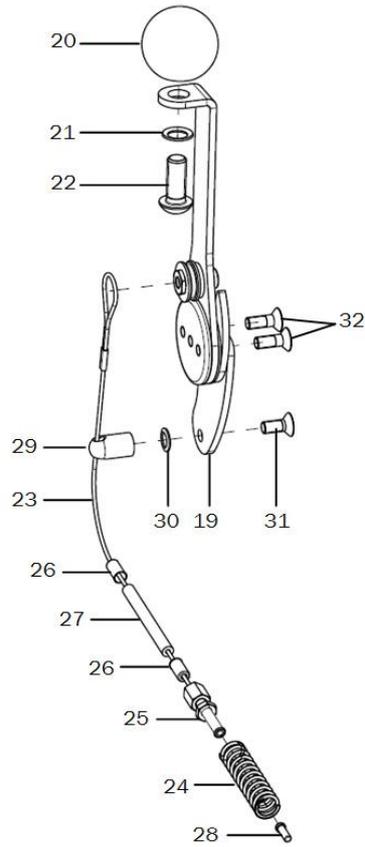


Begleiterbedienteil

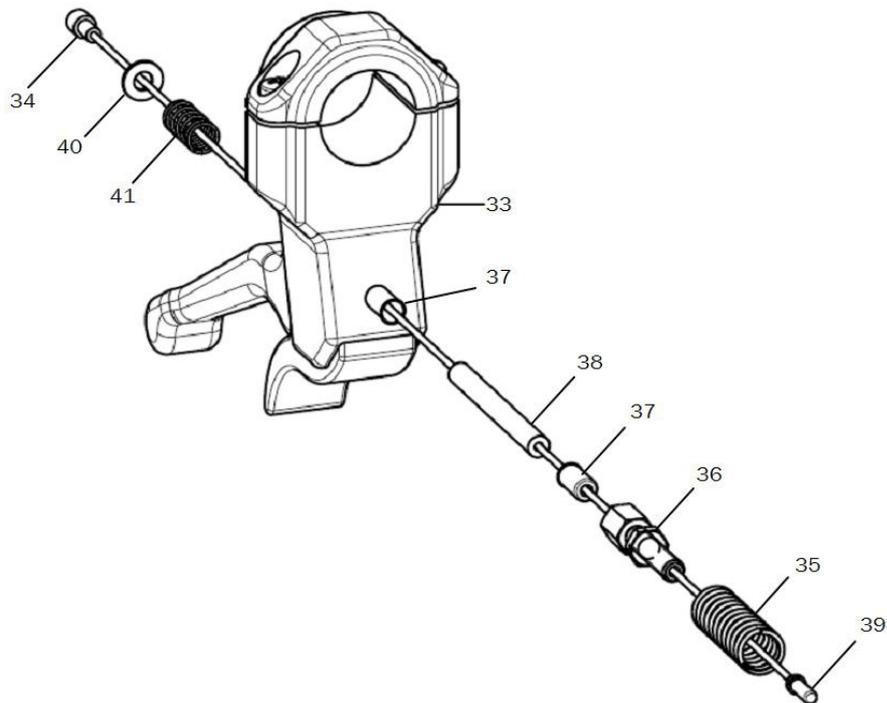


| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|--|---------------|
| | | | Benutzerbedienteil | |
| 19-32 | 2 | 353103 | Benutzerbedienung bei Seilzugbremse im Seitenteil integriert kpl. | rechts, links |
| 19 | 1 | 353111 | Bedienteil der Seilzugbremse, rechts - vormontiert | |
| o.B. | 1 | 353112 | Bedienteil der Seilzugbremse, links - vormontiert | |
| 20-22 | 1 | 35310109 | Kugelknopf $\varnothing 32/M8$, Form C, schw., inkl. Montagezubehör | |
| 21 | 1 | | Sicherungsscheibe S8 - FST | |
| 22 | 1 | | Linsenschraube mit Innensechskant ISO 7380 - M8x20 | |
| 23-28 | 2 | 353105 | Seilzug kpl. Bei Seilzugbremse | |
| 23 | 1 | 35310301 | Seilzug mit Schlaufe 90 cm | |
| 24 | 1 | 352405 | Druckfeder, 1,1x9,4x44,3 | |
| 25 | 1 | 352406 | Einstellschraube f. Bowdenzug, M5x34 mm | |
| 26 | 2 | 352412 | Abschlußhülse gedreht aus Metall, $\varnothing 5$, Endkappen | |
| 27 | 1 | 35310303 | Außenhülle für Bremszug schwarz, 38 cm lang | |
| 28 | 1 | 352005 | Endkappe für Innenzüge $\varnothing 1-1,5$ mm | Set 2 Stück |
| 29 | 1 | 35310302 | Seilzug-Durchführung inkl. Montagezubehör | |
| 30 | 1 | | Sicherungsscheibe S5 - FST | |
| 31 | 1 | | Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 M5x12 | |
| 32 | 2 | | Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 M5x14 | |
| | | | Begleiterbedienteil | |
| 33-41 | 2 | 353110 | Begleiterbedienteil kpl. | |
| 33 | 1 | 352010 | Handbremshebel schwarz, feststellbar | |
| 34 | 1 | 352012 | Innenzug $\varnothing 1,5 \times 2250$ mm mit Doppelnippel | |
| 35 | 1 | 352405 | Druckfeder, 1,1x9,4x44,3 | |
| 36 | 1 | 352406 | Einstellschraube f. Bowdenzug, M5x34 mm | |
| 37 | 2 | 352412 | Abschlußhülse gedreht aus Metall, $\varnothing 5$, Endkappen | |
| 38 | 1 | 352013 | Außenhülle für Bremszug schwarz, 150 cm lang | |
| 39 | 1 | 352005 | Endkappe für Innenzüge $\varnothing 1-1,5$ mm | Set 2 Stück |
| 40 | 1 | | Scheibe DIN 125 - A 4,3 | |
| 41 | 1 | | Druckfeder, 0,66x6,7x15 | |

Bremsgriff für Trommelbremse

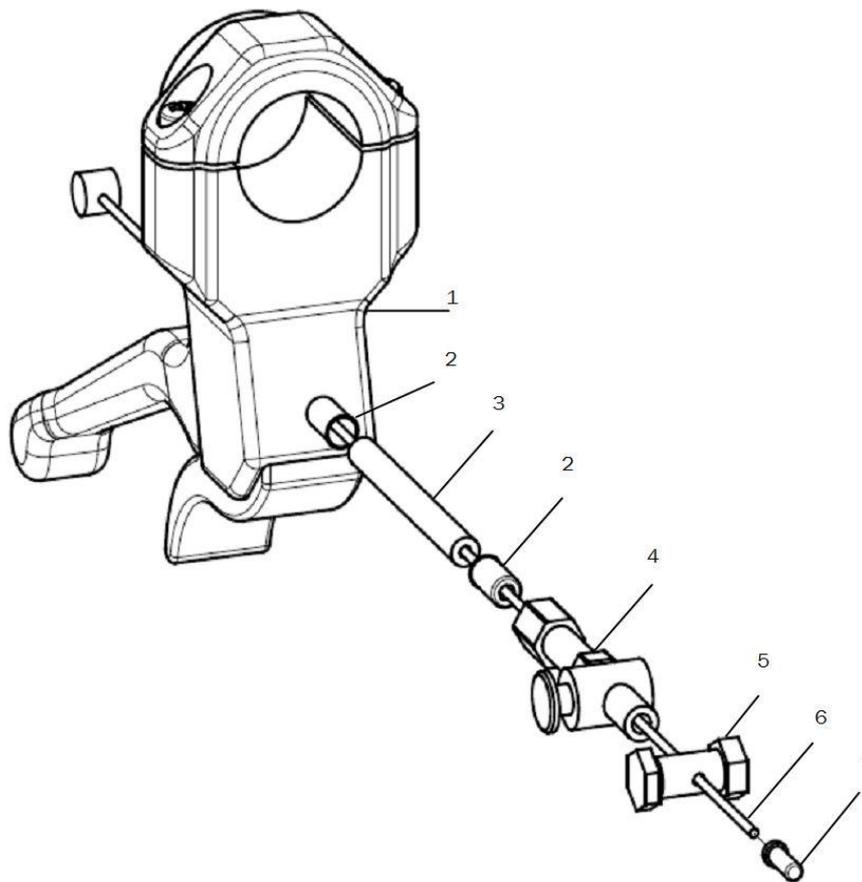

| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|---|-------------|
| 1-7 | 2 | 352016 | Handbremshebel kpl. Mit Bedieneinheit | |
| 1 | 1 | 352010 | Handbremshebel schwarz, feststellbar | |
| 2 | 2 | 351812 | Abschlußhülse bei Hülle des Seilzuges Ø5 | |
| 3 | 1 | 352013 | Außenhülle für Bremszug schwarz, 150 cm lang | |
| 4 | 1 | 352007 | Einstellschraube M6x40 mm inkl. Klemmschraube | |
| 5 | 1 | | Klemmschraube für Bowdenzug | |
| 6 | 1 | 352012 | Innenzug Ø1,5x2250mm mit Doppelnippel | |
| 7 | 1 | 352005 | Endkappe für Innenzüge Ø1-1,5 mm | Set 2 Stück |

Bremshebelverlängerung

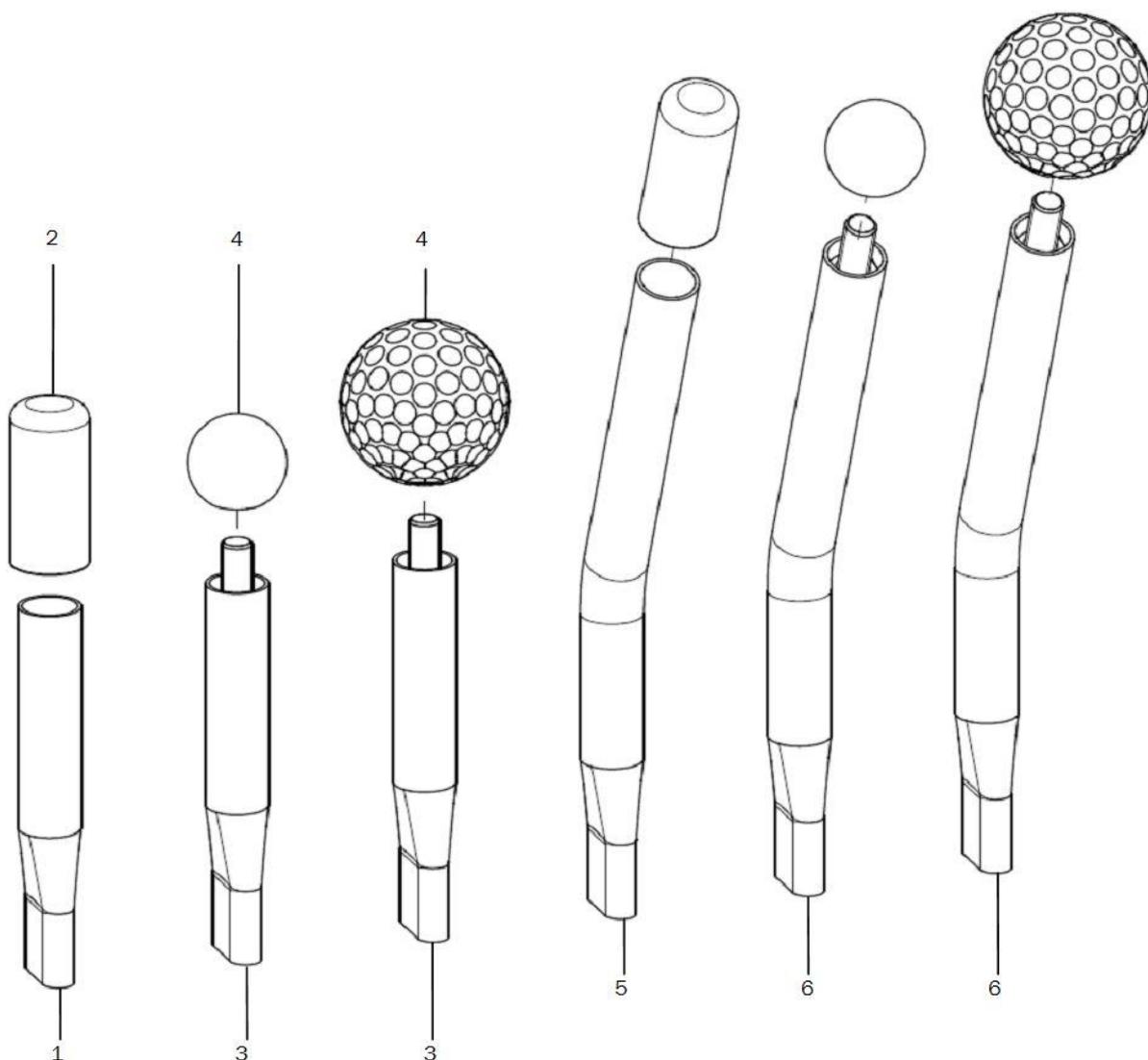

| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|---------|--------|------------|---|----------------------|
| 1-2 | 2 | 3510 | Bremshebelverlängerung inkl. Tauchkappe | |
| 2 | 2 | 351011 | PVC-Tauchkappe EHB | |
| 3-4 | 2 | 3512 | Bremshebelverl. 100 für Kugelknopf, inkl. Kugelknopf | Kugelknopf, Golfball |
| 4 | 2 | 351016 | Kugelknopf ä. DIN319 | |
| altern. | 2 | 351211 | Golfball | |
| 5+2 | 2 | 3515 | Bremshebelverlängerung 23° inkl. Tauchkappe | |
| 6+4 | 2 | 3516 | Bremshebel – Verl. 23° für Kugelknopf, inkl. Kugelknopf | Kugelknopf, Golfball |

Beckengurt mit Klettverschluss und Kunststoffschloss

| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|--------------|---------------|-------------------|--|------------------------|
| 1 | 1 | 7800 | Beckengurt, klein | Bis 100cm, Bauchumfang |
| o.B. | 1 | 7801 | Beckengurt, Beckengurt mittleres Polster | Bis 130cm, Bauchumfang |

Beckengurt mit Metallschloss



| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: | Variante: |
|-------|--------|------------|--|-----------|
| 1 | 1 | 7805 | Beckengurt Bodypoint mit Druck-Metallschloss und Montageschellen | |

Schmetterlingsweste



| Pos.: | Menge: | Artikelnr: | Artikelbezeichnung: |
|-------|--------|------------|---------------------|
| 1 | 1 | 7810 | Schmetterlingsweste |

| Variante: |
|--------------------|
| Größe: XS, S, M, L |