

## De gebruiker in het bracesysteem plaatsen



1 Verwijder de brace van het onderstel en plaats deze op een mat of bank. Open alle gespen en plaats de gebruiker in het bracesysteem.

2 Buig de knie van de gebruiker en ondersteun de hiel van de gebruiker in de richting van de bank. Buig de brace ter hoogte van het kniegewricht en maak de schoen vast aan de brace.

3 Maak de kuitboog vast. Let erop dat u de broek aan de voorzijde van het been niet vouwt alvorens de kuitboog aan te spannen, om drukpunten te vermijden.



4 Sluit de borstriem. Als er een padding wordt gebruikt, maak deze vast alvorens de borstriem te sluiten.

5 Verzekert u dat het bekken horizontaal en gealigneerd is met het heupgewricht van de brace alvorens de heupriem te sluiten.

## De gebruiker op het onderstel plaatsen - manueel



1 Rol de gebruiker op de zijde dicht bij het lichaam van de zorgverlener. Houd de brace met één hand vast op de heupboog en één hand op het thorax-staal.

2 Verplaats de gebruiker naar het onderstel en sluit het slot op de kolom nadat de brace is vastgemaakt.

3 Maak de elastieken/riemen aan de voor- en achterzijde van de brace vast aan de ringklem.

## De gebruiker op het onderstel plaatsen - met behulp van tilbanden



1 Plaats de tilbanden in de borstriem en voor de schouders van de gebruiker. Maak de tilbanden vast aan de verspreider aan het heftoestel.

2 Plaats de gebruiker in het onderstel met behulp van het heftoestel terwijl u het hoofd van de gebruiker ondersteunt. Sluit het slot op de kolom nadat de brace is vastgemaakt. Maak de tilbanden los van het heftoestel.

3 Maak de elastieken/riemen aan de voor- en achterzijde van de brace vast aan de ringklem. Maak de rem los.

## De gebruiker op de NF-Walker 2 plaatsen in zithouding - in zithouding met zitting



1 Maak de rem vast en open alle riemen. Maak de zitting zo hoog mogelijk vast. Plaats de gebruiker op de zitting met de hand of met behulp van een heftoestel. Maak de borstriem vast.

2 Plaats de voeten van de gebruiker op de voorste as en maak de schoenclip en de kuitboog vast. Let erop dat u de broek aan de voorzijde van het been niet vouwt alvorens de kuitboog aan te spannen, om drukpunten te vermijden. Plaats beide voeten op de grond.

3 Maak de elastieken/riemen aan de voor- en achterzijde van de brace vast aan de ringklem.



4 Verwijder de zitting. Verzekert u dat het bekken horizontaal is ten opzichte van het heupgewricht van de brace alvorens de heupriem te sluiten.

## De gebruiker uit de NF-Walker 2 halen



1 Maak de rem vast.

2 Maak de elastieken/riemen los.

### Zonder tilbanden



Open de vergrendeling op de kolom. Ga oog in oog staan met de gebruiker. Neem de heupboog en het staal aan de borstkas vast, ondersteun de gebruiker met uw lichaam en maak de brace los van het onderstel. Plaats de gebruiker op een bank.

### Met tilbanden



Maak de tilbanden vast aan het heftoestel. Open de vergrendeling op de kolom en hef de gebruiker uit het onderstel met het heftoestel. Controleer de gebruiker met een hand op het thorax-staal. Plaats de gebruiker op een bank. Ondersteun het hoofd van de gebruiker terwijl u deze naar de bank laat zakken.

Onze hoogopgeleide en ervaren adviseurs adviseren over optimale transfertechnieken.

## De gebruiker uit de NF-Walker 2 halen - met zitting



1 Maak de rem vast en maak de zitting vast.

2 Maak de Velcro over de schoenen los.

3 Maak de kuitboog en riemen los.



4 Maak de borst- en heupriem los terwijl u de gebruiker met uw lichaam ondersteunt en hef de gebruiker uit de zitting.

## Maak de gebruiker los van de brace



Maak het bracesysteem los van de gebruiker, te beginnen van boven naar onder – borstriem, heupriem, kuitboog en schoenclips. Rol de gebruiker op een zij en verwijder de brace.

## LET OP!

Ledereen die de NF-Walker 2 bedient, moet worden opgeleid door een vertegenwoordiger van 'Made for Movement'. Voor meer informatie, kijk in de handleiding of neem contact op met een vertegenwoordiger van 'Made for Movement'.

Neem voor meer informatie contact met ons op

+ 31 0252-664630

info.nl@madeformovement.com

www.madeformovement.com/nl

 made for  
movement

**NF-WALKER** 2  
Designed for movement. Loved by users.

**In & Uit**  
Quick Guide

