

loeki 3.



Gebruiksaanwijzing.

loeki 3. De mobiele meegroeibende eet-/werkstoel.



Hartelijk dank.



Geachte cliënte, geachte cliënt,

Wij willen u hierbij hartelijk danken voor het in ons gestelde vertrouwen en voor de aanschaf van ons product. Wij verzoeken u om de gebruiksaanwijzing voor de eerste ingebruikname van het product aandachtig door te lezen en in acht te nemen. Houd er rekening mee dat de instructies en afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing vanwege de uitvoering van uw product kunnen afwijken. Technische wijzigingen voorbehouden.

Belangrijke informatie!

Zorg ervoor dat deze gebruiksaanwijzing bij het product blijft.

Uw **schuchmann**-team



1. Voorbereiding.	05
1.1 Levering.....	05
1.2 Veiligheidsmaatregelen vóór het gebruik	05
1.3 Veilig afvoeren.....	05
1.3.1 Verpakking.....	05
1.3.2 Product.....	05
1.4 Opbergplaats van de gebruiksaanwijzing.....	06
2. Productbeschrijving.	06
2.1 Materiaalinformatie	06
2.2 Handling/transport.....	06
2.3 Toepassingsgebieden, gebruik conform de voorschriften.....	06
2.3.1 Indicaties	06
2.3.2 Contra-indicaties.....	07
2.4 Oneigenlijk gebruik/waarschuwingen	07
2.5 Uitrusting basismodel	08
2.6 Lijst met toebehoren	08
2.7 Productoverzicht.....	08
3. Instellingen.	09
3.1 Zithoogte.....	09
3.2 Zithoek	10
3.3 Zitdiepte.....	10
3.4 Rughoek.....	11
3.5 Rughoogte.....	11
3.6 Armleuningen	11
3.7 Voetenbank.....	12
3.7.1 Voetenbank met hoekverstelling.....	12
3.7.2 Voetenbank met vastzetter.....	12
3.8 Voetsteunen.....	13
3.8.1 Positioneren van de voetsteunen.....	14
3.9 Voetsteunen met voetschalen	15
3.10 Wielen.....	15
4. Toebehoren.	16
4.1 Hoofdsteun.....	16
4.1.1 Hoofdsteun met in hoek verstelbare zijgeleider	16
4.2 Afneembare rug.....	17
4.3 Romppelotten	18
4.4 Wegklapbare romppelotten	18
4.5 Vastzetrem.....	18
4.6 Dijbeensteunen.....	19
4.7 Abduceerbare beengeleider	19
4.8 Instelbare bekkengeleider.....	20



Inhoud.

4.9 Afzwenkbaar werkblad	21
4.9.1 Afzwenkbaar werkblad met opklapbeveiliging.....	21
4.9.2 Insteekbaar werkblad.....	21
4.10 Knie-abductiewig.....	22
4.11 Wielbasisverlenging	22
5. Reiniging en onderhoud.	22
5.1 Reinigen en desinfecteren	22
5.1.1 Reiniging	22
5.1.2 Desinfectie	23
5.2 Inspectie	23
5.3 Onderhoud.....	23
5.3.1 Aandachtspunten onderhoud.....	23
5.3.2 Onderhoudsschema.....	24
5.4 Reserveonderdelen.....	25
5.5 Gebruiksduur en hergebruik	25
6. Technische gegevens.	26
7. Garantie.	27
8. Identificatie.	28
8.1 Serienummer/productiedatum.....	28
8.2 Productversie.....	28
8.3 Uitgave van het document.....	28
8.4 Naam en adres van de producent, uitleverende dealer.....	28

1. Voorbereiding.

1.1 Levering

Controleer het product bij ontvangst op volledigheid en gebreken en let op eventuele transportschade. Controleer het product in aanwezigheid van de bezorger. Mocht er sprake zijn van transportschade, inventariseer deze dan (vaststelling van de gebreken) in aanwezigheid van de bezorger. Stuur een schriftelijke reclamatie naar de verantwoordelijke dealer.

1.2 Veiligheidsmaatregelen vóór het gebruik

Het correcte gebruik van het product vraagt een nauwgezette en zorgvuldige instructie van de gebruiker resp. de begeleider. Wij verzoeken u om de gebruiksaanwijzing voor de eerste ingebruikname van het product aandachtig door te lezen en in acht te nemen. De mogelijkheid bestaat dat de productonderdelen die met de huid in aanraking kunnen komen, warm kunnen worden door zonnestralen. Afhankelijk van de duur en de intensiteit van de zonnestralen kunnen de oppervlakken van individuele onderdelen boven de 41 °C stijgen en daardoor bij direct huidcontact tot lichte verbrandingen leiden. Bedek deze plaatsen daarom, of bescherm het apparaat tegen direct zonlicht.

1.3 Veilig afvoeren

Voor het behoud en ter bescherming van het milieu, het voorkomen van milieuverontreiniging, en om de recycling van grondstoffen te verbeteren, dient u de afvoerinstructies in de **punten 1.3.1** en **1.3.2** in acht te nemen.

1.3.1 Verpakking

De verpakking van het product dient voor een eventueel toekomstig, noodzakelijk transport te worden bewaard. Wanneer u het product voor reparatie of in geval van een garantieclaim naar ons terug moet sturen, dan graag, indien mogelijk, de originele doos gebruiken, zodat het product optimaal verpakt is. Breng in andere gevallen het verpakkingsmateriaal per soort naar de recycling.



Laat het verpakkingsmateriaal niet zonder toezicht, omdat het mogelijk een bron van gevaar vormt.

1.3.2 Product

Voer na verstrijken van de levenscyclus van het product de voor het product gebruikte grondstoffen naar hun aard af voor recycling (zie materiaalinformatie onder **punt 2.1**).



1. Voorbereiding.

1.4 Opbergplaats van de gebruiksaanwijzing

Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en zorg ervoor dat deze in geval van een mogelijk hergebruik bij het product blijft. Bij verlies van de gebruiksaanwijzing kan te allen tijde een actuele versie worden gedownload op www.schuchmann.de.

2. Productbeschrijving.

2.1 Materiaalinformatie

Het basisframe alsmede de afzonderlijke elementen zijn van aluminium vervaardigd, corrosievrij en gepoedercoat. De bekleding bestaat voor 100% uit polyester en is brandvertragend (volgens DIN EN 1021-1+2).

2.2 Handling/transport

De eet-/werkstoel is niet bedoeld om te worden gedragen, omdat hij van wielen is voorzien. Mocht het dragen vanwege hindernissen niet vermeden kunnen worden, dan dient u zich ervan te vergewissen dat alle bewegende delen vastgezet zijn. Ga vervolgens naast de eet-/werkstoel staan, pak deze voor en achter onder het zitgedeelte vast en draag hem naar de gewenste plaats. Voor het transporteren van de eet-/werkstoel, stelt u alle instellingen op de meest compacte maat in (voetsteun opklappen, zithoogte in de laagste stand, etc.).



Zet alle beweegbare onderdelen vast voordat u het onderstel gaat dragen!



De gebruiker mag zich tijdens het transport niet in de eet-/werkstoel bevinden!

2.3 Toepassingsgebieden, gebruik conform de voorschriften

De meegroeierende eet-/werkstoel **loeki 3**. is een medisch product van risicoklasse 1 en is ontworpen gebruik thuis, op de kleuterschool en op school. Deze is te gebruiken voor alle leeftijdscategorieën van kleine kinderen tot jongeren. Individueel instelbare zittingmaten en ondersteunende pelotten zorgen voor een stabiele en rechte zithouding. Elk ander of verdergaand gebruik wordt als oneigenlijk beschouwd.

2.3.1 Indicaties

De eet-/werkstoel **loeki 3**. is ontworpen voor kinderen en jongeren die niet vrij kunnen zitten of staan, maar waarvan de beperkte romphouding het zitten in een zitschaal niet permanent vereist.

2. Productbeschrijving.

Het gaat hier onder meer om een beperking van het zitten bij functionele en/of structurele beschadigingen van de romp of van de romp- en mogelijk nekspieren (bijv. door neurologische/neuromusculaire aandoeningen, misvormingen van de wervelkolom) met een verkeerde houding.

2.3.2 Contra-indicaties

Over het algemeen dient de indicatie door medisch-orthopedische zijde te worden begeleid. Daarom dient in dit verband voor de zorg duidelijk te zijn of er contra-indicaties bestaan ten aanzien van de gebruiker. Over het algemeen is elke vorm van pijn een contra-indicatie.



2.4 Oneigenlijk gebruik/waarschuwingen

- Let erop dat het product niet door meerdere gebruikers gelijktijdig wordt gebruikt.
- Gebruik de eet-/werkstoel alleen op een vlakke en stabiele ondergrond.
- Gebruik de eet-/werkstoel niet voor het transport van de gebruiker **in voertuigen**.
- Om de eet-/werkstoel tijdens het transport veilig op te kunnen tillen, gaat u zijdelings naast de eet-/werkstoel staan en pakt u deze voor en achter bij het zitvlak vast. Daarbij moeten alle beweegbare delen zijn vastgezet.
- Laat de gebruiker nooit zonder toezicht in de eet-/werkstoel zitten.
- Het correcte gebruik van de eet-/werkstoel vraagt een nauwgezette en zorgvuldige instructie van de gebruiker resp. de begeleider.
- De maximum belasting (zie **punt 6**) mag niet worden overschreden.
- Gebruik de eet-/werkstoel niet met defecte, versleten of ontbrekende onderdelen.
- Omwille van de brandveiligheid mag de eet-/werkstoel niet in de omgeving van een open vuur of een andere sterke warmtebron zoals elektrische of gasverwarming worden geplaatst.
- Gebruik alleen toebehoren en reserveonderdelen van de firma Schuchmann, omdat u anders de veiligheid van de gebruiker of begeleider in gevaar brengt.
- Gebruik de eet-/werkstoel alleen als alle componenten correct zijn aangebracht en ingesteld.
- Er dient op gelet te worden dat er zich bij alle in- en afstellingen geen ledematen van de gebruiker of begeleider in het in- of afstelgebied bevinden, zodat de kans op letsel wordt geminimaliseerd.
- Gebruikers die problemen hebben met zien of lezen moeten zich de gebruiksaanwijzing laten voorlezen om veilig met de eet-/werkstoel om te kunnen gaan.



2. Productbeschrijving.

2.5 Uitrusting basismodel

- incl. armleuningen, voetsteun met sleuven voor gordels, schuifgreep, standaard zitkussen met hoes
- Zithoogte instelbaar met gasveerondersteuning
- 4 wielen (75 mm), waarvan 2 met vastzetter
- Instelmogelijkheden: Zithoek (per gasveer 500N), rughoek, zitdiepte en zitbreedte, in hoek, hoogte en breedte verstelbare armleuningen, in hoogte regelbare rugleuning, opklapbare voetenbank, verstelbare kniehoek en hoogte

2.6 Lijst met toebehoren

- Hoofdsteen
- Afneembare en actieve rug
- Romppelotten (ook neerklapbaar)
- Dij- en bovenarmgeleider
- Instelbare bekkengeleider
- Werkblad
- Knie-abductiewig
- Wielbasisverlenging
- Gordelmontageset voor het
- zit- en ruggedeelte
- Incontinentiecoating
- Positioneringshulpen
- Vastzetrem
- Kuitsysteem
- Kantelbeveiliging
- Enkele voetsteunen
- Voetschalen, voetenbankkussens, voetsteunkussens

2.7 Productoverzicht

Onderstaande afbeelding toont u de benaming van de belangrijkste componenten, evenals de begrippen, die de lezer bij het lezen van de gebruiksaanwijzing tegenkomt.




3. Instellingen.

Instellingen en verstellingen van het product mogen uitsluitend worden uitgevoerd door mensen die een passende instructie hebben gekregen van een adviseur voor medische producten. Daarbij dient erop gelet te worden dat er zich bij alle in- en verstellingen geen ledematen van de begeleider of gebruiker in het in- of verstelgebied bevinden, zodat de kans op letsel wordt geminimaliseerd. Alle instellingen kunnen worden uitgevoerd met standaardgereedschap (zoals inbussleutel, schroevendraaier of moersleutel).

3.1 Zithoogte

De zithoogte wordt met behulp van een gasveer geregeld. Voor het hoger instellen van de zithoogte wordt het voetpedaal (A) op het basisonderstel bediend. Door licht te drukken schuift de ziteenheid omhoog. U kunt de ziteenheid laten zakken door boven op het zitvlak te drukken en tegelijk het voetpedaal te bedienen. De gasveer dient slechts als ondersteuning van de hoogteverstelling. Het voetpedaal kan met de trekspanstift (B) (aan de binnenkant van het voetpedaal) tegen onbedoelde bediening worden geborgd. Verdraai hiervoor de trekspanstift totdat hij vastklikt. Eventueel kunt u door licht bewegen van het voetpedaal het vastklikken ondersteunen. De vergrendeling wordt ontgrendeld door de trekspanstift eruit te trekken en deze vervolgens een kwartslag te draaien.

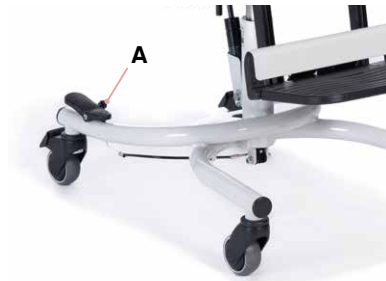

Let erop dat er bij het instellen/regelen van de zithoogte geen lichaamsdelen (voeten) in het bereik van het instel-/regelmechanisme (tussen vloer en voetsteun van de eet-/werkstoel) terechtkomen, om mogelijk letsel te voorkomen!



3. Instellingen.


3.2 Zithoek

De hendel voor de zithoekverstelling is van een kinderbeveiliging voorzien. Om de hoek van de ziteenheid in te stellen, zijn er twee mogelijkheden.

Bij de eerste mogelijkheid wordt handgreep (A) achter onder de zit-schaalopname bediend. Deze wordt horizontaal in elkaar geschoven totdat het vastklikt. De ziteenheid kan nu in de actieve of passieve stand worden ingesteld.




Bij de tweede mogelijkheid wordt de kleine handgreep aan de achterkant van de schuifgreep (B) bediend. De handontgrendeling wordt ingedrukt gehouden en nu kan de ziteenheid ook in de actieve of passieve positie worden gezet.

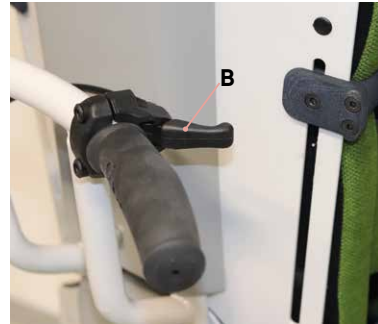

3.3 Zitdiepte

Voor het instellen van de zitdiepte draait u de twee vleugelmoeren (C) onder de ziteenheid los. Daarna kan het zitvlak traploos naar voren en achteren worden verschoven.

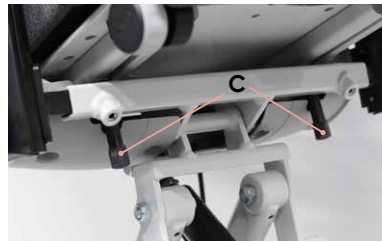

Draai na iedere instelling alle schroefverbindingen weer vast!

3.4 Rughoek

De rughoek kan na het losdraaien van de klemhendel (A) aan de rechterkant van de ziteenheid worden ingesteld.




Let erop dat bij het regelen/instellen van de rughoek geen lichaamsdelen in het bereik van het instel-/regelmechanisme terechtkomen, om mogelijk letsel te voorkomen.



3.5 Rughoogte


Draai de schroef (B) met een inbus-sleutel (M8) aan de achterkant los en breng de rug op de gewenste hoogte. Draai de schroef (B) daarna weer vast.

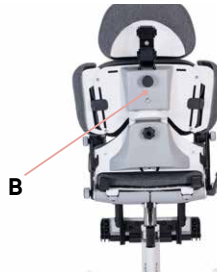

3.6 Armleuningen

De armleuningen zijn in hoek, lengte en breedte verstelbaar. De hoekverstelling kan na het losmaken van de draaigreep (C) gebeuren. Door de draaigreep (D) los te maken, kan de hoogte worden ingesteld. Draai de betreffende draaigreep weer vast.

De breedteverstelling kan plaatsvinden na het losdraaien van beide schroeven (E), die zich aan de onderzijde van de ziteenheid bevinden.

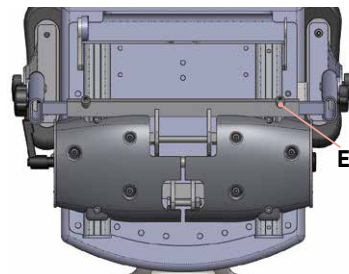


Draai na iedere instelling de draaigreep en de schroeven weer vast!

3. Instellingen.


3.7 Voetenbank

Het basismodel van eet-/werkstoel **loeki 3** beschikt reeds over een voetenbank (A). Deze kan omhoog worden geklapt, heeft een slipvast oppervlak (B) en beschikt over 6 sleuven (C) voor bevestiging van gordels zoals de voetmanchetten of voetpositioneringshulpen. Er zijn daarnaast nog twee andere voetenbankmodellen.

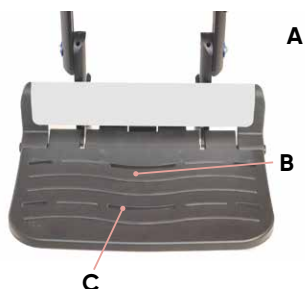

3.7.1 Voetenbank met hoekverstelling


Door de schroef (D) los te maken, kan de kantelhoek van de voetenbank worden ingesteld.

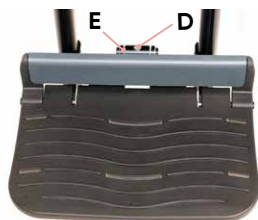


Door de draaihendel (E) naar achteren te duwen, wordt de voetenbank ontgrendeld en kan deze op of neer worden geklapt. Let bij het op- en neerklappen op het bijbehorende inklikgeluid.

3.7.2 Voetenbank met vastzetter

Een andere manier om de voetenbank op of neer te klappen, is door aan de treksluiting (F) te trekken. Hierdoor komt de voetenbank vrij en kan deze worden opgeklapt.

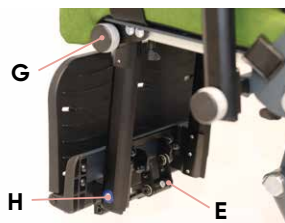

Let erop dat bij het regelen/instellen van de voetenbank geen lichaamsdelen in het bereik van het instel-/regelmecanisme terecht komen, om mogelijk letsel te voorkomen.

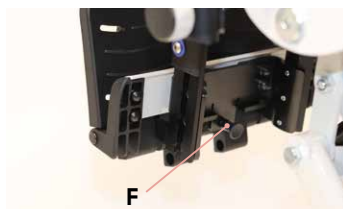

Voor het instellen van de kniehoek draait u de draaigreep (G) onder het zitvlak aan beide kanten los, brengt u de voetenbank in de gewenste positie en draait u de draaigreep (G) weer vast.

Voor een traploze hoogteverstelling draait u de twee schroeven (H) aan beide zijden van de voetenbank los, brengt u de voetenbank in de gewenste positie en draait u de schroeven (H) weer vast.



Draai na iedere instelling de draaigrepen en de schroeven weer vast!

3. Instellingen.


3.8 Voetsteunen

loeki 3. kan optioneel ook met voetsteunen (A) worden uitgerust. Deze beschikken over een slipvast oppervlak (B) en elk 4 sleuven (C) voor bevestiging van gordels zoals voetmanchetten of voetpositioneringshulpen.

Voor het instellen van de kniehoek draait u de draaigrepen (D) onder het zitvlak aan beide zijden los. Breng de voetsteunen in de gewenste positie en draai de draaigrepen (D) weer vast.

Om bijvoorbeeld het instappen te vergemakkelijken, kunnen de voetsteunen omhoog worden geklapt door aan de treksluiting onder de voetsteun (E) te trekken.

Voor een traploze hoogteverstelling draait u bij elke voetsteun de schroef (F) los, brengt u de voetsteun in positie en draait u de schroeven (F) weer vast.

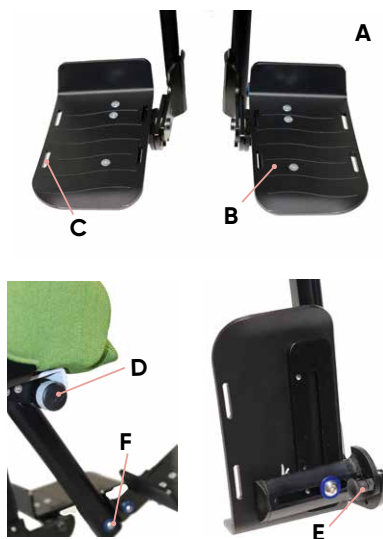

Draai na iedere instelling de draaigrepen en de schroeven weer vast!

3. Instellingen.

3.8.1 Positioneren van de voetsteunen

Voor een optimale positionering van de voeten kunnen de voetsteunen onafhankelijk van elkaar in breedte, hoek en diepte worden afgesteld.

Voethoek



De voethoek (A) van de betreffende voetsteun kan worden ingesteld van (-)15° tot 15°. Draai hiervoor de schroeven (A) aan de zijkant van de voetsteunen in of uit en stel daarmee de gewenste voethoek in.

Breedte

De breedte kan op twee punten worden ingesteld. Om de breedte in te stellen (B), draait u de schroeven (C) aan beide voetsteunen los. Stel de gewenste breedte in en draai de schroeven weer vast. Om de breedte in te stellen (D), draait u de schroeven (E) los. Stel de gewenste breedte in en draai de schroeven (E) weer vast.

Hoek/diepte

Voor het instellen van de hoek en de diepte (F) draait u de schroeven (E) los, brengt u de voetsteunen in de gewenste positie en draait u de schroeven (E) weer vast. Daarnaast kan op deze manier ook een aanvullende breedteverstelling worden gedaan (zie **punt Breedte**).

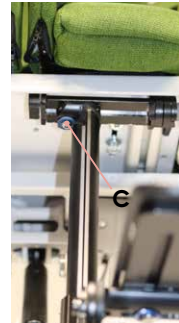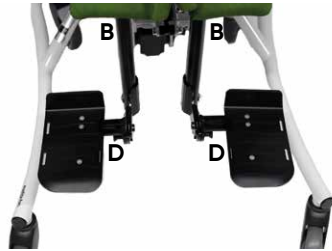


Draai na iedere instelling alle schroefverbindingen weer vast!

3. Instellingen.

3.9 Voetsteunen met voetschalen

De voetsteunen kunnen optioneel ook met voetschalen (A) worden uitgerust. Ook hierbij kunnen, net als bij de normale uitvoering, de kniehoek worden ingesteld, de voetschalen opgeklapt en de hoogte worden ingesteld (zie **punt 3.8**). Voor een optimale positionering van de voeten kunnen de voetsteunen met voetschalen onafhankelijk van elkaar in breedte, hoek en diepte worden afgesteld (zie **punt 3.8.1**). De voetschalen zijn van riemen voorzien om de gebruiker in de voetschalen vast te kunnen zetten. De riemen kunnen met behulp van de magneetsluitingen worden gesloten. Voer het uiteinde van de riem (B) in de richting van de sluiting, dan klikt deze vanzelf vast. Voor het openen van de riem drukt u op de knop (C). Voor de lengte-instelling kan de klittenbandsluiting van de riem (D) aan beide zijden worden geopend en in lengte worden veresteld. Voor het sluiten van de riem bij de voorvoet leidt u deze door de opening (E) en sluit u de riem met de klittenbandsluiting.

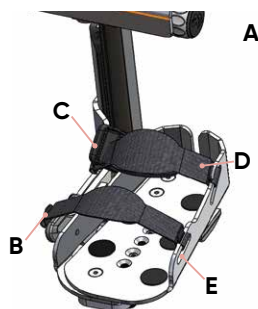

Draai na iedere instelling alle schroefverbindingen weer vast!

3.10 Wielen

De eet-/werkstoel dient in principe door vastzetten van de 2 achterste wielen geblokkeerd te worden, om ongewild weggrollen te voorkomen. Druk daarvoor met de punt van de voet de remmen (F) omlaag.



De rem dient alleen ter voorkoming van onbedoeld weggrollen op effen vlakken!

4. Toebehoren.

4.1 Hoofdsteun

Alle hoofdsteunen zijn standaard afneembaar. De hoofdsteun (A) is in hoogte en diepte instelbaar.

Om de diepte in te stellen, draait u de schroef (B) los en stelt u de gewenste diepte van de steun in. Draai daarna de schroef (B) weer vast.




Door de draaigreep (C) los te maken, kan de hoogte de hoofdsteun worden ingesteld. Trek de hoofdsteun daartoe gewoon naar boven totdat de gewenste hoogte is bereikt. Draai de draaigreep (C) daarna weer vast.

4.1.1 Hoofdsteun met in hoek verstelbare zijgeleider

De hoofdsteun met de in hoek verstelbare zijgeleider (D) kan in hoogte, diepte en hoek worden ingesteld (zie **punt 4.1**).

Daarnaast kunnen de zijgeleiders individueel in hoek worden versteld.

Draai voor het instellen van de zijgeleiders de inbusschroeven (E+F) los en breng de betreffende zijgeleiders in de gewenste positie.

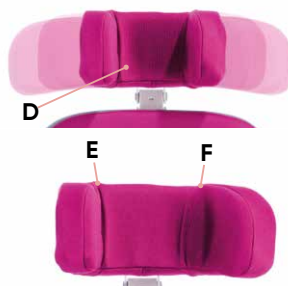

Draai na iedere instelling de draaigreep en de schroeven weer vast!



Ondersteun het hoofd van de gebruiker met één hand wanneer u tijdens het gebruik aanpassingen maakt aan de hoofdsteun!


4. Toebehoren.

4.2 Afneembare rug

De afneembare rug kan aan de achterkant van de eet-/werkstoel worden bediend.

Bij gebruik van de ontgrendelingshendel voor het verstellen van de zittinghoek op de duwstang, maakt u eerst de afneembare bowdenkabel los, zoals weergegeven in de fotogalerij (A).

Draai daarna draaigreep (B) los, druk de vergrendelingshendel (C) samen en verwijder vervolgens de rug. Het plaatsen van de rug gaat op dezelfde manier. Draai daarna de draaigreep (B) weer vast en zet de bowdenkabel (A) weer vast.

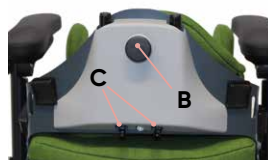

Draai na iedere instelling de draaigreep en de schroeven weer vast!



4. Toebehoren.

4.3 Romppelotten

De romppelotten kunnen afzonderlijk in hoogte en breedte worden afgesteld.

Maak voor het instellen van de breedte de schroeven **(A)** los en breng de romppelotten in de gewenste positie. Draai daarna de schroeven **(A)** weer vast.

Ga bij het instellen van de hoogte met de schroef **(B)** op dezelfde manier te werk. Draai de schroef **(B)** los, brengt de romppelotten in de gewenste positie en draai de schroef **(B)** weer vast.



4.4 Wegklapbare romppelotten


De wegklapbare romppelotten kunnen zijdelings worden neergeklapt om gemakkelijk plaats te kunnen nemen. Druk daarvoor zijdelings op de rompelotte de rode drukknop **(C)** boven het scharnier en zwenk de pelotte naar opzij weg.



Let er bij het terugklappen op, dat de rompelotte vastklikt!

4.5 Vastzetrem



De vastzetrem kan door de gebruiker zelf worden bediend. Wanneer de hendel **(D)** naar beneden wordt gedrukt, is de rem ontgrendeld. Als de hendel **(D)** naar boven staat, blokkeert de rem.

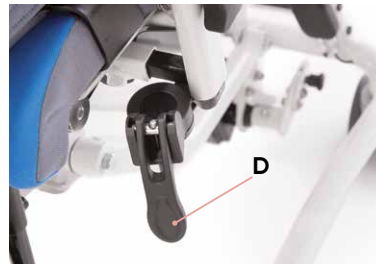

4. Toebehoren.

4.6 Dijbeensteunen

De kussens van de dijbeensteunen zijn afzonderlijk in te stellen in breedte en diepte. Om de breedte in te stellen, draait u de beide vleugelmoeren (A) onder het zitvlak los en brengt u het kussen van de dijbeensteun in de gewenste positie. De diepteregeling is, behalve bij de standaardversie voor maat 0 met instelbare bekkengeleider, bij elke dijbeensteun mogelijk. Voor het instellen van de diepte opent u de klittenbandsluitingen (B), draait u de 3 lenskopschroeven (C) met inbus los en brengt u het kussen in de gewenste positie.

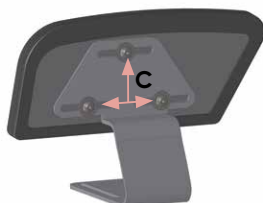
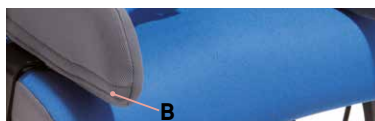


Draai na iedere instelling de schroefverbindingen weer vast!

4.7 Abduceerbare beengeleider

De abduceerbare beengeleider maakt medisch noodzakelijke abductie van de dijen mogelijk en egaliseert verschil in zitdiepte.




Voor het instellen van de beengeleider draait u beide moeren (D) onder het zitvlak los en brengt u de beengeleider in de gewenste positie. U kunt eenvoudig de abductiehoek (1), de dijbreedte (2) en de beenlengtecompensatie resp. het zitdiepteverval (3) via de sleuven instellen, terwijl de gebruiker in de eet-/werkstoel zit.

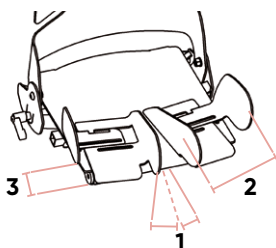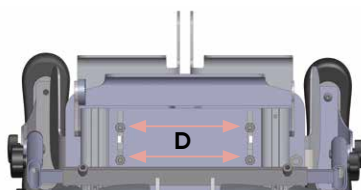

4. Toebehoren.

4.8 Instelbare bekkengeleider

De instelbare bekkengeleider kan in de breedte worden ingesteld, biedt de gebruiker een grote mate van veiligheid en positioneert het bekken. Draai eerst de cilinderkopschroef (A) aan de achterkant van de eet-/werkstoel, aan de onderkant van de cover los. Druk daarna de voorkant van het kussen iets omlaag en draai de inbuschroef (B) los. Zet nu de gebruiker in de stoel en breng de instelbare bekkengeleider in de gewenste positie. Draai eerst de cilinderkopschroef (A) weer vast en haal dan de gebruiker pas uit de stoel. Nu hoeft u alleen nog de inbuschroef (B) weer vast te schroeven en daarna kunt u de gebruiker weer terugzetten in de stoel.

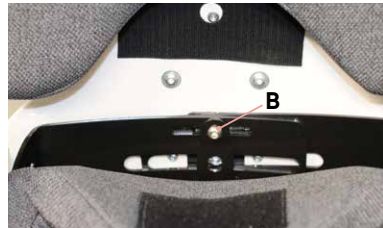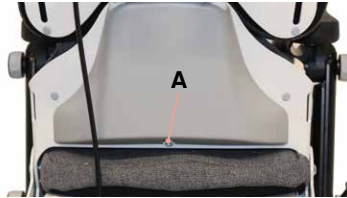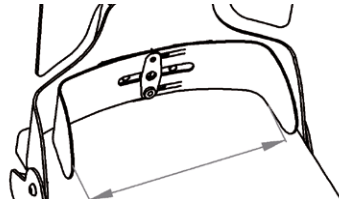


Draai na iedere instelling de draaigreep en de schroeven weer vast!

4. Toebehoren.



4.9 Afzwenkbaar werkblad

Het standaard werkblad (A) is in hoogte en diepte instelbaar. Het instellen van de hoogte gebeurt via het verstellen van de armleuningen (zie **punt 3.6**). Voor het instellen van de diepte draait u de vleugelmoer (B) los en brengt u het werkblad in de gewenste positie. Om weg te zwenken, trekt u het blad iets naar voren en zwenkt u het blad omhoog, weg naar de zijkant van de eet-/werkstoel. Met behulp van de miniwing-schroef (C) beveiligt u het werkblad tegen onbedoeld opklappen.

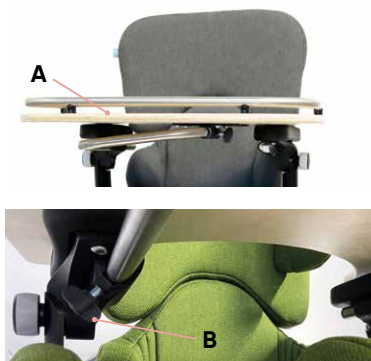


4.9.1 Afzwenkbaar werkblad met opklapbeveiliging

Het standaard werkblad kan met de extra "opklapbeveiliging" (D) worden geconfigureerd. Dit blad biedt het voordeel dat het niet onbedoeld kan opklappen tijdens gebruik. Wegzwenken is mogelijk door het blad naar voren te trekken totdat de opklapbeveiliging (D) aan de rechterkant loskomt (zoals bij E). Draai het werkblad naar boven weg (C) en leid het naar de zijkant van de eet-/werkstoel.

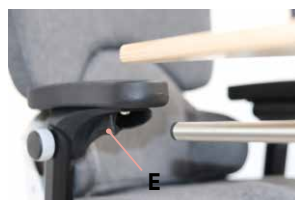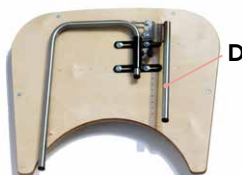

4.9.2 Insteekbaar werkblad

Het insteekbare werkblad (F) kan gemakkelijk aan de eet-/werkstoel worden aangebracht (E). Hiervoor schroeft u eerst de lange buis (G) en vervolgens de korte buis (H) in de houder onder de armleuningen. Wegzwenken is niet mogelijk.

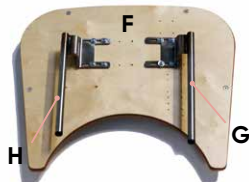

4. Toebehoren.

4.10 Knie-abductiewig

De knie-abductiewig (A) dient met behulp van een steekas voor op de zitplaat te worden gemonteerd. Druk op de knop aan de steekas en dan kan de abductiewig eenvoudig worden verwijderd of geplaatst. Bij het plaatsen van de abductiewig moet deze met een duidelijke "klik" vastklikken.



4.11 Wielbasisverlenging

De wielbasisverlenging is niet instelbaar! Deze dient alleen voor de stabiliteit, met name bij grote zitschalen en bij extreem naar achteren ingestelde zithoek.

5. Reiniging en onderhoud.



5.1 Reinigen en desinfecteren

5.1.1 Reiniging

Reinig alle frame-elementen regelmatig met een spons of vochtige doek, met name waterdruppels moeten worden verwijderd. Bij sterke verontreiniging moet de reiniging met een mild huishoudelijk reinigingsmiddel worden uitgevoerd. Het is belangrijk om de gereinigde plaatsen goed droog te maken.

Alle stoffen die niet kunnen worden verwijderd, kunnen met een vochtige doek worden afgeveegd. Let bij alle verwijderbare stoffen op de ingenaaide onderhoudsetiketten (zoals A+B) op het betreffende element.

Neem onze algemene instructies met betrekking tot reiniging en hygiëne in acht. Deze vindt u op www.schuchmann.de/mediathek.

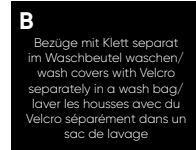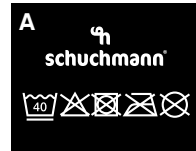

5. Reiniging en onderhoud.

5.1.2 Desinfectie

Voor het desinfecteren van oppervlakken van de metalen en kunststof onderdelen kunnen verschillende producten worden gebruikt.

Vloeibare desinfectiemiddelen zijn verkrijgbaar als kant-en-klare-oplossing, die op een zachte doek moet worden gespoten en vervolgens gelijkmatig moet worden aangebracht. Als alternatief kan er ook gebruik worden gemaakt van doekjes die in een desinfectiemiddel zijn gedompeld en waarmee vervolgens de producten grondig worden afgeveegd. In beide gevallen moet erop worden gelet dat het product volledig nat wordt. Desinfectie in volautomatische desinfectie-installaties is ook mogelijk en wordt zelfs aanbevolen.

De inwerktijden kunnen variëren en staan in de documentatie van de fabrikant vermeld.

5.2 Inspectie

Voer een dagelijkse visuele controle uit en controleer het product regelmatig op scheuren, breuken, ontbrekende onderdelen en defecten. Neem bij een defect of storing rechtstreeks contact op met de dealer die u het product heeft geleverd (zie **punt 8.5**).

5.3 Onderhoud

Omwille van de veiligheid van de gebruiker en voor het behoud van de productaansprakelijkheid dient er minimaal eenmaal per jaar onderhoud te worden uitgevoerd door de dealer (zie **punt 8.5**). Het uitgevoerde onderhoud dient te worden vastgelegd in het onderhoudsschema (zie **punt 5.3.2**).

5.3.1 Aandachtspunten onderhoud

- Basisreiniging conform specificaties van de fabrikant (zie **punt 5.1.1**)
- Evt. desinfectie conform specificaties van de fabrikant (zie **punt 5.1.2**)
- Beschadigingen aan frame, aanbouwdelen en toebehoren (scheuren, breuken, corrosie, verbogen of ontbrekende onderdelen)
- Vastheid van de verbindingen (draai losse schroeven vast, vervang ontbrekende schroeven)
- Werking van de insteелеlementen (schroeven, ontgrendelhendel, voetpedaal)
- Werking van de overige insteелеlementen (rug, hoofdsteun, pelotten, armleningen, voetsteunen, blad en geleidingen bij de benen)
- Werking van de gasveren resp. de hydrauliek/elektrische aandrijving (evt. bowden-kabels aanpassen)
- Werking van de beveiligingselementen (kantelbeveiliging)
- Correcte montage van de ziteenheid
- Werking van de remmen
- Werking van de wielen (concentriciteit, soepele loop)



5. Reiniging en onderhoud.

- Controle van de gordels op beschadigingen (klemmen, sluitingen, naden)
- Controle van de kussens en hoezen op beschadigingen
- Leesbaarheid van het typeplaatje
- Afsluitende volledige controle van de werking van het hulpmiddel
- Controle van de correcte bevestiging van alle aanbouwdelen en de bijbehorende toebehoren

5.3.2 Onderhoudsschema

Aandachtspunten voor het onderhoud van de fabrikant (zie **punt 5.3.1**) worden uitgevoerd:

Datum	Bedrijf	Naam	Handtekening



Vastgestelde gebreken of beschadigingen moeten voordat het apparaat opnieuw wordt gebruikt zijn verholpen door de dealer of de fabrikant.

5. Reiniging en onderhoud.

5.4 Reserveonderdelen

Gebruik alleen originele toebehoren en originele reserveonderdelen van de firma Schuchmann, omdat u anders de veiligheid van de gebruiker en begeleider in gevaar brengt en uw recht op garantie verliest.

Voor het bestellen van reserveonderdelen kunt u zich, met opgave van het serienummer van het product, tot uw leverancier wenden (zie **punt 8.5**). De benodigde vervangende onderdelen en toebehoren mogen alleen door geschoold personeel worden gemonteerd.

5.5 Gebruiksduur en hergebruik

De te verwachten gebruiksduur van ons product bedraagt, afhankelijk van de intensiteit van het gebruik en het aantal keren dat het hergebruikt wordt, tot ca. "8" jaar, als het gebruik plaatsvindt in overeenstemming met de instructies in deze gebruiksaanwijzing. Het product kan na deze periode nog steeds worden gebruikt, wanneer het in betrouwbare staat verkeert. De te verwachten gebruiksduur is niet van toepassing voor onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn zoals wielen, gasveren,... . Voor het onderhoud en de beoordeling van de staat, en in voorkomende gevallen het hergebruik, is de dealer verantwoordelijk.

Het product is geschikt voor hergebruik. Voer voordat u het product doorgeeft de onder **punt 5.1** genoemde reinigings- en desinfectie-instructies uit. Begeleidende documenten zoals deze gebruiksaanwijzing maken deel uit van het product en moeten aan de nieuwe gebruiker worden doorgegeven. Voor hergebruik hoeft het apparaat niet eerst te worden gedemonteerd. In geval van opslag wordt aangeraden het product in te stellen op zijn meest compacte maten, om ruimte te besparen.




Wanneer er zich tijdens de gebruikstijd bij beoogd gebruik van het product een ernstig incident voordoet, moet dit onmiddellijk aan de fabrikant en de verantwoordelijke instanties worden gemeld.



6. Technische gegevens.

Afmetingen

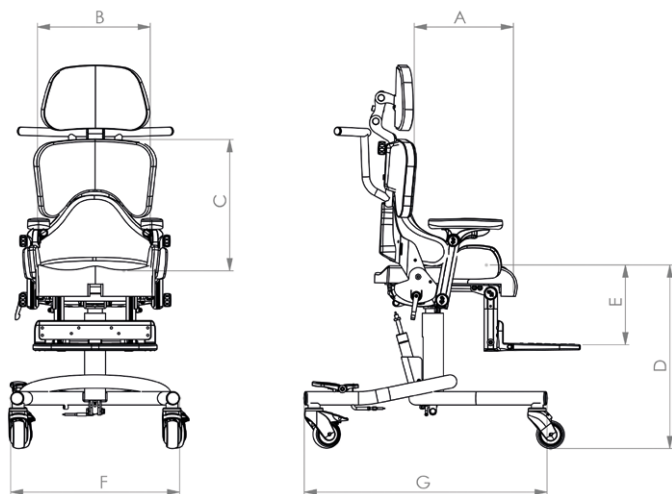

	Mt. 0	Mt. 1	Mt. 1b	Mt. 2
A Zitdiepte*	15-25 cm	21-30 cm	26-36 cm	30-42 cm
B Zittingbreedte	16-26 cm	20-30 cm	20-30 cm	28-38 cm
C Rughoogte met extra korte rug	32-35 cm	-	35-43 cm	-
C Rughoogte met korte rug	35-43 cm	35-43 cm	42-52 cm	42-52 cm
C Rughoogte met lange rug	42-52 cm	42-52 cm	53-63 cm	53-63 cm
D Zithoogte	47,5-58 cm	47,5-58 cm	47,5-58 cm	47,5-58 cm
E Onderbeenlengte	15-25 cm	19-32 cm	27-49 cm	27-49 cm
F Totale breedte	45 cm	45 cm	53 cm	53 cm
G Lengte basisframe	66 cm	66 cm	77 cm	77 cm
Zithoek	(-)5° - 37°	(-)5° - 37°	(-)5° - 37°	(-)5° - 37°
Rughoek	(-)5° - 25°	(-)5° - 25°	(-)5° - 25°	(-)5° - 25°
Max. belasting	30 kg	30 kg	45 kg	50 kg
Gewicht	16 kg	17 kg	18 kg	19 kg

* bij instelbare bekkengeleider met 1 cm verkleind

7. Garantie.


Voor alle producten geldt de wettelijke garantietermijn van twee jaar. Deze gaat in bij de aflevering of overdracht van de producten. Als zich binnen deze periode aantoonbaar een materiaal- of fabricagefout voordoet in de door ons geleverde goederen, zullen wij, als de goederen franco aan ons worden geretourneerd, de gemelde schade inspecteren en, indien nodig, de goederen kosteloos en naar onze keuze repareren of vervangen.



8. Identificatie.

8.1 Serienummer/productiedatum

Het serienummer, de productiedatum alsmede verdere informatie vindt u op het typeplaatje dat zich op al onze producten bevindt (**A**).

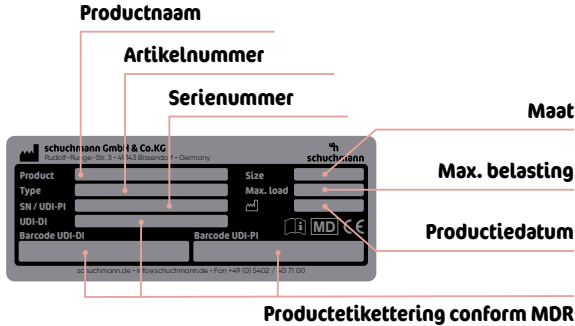

8.2 Productversie

De eet-/werkstoel **loeki 3**. is in vier maten verkrijgbaar en kan met verschillende toebehoren worden uitgebreid (zie **punt 4**).

8.3 Uitgave van het document

Gebruiksaanwijzing **loeki 3**. - Wijzigingsstand A, uitgave 02-2024

8.4 Naam en adres van de producent, uitleverende dealer

Dit product werd geproduceerd door:



Schuchmann GmbH & Co. KG

Rudolf-Runge-Str. 3 · 49143 Bissendorf
Tel. +49 (0) 5402 / 40 71 00 · Fax +49 (0) 5402 / 40 71 109
info@schuchmann.de · www.schuchmann.de

Dit product werd door de volgende dealer geleverd:



Korte Stukken 7 · 5371 MN Ravenstein · Netherlands
Tel. +31 (0)486/45 33 44
info@atlaskidtech.nl · www.atlaskidtech.nl